

# SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr  
Web: www.medicaldirect.hr

**SKU: CP100-45 I  
CP500-45**

## NAMJENA

Ova invalidska kolica dizajnirana su za kretanje osoba s poteškoćama u kretanju i mogu se koristiti za samohod (ako su opremljena velikim stražnjim kotačima) ili uz pomoć operatera. Međutim, u svim slučajevima potrebna je intervencija operatera za razne prilagodbe koje su vam potrebne.

## OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste odredili prilagodbu i ispravnu upotrebu.
- Zapakirana kolica držite dalje od izvora topline.
- RADNI VIJEK - ograničenje korištenja definirano je trošenjem nezamjenjivih dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili upravljaju invalidskim kolicima.
- Zatvorite kolica kako je objašnjeno u ovom priručniku i podignite ih s ručki.
- NEMOJTE pokušavati podići invalidska kolica za dijelove koji se mogu ukloniti.


## OPĆI OPIS

Komponente se mogu mijenjati ovisno o modelu koji ste odabrali:



- A - Okvir
- B - Komplet ključeva za sastavljanje

C - Zakretni naslon za noge

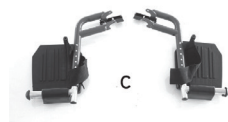

D



D - kotačići od 30 cm (promjer 30 cm) Model Go

E - Kotači 60 cm (promjer 60 cm) model Start



## MONTAŽA/RASTAVLJANJE

### Otvaranje

- Uzmite ručke i povucite prema van, a zatim pritisnite sjedalo dok se invalidska kolica potpuno ne otvore




### Sklapanje



- Snažno podignite sjedalo i zatvorite kolica. Gurnite ručke skupa.

### Ugradite/uklonite naslon za ruku

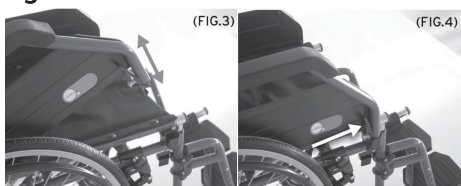

- Postavite stražnju stranu naslona za ruke u stražnji priključni otvor, a zatim ih zakačite za prednji dio tako da ih preokrenete (SL.3)
- Za uklanjanje, otključajte naslon za ruku guranjem prednje poluge za otpuštanje, zatim ih preokrenite i izvucite povlačenjem stražnje poluge za otpuštanje (SLIKA 4).


### Ugradite/uklonite oslonce za noge



- Sastavite oslonac za noge koji se okreće ili podiže postavljanjem ploča šarki na oslonac za noge na klinove šarki na okviru invalidskih kolica. Gurnite naslon za noge prema unutrašnjosti invalidskih kolica dok ne sjedne na svoje mjesto (SLIKA 5)

- Uklonite naslon za noge guranjem poluge za otpuštanje naslona za noge, okrenite ga prema van, podignite naslon za noge s klinova šarke.

### Podesite zakretni oslonac za noge

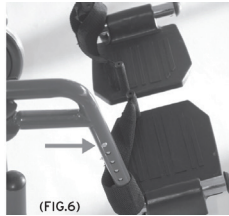

(FIG.6)

- Za podešavanje duljine oslonca za noge, otključajte sigurnosnu polugu, otključajte stražnju sigurnosnu polugu, zatim pritisnite gumb, gurnite cijev do željenog otvora, zatim ponovno zaključajte sigurnosnu polugu. (SLIKA 6)

### Ugradite/uklonite kotače od 30 cm (samo za GO!)

Postavite kotačić u rupu na okviru invalidskih kolica. Kotači s fiksnom osovinom (samo za GO!)

- Postavite mali kotač i blokirajte ga maticom
- Za uklanjanje kotača, odvrnite maticu i uklonite mali kotač



(FIG.8)

### Podesite kočnice s kotačima od 30 cm (samo za GO!)



(FIG.9)

- Kada su postavljeni kotači od 30 cm, postavite kočnicu (SL.9). Imajte na umu da podesite kočnicu tako da može izvršiti pravi pritisak za sigurno zaustavljanje kotača.

### Montirajte/uklonite kotače od 60 cm (samo za START)

Postavite kotač u središnju rupu na okviru invalidskih kolica

- Postavite veliki kotač i blokirajte ga maticom
- Odvijte maticu i uklonite veliki kotač



(FIG.10)

### Podesite kočnice s kotačima od 60 cm (samo za START)



(FIG.11)

- Kada su kotači od 60 cm postavljeni, postavite kočnicu na frezu. Zaključajte uređaj zatezanjem imbus ključeva (SL.11) Imajte na umu da podesite kočnicu tako da može napraviti pravi pritisak za sigurno zaustavljanje kotača.

## PRIJE UPOTREBE

- Pregledajte ima li na okviru oštećenja. Provjerite ima li na cijevima napuknuća i hrđe, kako biste zajamčili sigurnost za ljude i stvari
- Provjerite ispravnost sklopova kako biste zajamčili sigurnu uporabu
- Provjerite je li sjedalo potpuno otvoreno. Ako nije, gurnite sjedalo prema dolje od bočnog okvira.
- Provjerite radi li kočnica

## KAKO KORISTITI

### Sjedanje u invalidska kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže sebi
2. Uključite brave kotača. Predlažemo uklanjanje naslona za ruke kako bi lakše ušli u invalidska kolica
3. Rukama se oslonite na okvir i polako spustite prema sjedalu

### Ustajanje iz invalidskih kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Uključite brave kotača. Predlažemo da uklonite naslon za ruke kako biste si olakšali ustajanje iz invalidskih kolica
3. Premjestite težinu tijela na sjedalo s prijenosom

### Stepenice i visinska razlika

#### PENJANJE

Postavite invalidska kolica na rubnik preko kojeg ćete prijeći. Uravnotežite kolica na stražnjim kotačima, kako biste podigli prednje kotače, dovoljno da ih oslonite na prepreku. Sagnite trup naprijed i snažno gurnite rukohvat. Nastavite gurati dok se stražnji kotači ne popnu preko prepreke.

#### SILAZAK

Za silazak sa stepenica slijedite obrnuti postupak, postavite stražnju stranu invalidskih kolica na rubnik, snažno držite rukohvate i polako siđite s prepreke; zatim uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako biste podigli prednje kotače i završili spuštanje.

### Koristite naslon za ruke

Naslon za ruke može biti preklopiv, odvojjiv ili preklopiv i odvojjiv

Okretanje unatrag - ova značajka je korisna kada morate ući ili izaći iz invalidskih kolica. Pritisnite ručicu za otpuštanje, a zatim okrenite naslon za ruke

### Koristite kotače od 60 cm

Stražnji kotači od 60 cm koriste se kada se za samohod (kad se gurate sami). Uхватite rukohvat i gurajte u željenom smjeru

### Koristite kotače od 30 cm

Stražnji kotači od 30 cm koriste se kada invalidska kolica pomoću ručki gura asistent

### Nošenje

Invalidska kolica su dizajnirana za lako nošenje. Nakon što se uklone naslon za ruke i noge, mogu se zatvoriti i jednostavno postaviti u prtljažnik automobila, na primjer. Ako to nije moguće, postavite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala automobila tako da budu stabilna i da ne mogu skliznuti. Zavežite invalid-

ska kolica sigurnosnim pojasom.

## **ODRŽAVANJE**

Kolica tvrtke Moretti pažljivo su provjereni i opremljeni oznakom EC nakon lansiranja na tržište. Za sigurnost pacijenata i liječnika preporučujemo da proizvođaču ili ovlaštenom servisu dopustite provjeru uređaja svake 2 godine. U slučaju popravka koristite samo originalne rezervne dijelove. Prije uporabe slijedite poglavlje "PRIJE UPOTREBE".

Invalidska kolica Moretti ARDEA ONE zahtijevaju malo elementarnog i povremenog održavanja, u nastavku navodimo preglede koje treba provoditi povremeno:

kvaliteta kočenja - mjesečno  
čišćenje sjedala - po potrebi

## **ČIŠĆENJE**

### **Navlaka i podstava**

Navlaka i podstava su od najlona. Očistite toplom vodom i blagim sapunom.

### **Okvir i metalni dijelovi**

Očistite toplom vodom i blagim sapunom. Osušite mekom krpom kako ne biste ogrebali boju.

### **Kočnice i kotači**

Očistite kotače toplom vodom i blagim sapunom. Obratite pozornost na sušenje kotača, opasno je koristiti invalidska kolica s mokrim kotačima.

### **Dezinfekcija**

Ako trebate dezinficirati uređaj koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju