

ZLOŽLJIVI INVALIDSKI VOZIČEK



NAVODILA ZA UPORABO

Za reklamacijo se obrnite na:

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačiča 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-naslov: prodaja@medicaldirect.si

Spletna stran: www.medicaldirect.si

**SKU: CP100-45 in
CP500-45**

NAMEN

Ta invalidski voziček je zasnovan za premikanje oseb z omejeno mobilnostjo in se lahko uporablja za samostojno gibanje (če je opremljen z velikimi zadnjimi kolesi) ali s pomočjo spremljevalca. Vendar je v vseh primerih potrebna intervencija spremljevalca za različne prilagoditve, ki jih potrebujete.

SPLOŠNA OPOZORILA

- TEGA izdelka NE uporabljajte brez predhodnega branja in razumevanja tega navodila za uporabo.
- Posvetujte se s svojim zdravnikom ali terapevtom, da določite prilagoditev in pravilno uporabo.
- Zapakiran voziček hranite stran od virov toplote.
- DELOVNA DOBA – omejitev uporabe je določena z obrabo nenadomestljivih delov.
- VEDNO imejte roke in prste stran od gibljivih delov, da preprečite poškodbe.
- NE dovolite otrokom, da se igrajo ali upravljajo z invalidskim vozičkom.
- Zložite voziček, kot je razloženo v tem priročniku, in ga dvignite za ročaje.
- NE poskušajte dvigniti invalidskega vozička za dele, ki jih je mogoče odstraniti.


SPLOŠEN OPIS

Komponente se lahko razlikujejo glede na izbrani model:



C - Zasukljiv naslon za noge

- A - Okvir
B - Komplet ključev za sestavljanje

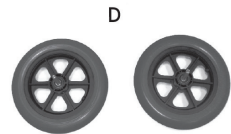

D - Kolesa s premerom 30 cm (premer 30 cm) model Go

E - Kolesa 60 cm (premer 60 cm) model Start



MONTAŽA/RAZSTAVLJANJE

Odpiranje

- Primite ročaje in povlecite navzven, nato pritisnite sedež, dokler se invalidski voziček popolnoma ne odpre



Zlaganje



- Močno dvignite sedež in zaprite voziček. Skupaj potisnite ročaje.

Namestite/odstranite naslon za roko



(FIG.3)



(FIG.4)

- Postavite zadnji del naslona za roko v zadnjo priključno odprtino, nato ga zataknite za sprednji del z zasukom (SL.3)
- Za odstranitev odklenite naslon za roko s pritiskom na sprednjo sprostitevno ročico, nato ga zasukajte in izvlecite s potegom zadnje sprostivitvene ročice (SLIKA 4).

Namestite/odstranite oporo za noge



- Sestavite oporo za noge z zasukom ali dvigovanjem tako, da postavite tečajne plošče opore na noge na zatiče na okviru invalidskega vozička. Potisnite naslon za noge proti notranjosti invalidskega vozička, dokler se ne zaskoči (SLIKA 5)

- Odstranite naslon za noge s pritiskom na sprostitevno ročico, zavrtite navzven, nato dvignite naslon za noge z zatičev.

Nastavite zasukljivo oporo za noge



(FIG.6)

- Za nastavev dolžine opore za noge odklenite varnostno ročico, odklenite zadnjo varnostno ročico, nato pritisnite gumb, potisnite cev do zelenega položaja, nato ponovno zaklenite varnostno ročico. (SLIKA 6)

Namestite/odstranite kolesa 30 cm (samo za GO!)

Postavite kolesce v luknjo na okvirju invalidskega vozička
Kolesa s fiksno osjo (samo za GO!)

- Namestite majhno kolo in ga blokirajte z matico
- Za odstranitev kolesa odvijte matico in odstranite kolo



(FIG.8)

Nastavite zavore s kolesi 30 cm (samo za GO!)



(FIG.9)

- Ko so nameščena 30 cm kolesa, namestite zavoro (SL.9). Upoštevajte, da morate zavoro nastaviti tako, da ustvari pravi pritisk za varno ustavljanje koles.

Namestite/odstranite kolesa 60 cm (samo za START)


Postavite kolo v osrednjo luknjo na okvirju invalidskega vozička

- Namestite veliko kolo in ga blokirajte z matico
- Odvijte matico in odstranite veliko kolo



(FIG.10)

Nastavite zavore s kolesi 60 cm (samo za START)

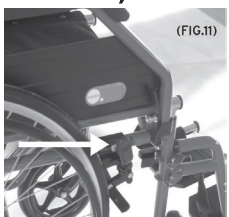

(FIG.11)

- Ko so nameščena 60 cm kolesa, namestite zavoro na ohišje. Zaklenite napravo z zategovanjem imbus vijakov (SL.11) Upoštevajte, da morate zavoro nastaviti tako, da ustvari pravi pritisk za varno ustavljanje koles.

PRED UPORABO

- Preglejte, ali je okvir poškodovan. Preverite razpoke in rjo na cevah, da zagotovite varnost ljudi in predmetov
- Preverite pravilnost sestavnih delov, da zagotovite varno uporabo
- Preverite, ali je sedež popolnoma odprt. Če ni, potisnite sedež navzdol iz stranskega okvirja.
- Preverite delovanje zavor

UPORABA

Sedenje v invalidski voziček

1. Postavite invalidski voziček čim bližje k sedežu, kamor boste sedli
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažji vstop
3. Oprite se z rokami na okvir in se počasi spustite na sedež

Vstajanje iz invalidskega vozička

1. Postavite invalidska kolica što bližje uz sjedalo na koje presjedate
2. Aktivirajte zavore koles. Priporočamo odstranitev naslona za roko za lažje vstajanje
3. Prenesite težo telesa na ciljano sedišče

Stopnice in višinske razlike

PLEZANJE

Postavite invalidski voziček ob robnik, preko katerega boste prešli. Uravnotežite voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa, toliko da jih položite na oviro. Nagnite trup naprej in močno potisnite ročaj. Nadaljujte s potiskanjem, dokler se zadnja kolesa ne povzpnejo čez oviro.

SPUŠČANJE

Za spuščanje po stopnicah sledite obratnemu postopku, postavite zadnji del invalidskega vozička ob robnik, močno držite ročaje in počasi spustite z ovire; nato uravnotežite voziček na zadnjih kolesih, da dvignete sprednja kolesa in zaključite spuščanje.

Uporaba naslona za roko

Naslon za roko je lahko zložljiv, odstranljiv ali zložljiv in odstranljiv

Zasuk nazaj – ta funkcija je uporabna pri vstopu ali izstopu iz vozička.

Pritisnite sprostitveno ročico in zavrtite naslon za roko

Uporaba koles 60 cm

Zadnja kolesa 60 cm se uporabljajo pri samostojnem gibanju (ko se poganjate sami).

Primitte obroč in potisnite v zeleno smer

Uporaba koles 30 cm

Zadnja kolesa 30 cm se uporabljajo, kadar invalidski voziček potiska spremljevalec

Prenos

Invalidski voziček je zasnovan za enostavno prenašanje.

Ko odstranite naslon za roke in noge, ga lahko zložite in preprosto postavite v prtljžnik avtomobila. Če to ni mogoče, postavite invalidski voziček pred zadnji sedež avtomobila tako, da bo stabilen in da ne bo mogel zdrsniti. Privežite ga z varnostnim pasom.

VZDRŽEVANJE

Vozički podjetja Moretti so temeljito preverjeni in označeni z oznako EC po lansiranju na trg. Zaradi varnosti pacientov in uporabnikov priporočamo, da vsakih 2 leti dovolite proizvajalcu ali pooblaščenemu servisu, da preveri napravo. V primeru popravila uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Pred uporabo upoštevajte poglavje »PRED UPORABO«. Invalidski voziček Moretti ARDEA ONE zahteva malo osnovnega in občasnega vzdrževanja, spodaj so navedeni redni pregledi:
kakovost zaviranja – mesečno
čiščenje sedeža – po potrebi

ČIŠČENJE

Prevleka in podloga

Prevleka in podloga sta iz najlona. Očistite z mlačno vodo in blagim milom.

Okvir in kovinski deli

Očistite z mlačno vodo in blagim milom. Obrišite z mehko krpo, da ne opraskate barve.

Zavore in kolesa

Kolesa očistite z mlačno vodo in blagim milom. Posebno pozornost posvetite sušenju koles – nevarno je uporabljati invalidski voziček z mokrimi kolesi.

Dezinfekcija

Če morate razkužiti napravo, uporabite običajno sredstvo za razkuževanje.