

KOMPAKTNA SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA SKINNY



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

SKU: CP620-43

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

NAMJENA

Ova invalidska kolica dizajnirana su za kretanje osoba s poteškoćama u kretanju i mogu se koristiti za samohod (ako su opremljena velikim stražnjim kotačima) ili uz pomoć operatera. Međutim, u svim slučajevima potrebna je intervencija operatera za razne prilagodbe koje su vam potrebne.

OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste odredili prilagodbu i ispravnu upotrebu.
- Zapakirana kolica držite dalje od izvora topline.
- RADNI VIJEK - ograničenje korištenja definirano je trošenjem nezamjenjivih dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili upravljaju invalidskim kolicima.
- Zatvorite kolica kako je objašnjeno u ovom priručniku i podignite ih s ručki.
- NEMOJTE pokušavati podići invalidska kolica za dijelove koji se mogu ukloniti.

OPĆI OPIS

Komponente se mogu mijenjati ovisno o modelu koji ste odabrali:



A - Okvir
B - Komplet ključeva za sastavljanje

C - Zakretni naslon za noge



E

E - Kotači 50 cm (promjer 50 cm) model Skinny

MONTAŽA/RASTAVLJANJE



Otvaranje


- Uzmite ručke i povucite prema van, a zatim pritisnite sjedalo dok se invalidska kolica potpuno ne otvore



Sklapanje

- Snažno podignite sjedalo i zatvorite kolica. Gurnite ručke skupa.

Ugradite/uklonite naslon za ruku

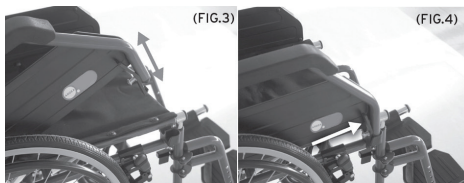

- Postavite stražnju stranu naslona za ruke u stražnji priključni otvor, a zatim ih zakačite za prednji dio tako da ih preokrenete (SL.3)
- Za uklanjanje, otključajte naslon za ruku guranjem prednje poluge za otpuštanje, zatim ih preokrenite i izvucite povlačenjem stražnje poluge za otpuštanje (SLIKA 4).


Ugradite/uklonite oslonac za noge



- Sastavite oslonac za noge koji se okreće ili podiže postavljanjem ploče šarki na oslonac za noge na klinove šarki na okviru invalidskih kolica. Gurnite naslon za noge prema unutrašnjosti invalidskih kolica dok ne sjedne na svoje mjesto (SLIKA 5)

- Uklonite naslon za noge guranjem poluge za otpuštanje naslona za noge, okrenite ga prema van, podignite naslon za noge s klinova šarke.

Podesite zakretni oslonac za noge

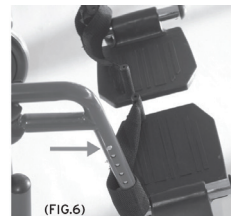

(FIG.6)

- Za podešavanje duljine oslonca za noge, otključajte sigurnosnu polugu, otključajte stražnju sigurnosnu polugu, zatim pritisnite gumb, gurnite cijev do željenog otvora, zatim ponovno zaključajte sigurnosnu polugu. (SLIKA 6)

Montirajte/uklonite kotače od 50 cm


Postavite kotač u središnju rupu na okviru invalidskih kolica

- Postavite veliki kotač i blokirajte ga maticom
- Odvijte maticu i uklonite veliki kotač



(FIG.10)

Podesite kočnice s kotačima od 50 cm

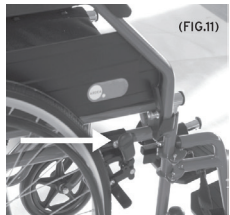

(FIG.11)

- Kada su kotači od 50 cm postavljeni, postavite kočnicu na kotač. Zaključajte uređaj zatezanjem imbus ključeva (SL.11)
- Imajte na umu da podesite kočnicu tako da može napraviti pravi pritisak za sigurno zaustavljanje kotača.

PRIJE UPOTREBE

- Pregledajte ima li na okviru oštećenja. Provjerite ima li na cijevima napuknuća i hrđe, kako biste zajamčili sigurnost za ljude i stvari
- Provjerite ispravnost sklopova kako biste zajamčili sigurnu uporabu
- Provjerite je li sjedalo potpuno otvoreno. Ako nije, gurnite sjedalo prema dolje od bočnog okvira.
- Provjerite radi li kočnica

KAKO KORISTITI

Sjedenje u invalidska kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže sebi
2. Uključite brave kotača. Predlažemo uklanjanje naslona za ruke kako bi lakše ušli u invalidska kolica
3. Rukama se oslonite na okvir i polako spustite prema sjedalu

Ustajanje iz invalidskih kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Uključite brave kotača. Predlažemo da uklonite naslon za ruku kako biste si olakšali ustajanje iz invalidskih kolica
3. Premjestite težinu tijela na sjedalo s prijenosom

Stepenice i visinska razlika

PENJANJE

Postavite invalidska kolica na rubnik preko kojeg ćete prijeći. Uravnotežite kolica na stražnjim kotačima, kako biste podigli prednje kotače, dovoljno da ih oslonite na prepreku. Sagnite trup naprijed i snažno gurnite rukohvat. Nastavite gurati dok se stražnji kotači ne popnu preko prepreke.

SILAZAK

Za silazak sa stepenica slijedite obrnuti postupak, postavite stražnju stranu invalidskih kolica na rubnik, snažno držite rukohvate i polako siđite s prepreke; zatim uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako biste podigli prednje kotače i završili spuštanje.

Koristite naslon za ruke

Naslon za ruke može biti preklopiv, odvojiv ili preklopiv i odvojiv

Okretanje unatrag - ova značajka je korisna kada morate ući ili izaći iz invalidskih kolica.

Pritisnite ručicu za otpuštanje, a zatim okrenite naslon za ruku

Koristite kotače od 50 cm

Stražnji kotači od 50 cm koriste se kada se za samohod (kad se gurate sami).

Uхватite rukohvat i gurajte u željenom smjeru

Nošenje

Invalidska kolica su dizajnirana za lako nošenje. Nakon što se uklone naslon za ruke i noge, mogu se zatvoriti i jednostavno postaviti u prtljažnik automobila, na primjer. Ako to nije moguće, postavite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala automobila tako da budu stabilna i da ne mogu skliznuti. Zavežite invalidska kolica sigurnosnim pojasom.

ODRŽAVANJE

Kolice tvrtke Moretti pažljivo su provjereni i opremljeni oznakom EC nakon lansiranja na tržište. Za sigurnost pacijenata i liječnika preporučujemo da proizvođaču ili ovlaštenom servisu dopustite provjeru uređaja svake 2 godine. U slučaju popravka koristite samo originalne rezervne dijelove. Prije uporabe slijedite poglavlje "PRIJE UPOTREBE".

Invalidska kolica Moretti ARDEA ONE zahtijevaju malo elementarnog i povremenog održavanja, u nastavku navodimo preglede koje treba provoditi povremeno:

kvaliteta kočenja - mjesečno

čišćenje sjedala - po potrebi

ČIŠĆENJE

Navlaka i podstava

Navlaka i podstava su od najlona. Očistite toplom vodom i blagim sapunom.

Okvir i metalni dijelovi

Očistite toplom vodom i blagim sapunom. Osušite mekom krpom kako ne biste ogrebali boju.

Kočnice i kotači

Očistite kotače toplom vodom i blagim sapunom. Obratite pozornost na sušenje kotača, opasno je koristiti invalidska kolica s mokrim kotačima.

Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati uređaj koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju

