



Invalidska kolica Helios

Invalidska kolica Helios Pro

**CP785-46**  
**CP790-46**

## UPUTE ZA KORIŠTENJE



Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## NAMJENA

Ova invalidska kolica dizajnirana su za kretanje osoba s poteškoćama u kretanju i mogu se koristiti za samohod ili uz pomoć operatera. Međutim, u svim slučajevima potrebna je intervencija operatera za razne prilagodbe koje su vam potrebne.

## OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste odredili prilagodbu i ispravnu upotrebu.
- Zapakirana kolica držite dalje od izvora topline.
- RADNI VIJEK - ograničenje korištenja definirano je trošenjem nezamjenjivih dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili upravljaju invalidskim kolicima.
- Zatvorite kolica kako je objašnjeno u ovom priručniku i podignite ih s ručki.
- NEMOJTE pokušavati podići invalidska kolica za dijelove koji se mogu ukloniti.

## OPĆI OPIS

Komponente se mogu mijenjati ovisno o modelu koji ste odabrali:  
A - Okvir  
B - Komplet ključeva za sastavljanje



## MONTAŽA/RASTAVLJANJE

### Otvaranje



- Uzmite ručke i povucite prema van, a zatim pritisnite sjedalo dok se invalidska kolica potpuno ne otvore. (Sl.2)



### Sklopanje

- Snažno podignite sjedalo i zatvorite kolica. Gurnite ručke skupa. (Sl.3)

## Ugradite/uklonite naslon za ruku



- Postavite stražnju stranu naslona za ruke u stražnji priključni otvor, a zatim ih zakačite za prednji dio tako da ih preokrenete (Sl.4)
- Za uklanjanje, otključajte naslon za ruku guranjem prednje poluge za otpuštanje, zatim ih preokrenite i izvucite povlačenjem stražnje poluge za otpuštanje (Sl.4).

## Ugradite/uklonite oslonce za noge

- Sastavite oslonac za noge koji se okreće ili podiže postavljanjem ploča šarki na oslonac za noge na klinove šarki na okviru invalidskih kolica. Gurnite naslon za noge prema unutrašnjosti invalidskih kolica dok ne sjedne na svoje mjesto (Sl.5)



- Uklonite naslon za noge guranjem poluge za otpuštanje naslona za noge, okrenite ga prema van, podignite naslon za noge s klinova šarke.

## Podesite zakretni oslonac za noge



- Za podešavanje duljine oslonca za noge, otključajte sigurnosnu polugu, otključajte stražnju sigurnosnu polugu, zatim pritisnite gumb, gurnite cijev do željenog otvora, zatim ponovno zaključajte sigurnosnu polugu. (Sl.6)

## Elastični podesivi naslon (samo CP790)

Naslon za leđa za model CP790-46 je elastičan i podesiv. Za podešavanje napetosti naslona:

- Uklonite jastuk s naslona;
- Otpustite čičak trake;
- Postavite pacijenta tako da može micati trupom;
- Zatvorite trake;
- Ponovno postavite jastuk natrag.

## Podesite podnožje

Za podešavanje kuta podnožja:

- Otpustite vijak koji se nalazi na vanjskoj strani podnožja (Sl.7)
- Podesite kut podnožja;
- Zategnite vijak.



## Podesite visinu stražnjih kotača



Za podešavanje visine stražnjih kotača:

- Uklonite kotače pomoću brzog otpuštanja;
- Otpustite vijke adaptera kotača (Sl.8)
- Postavite adapter za kotače na željenu visinu;
- Zategnite vijke i maticu;
- Ponovno postavite kotače.

## Podesite prednje kotače

Za promjenu visine prednjih kotača:


- Otpustite vijak koji pričvršćuje kotač za vilicu (Sl.9);
- Uklonite kotačiče i vijak;
- Odaberite željenu rupu;
- Umetnite kotače i zategnite vijak i maticu.



## Podesite dubinu (samo CP790)

Za podešavanje dubine sjedala:

- Odvijte 4 vijka koji pričvršćuju okomiti nosač na sjedalo i na donji okvir (Sl.10);
- Po potrebi pomaknite oslonac sjedala naprijed ili natrag;
- Zavrните vijke u pravilan položaj;
- Podesite sjedalo povećanjem ili smanjenjem sjedala dostupnog kroz čičak trake.

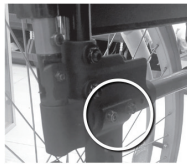

## Podesite visinu ručki za guranje (samo CP790)



Za podešavanje visine ručke za guranje, otpustite ručice na bočnim krajevima naslona, nanjestite ručke na željenu visinu i zategnite ručice. (Sl.11)

## PRIJE UPOTREBE

- Pregledajte ima li na okviru oštećenja. Provjerite ima li na cijevima napuknuća i hrđe, kako biste zajamčili sigurnost za ljude i stvari
- Provjerite ispravnost sklopova kako biste zajamčili sigurnu uporabu
- Provjerite je li sjedalo potpuno otvoreno. Ako nije, gurnite sjedalo prema dolje od bočnog okvira.
- Provjerite radi li kočnica

## KAKO KORISTITI

### Sjedanje u invalidska kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže sebi
2. Uključite brave kotača. Predlažemo uklanjanje naslona za ruke kako bi lakše ušli u invalidska kolica
3. Rukama se oslonite na okvir i polako spustite prema sjedalu

### Ustajanje iz invalidskih kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Uključite brave kotača. Predlažemo da uklonite naslon za ruku kako biste si olakšali ustajanje iz invalidskih kolica
3. Premjestite težinu tijela na sjedalo s prijenosom

### Stepenice i visinska razlika

#### PENJANJE

Postavite invalidska kolica na rubnik preko kojeg ćete prijeći. Uravnotežite kolica na stražnjim kotačima, kako biste podigli prednje kotače, dovoljno da ih oslonite na prepreku. Sagnite trup naprijed i snažno gurnite rukohvat. Nastavite gurati dok se stražnji kotači ne popnu preko prepreke.

#### SILAZAK

Za silazak sa stepenica slijedite obrnuti postupak, postavite stražnju stranu invalidskih kolica na rubnik, snažno držite rukohvate i polako sidite s prepreke; zatim uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako biste podigli prednje kotače i završili spuštanje.

## Koristite naslon za ruke

Naslon za ruke može biti preklapiv, odvojiv ili preklapiv i odvojiv

Okretanje unatrag - ova značajka je korisna kada morate ući ili izaći iz invalidskih kolica.

Pritisnite ručicu za otpuštanje, a zatim okrenite naslon za ruku

Podesite naslon za ruku po visini: pritisnite tipku s vanjske strane naslona za ruku i po potrebi podignite ili spustite naslon za ruku. Otpustite tipku kada pronađete željeni položaj.

Podesite naslon za ruku po dubini: pritisnite tipku na vanjskoj strani mekog naslona za ruku i gurnite naslon za ruku naprijed ili natrag prema potrebi. Otpustite tipku kada pronađete željeni položaj.

## Koristite kotače od 60 cm

Stražnji kotači od 60 cm koriste se kada se za samohod (kad se gurate sami).

Uхватite rukohvat i gurajte u željenom smjeru

## Nošenje

Invalidska kolica su dizajnirana za lako nošenje. Nakon što se uklone naslon za ruke i noge, mogu se zatvoriti i jednostavno postaviti u prtljažnik automobila, na primjer. Ako to nije moguće, postavite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala automobila tako da budu stabilna i da ne mogu skliznuti. Zavežite invalidska kolica sigurnosnim pojasom.

## ODRŽAVANJE

Kolica tvrtke Moretti pažljivo su provjereni i opremljeni oznakom EC nakon lansiranja na tržište. Za sigurnost pacijenata i liječnika preporučujemo da proizvođaču ili ovlaštenom servisu dopustite provjeru uređaja svake 2 godine. U slučaju popravka koristite samo originalne rezervne dijelove. Prije uporabe slijedite poglavlje "PRIJE UPOTREBE".

Invalidska kolica Moretti ARDEA ONE zahtijevaju malo elementarnog i povremenog održavanja, u nastavku navodimo pregleda koje treba provoditi povremeno:

kvaliteta kočenja - mjesečno  
čišćenje sjedala - po potrebi

## ČIŠĆENJE

### Navlaka i podstava

Navlaka i podstava su od najlona. Očistite toplom vodom i blagim sapunom.

### Okvir i metalni dijelovi

Očistite toplom vodom i blagim sapunom. Osušite mekom krpom kako ne biste ogrebali boju.

### Kočnice i kotači

Očistite kotače toplom vodom i blagim sapunom. Obratite pozornost na sušenje kotača, opasno je koristiti invalidska kolica s mokrim kotačima.

### Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati uređaj koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju

