



**Sklopiva putna
invalidska kolica
Travel**

CP850-37

UPUTE ZA KORIŠTENJE



Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

NAMJENA

Ova invalidska kolica dizajnirana su za kretanje osoba s poteškoćama u kretanju i mogu se koristiti za samohod (ako su opremljena velikim stražnjim kotačima) ili uz pomoć operatera. Međutim, u svim slučajevima potrebna je intervencija operatera za razne prilagodbe koje su vam potrebne.



OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama.
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste odredili prilagodbu i ispravnu upotrebu.
- Zapakirana kolica držite dalje od izvora topline.
- RADNI VIJEK - ograničenje korištenja definirano je trošenjem nezamjenjivih dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili upravljaju invalidskim kolicima.
- Zatvorite kolica kako je objašnjeno u ovom priručniku i podignite ih s ručki.
- NEMOJTE pokušavati podići invalidska kolica za dijelove koji se mogu ukloniti.

MONTAŽA/RASTAVLJANJE

Invalidska kolica se mogu otvoriti jednostavno, bez oštata, uz samo nekoliko ručnih operacija.


Otvaranje

Podignite naslon dok se poluge ne blokiraju (slika 1); povucite oslonac za noge prema van (sl. 2); gurnite sjedalo prema dolje dok se potpuno ne otvor (sl. 3); gurnite prema dolje naslone za ruke do 90° stupnjeva.



Sklapanje

Podignite naslone za ruke (sl. 4); Pritisnite poluge na oslonu i gurnite ga prema dolje (sl. 5); povucite prema gore sjedalo i oslonac za noge dok se invalidska kolica potpuno ne sklope (sl. 6); podignite oslonac za noge (sl. 7).

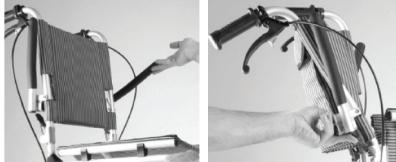

PRIJE UPOTREBE

- Pregledajte ima li na okviru oštećenja. Provjerite ima li na cijevima napuknuća i hrđe, kako biste zajamčili sigurnost za ljudе i stvari
- Provjerite ispravnost sklopova kako biste zajamčili sigurnu uporabu
- Provjerite je li sjedalo potpuno otvoreno. Ako nije, gurnite sjedalo prema dolje od bočnog okvira.
- Provjerite radi li kočnice

KAKO KORISTITI

Sjedanje u invalidska kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže sebi
2. Uključite brave kotača. Predlažemo uklanjanje naslona za ruke kako bi lakše ušli u invalidska kolica
3. Rukama se oslonite na okvir i polako spustite prema sjedalu

Ustajanje iz invalidskih kolica

1. Postavite invalidska kolica što bliže uz sjedalo na koje presjedate
2. Uključite brave kotača. Predlažemo da uklonite naslon za ruku kako biste si olakšali ustajanje iz invalidskih kolica
3. Premjestite težinu tijela na sjedalo s prijenosom

Stepenice i visinska razlika

PENJANJE

Postavite invalidska kolica na rubnik preko kojeg ćete prijeći. Uravnotežite kolica na stražnjim kotačima, kako biste podigli prednje kotače, dovoljno da ih oslonite na prepreku. Sagnite trup naprijed i snažno gurnite rukohvat. Nastavite gurati dok se stražnji kotači ne popnu preko prepreke.

SILAZAK

Za silazak sa stepenica slijedite obrnuti postupak, postavite stražnju stranu invalidskih kolica na rubnik, snažno držite rukohvate i polako sidite s prepreke; zatim uravnotežite invalidska kolica na stražnjim kotačima kako biste podigli prednje kotače i završili spuštanje.

Kočnice

Zaustavite kotač prije ulaska/izlaska, istezanja ili ulaska u lift. Povucite polugu do kraja kako biste zau stavili kolica. Ako je pravilno izvedeno, kočnice prtišću gumu 5/6 mm. Ako je potrebno, upotrijebite ključ da odvrnete maticu i stezni nastavak prema naprijed ili natrag. Ispravno pričvrstite maticu za podešavanje kočnica.

Kotači

Kotač je potreban povremeno provjeravati i prema potrebi podmazivati. Uklonite vilicu izvlačeći vijak i podmazite klin. Skinite i kotač s vilice i podmazite klinove. Ponovno



sastavite kotač i klin i dobro pritegnite vijke.

Nošenje

Invalidska kolica su dizajnirana za lako nošenje. Nakon što se uklone naslon za ruke i noge, mogu se zatvoriti i jednostavno postaviti u prtljažnik automobila, na primjer. Ako to nije moguće, postavite invalidska kolica ispred stražnjeg sjedala automobila tako da budu stabilna i da ne mogu skliznuti. Zavežite invalidska kolica sigurnosnim pojasom.

ODRŽAVANJE

Kolica tvrtke Moretti pažljivo su provjereni i opremljeni oznakom EC nakon lansiranja na tržište. Za sigurnost pacijentata i liječnika preporučujemo da proizvođač ili ovlaštenom servisu dopustite provjeru uređaja svake 2 godine. U slučaju popravka koristite samo originalne rezervne dijelove. Prije uporabe slijedite poglavlje "PRIJE UPOTREBE".

Invalidska kolica Moretti ARDEA ONE zahtijevaju malo elementarnog i povremenog održavanja, u nastavku navodimo pregledne koje treba provoditi povremeno:
kvaliteta kočenja - mjesечно
čišćenje sjedala - po potrebi

ČIŠĆENJE

Navlaka i podstava

Navlaka i podstava su od najlona. Očistite topлом vodom i blagim sapunom.

Okvir i metalni dijelovi

Očistite topлом vodom i blagim sapunom. Osušite mekom krpom kako ne biste ogrebali boju.

Kočnice i kotači

Očistite kotače topлом vodom i blagim sapunom. Obratite pozornost na sušenje kotača, opasno je koristiti invalidska kolica s mokrim kotačima.

Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati uređaj koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju

