



NEUROLOŠKA INVALIDSKA KOLICA

MODEL: CP900-45



UPUTE ZA KORIŠTENJE


U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. OPĆI OPIS

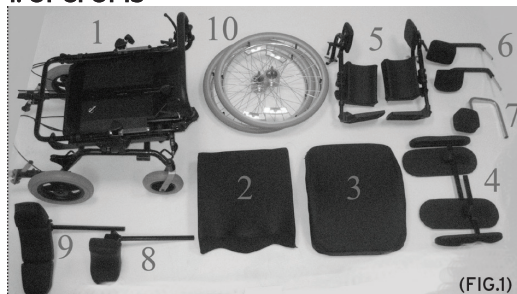


1. Okvir
2. Podstavljeno sjedalo
3. Podstavljeni naslon
4. Naslon za ruke i bočna strana naslona za ruke
5. Podižući naslon za noge
6. Rameni stoper
7. Stoper kuka
8. Naslon za glavu
9. Trodimenzionalni naslon za glavu (opcionalno)
10. Stražnji kotači od 60 cm

2. UVOD

Zahvaljujemo vam što ste kupili invalidska kolica ARDEA ONE RELIEF iz serije proizvoda tvrtke Moretti. Ova invalidska kolica namijenjena su osobama s poteškoćama u kretanju i mogu se koristiti samostalno ili uz pomoć rukovatelja. Međutim, u svim slučajevima potrebna je intervencija operatera za različite prilagodbe koje su vam potrebne.

3. SASTAVLJANJE

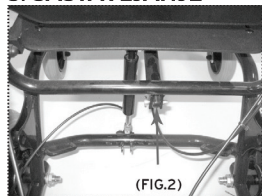


3.1 Otvorite invalidska kolica

Podignite naslon i povežite naslon sa klipom pomoću klina (SL.2).




3.2 Sklop naslona i sjedala

Naslonite podstavljeno sjedalo i naslon na okvir, u skladu s čičak trakama. Pričvrstite ih malim pritiskom (SL.3).

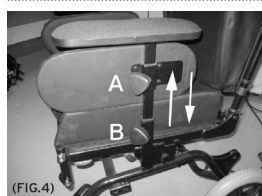

3.3 Montaža naslona za ruke

Umetnite naslon za ruke kao što je prikazano na SL.4, podesite visinu prema svojim potrebama i zaključajte gumbima "A" i "B".

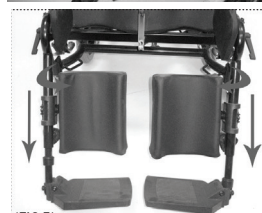

3.4 Sklop oslonca za noge

Umetnite oslonac za noge na šarku na okviru, zatim rotirajte prema unutra dok se ne zaključa (SL.5).



3.5 Sklop graničnika za kuk

Umetnite graničnik kuka u cijev ispod sjedala. Podesite položaj i zaključajte gumbima (SL.6).



3.6 Sklop graničnika za ramena

Umetnite graničnik za ramena u nosače iza naslona. Podesite položaj i zaključajte gumbima (SL.7).



3.7 Sklop naslona za glavu

Umetnite naslon za glavu u oslonac iza naslona. Podesite položaj i zaključajte gumbima (SL.8).

4. PRIJE UPOTREBE

- Provjerite korištenje dijelova, kako biste zajamčili sigurnu uporabu kolica za ljude i stvari
- Provjerite da li je sve pravilno sastavljeno. Pažljivo provjerite ispravnost montaže stražnjih kotača
- Provjerite rade li kočnice na stražnjem kotaču

5. UPOZORENJA KOD KORIŠTENJA

- Ne koristite invalidska kolica kao sjedalo za vozilo
- Provjerite jesu li ručke kočnice propisno podešene i da li ispravno rade
- Izbjegavajte uklještenje prsta u kotače ili kočnice tijekom korištenja invalidskih kolica
- Temperatura invalidskih kolica raste ako su dugo izložena suncu

6. KAKO KORISTITI

6.1 Koristite naslon za ruke

Naslon za ruke se može podesiti po visini i širini:

Visina - odvrnite gumb za zaključavanje naslona za ruke i podesite visinu

Širina - odvrnite gumb ispod sjedala i podesite širinu

6.2 Koristite naslon za noge

Naslone za noge mogu se podešavati po duljini, nagibu, širini i dubini:

Duljina - Odvrnite gumb na okviru naslona za noge. Podesite duljinu naslona za noge prema potrebama pacijenta. Ponovno zategnite gumb.

Nagib - Odvrnite bočni gumb u visini koljena i promijenite nagib. Ponovno zategnite gumb.

Širina - Imbus ključem (6 mm) odvijte vijak ispod sjedala i prilagodite širinu. Ponovno zategnite.

Dubina - Odvrnite oba bočna gumba ispod sjedala, podesite dubinu prema pacijentovim potrebama i ponovno zategnite gumb.

6.3 Koristite nagnuti naslon

Podesite nagib naslona pritiskom na lijevu polugu na upravljaču i pritisnite naslon prema dolje.

Otpustite naslon kako biste ga vratili u uobičajeni nagib.

6.4 Koristite sjedalo

Podesite nagib sjedala pritiskom na desnu polugu na upravljaču i pritisnite sjedalo prema dolje. Otpustite sjedalo kako biste ga vratili u uobičajeni nagib.

6.5 Koristite klizno sjedalo

Gornji dio sjedala može se podesiti po dubini kako bi se pacijentu pružila veća udobnost. Odvijte matice od 10 mm ispod sjedala i podesite položaj prema naprijed ili prema natrag.

6.6 Koristite stoper kuka

Upotrijebite graničnik kuka kako biste izbjegli stalni kontakt između donjih udova. Može se podesiti pomoću gumba ispod sjedala.

6.7 Koristite stražnje velike kotače

Rukohvati na stražnjim kotačima služe za samostalno kretanje.

6.8 Koristite kotačiće za brzo otpuštanje

Kolica su opremljena kotačima za brzo otpuštanje. Za uklanjanje kotača pritisnite gumb u sredini i izvucite kotač prema van. Slijedite obrnuti postupak za postavljanje kotača.

6.9 Koristite graničnik za rame

Rameni graničnik se može podesiti po visini, duljini i orijentaciji:

Visina/širina - otpustite gumb na naslonu za podešavanje visine i duljine

Orijentacija - na stražnjoj strani svakog čepa nalaze se kuglaste igle koje omogućuju podešavanje graničnika tako da otpustite gumb na stražnjoj strani.

6.10 Koristite naslon za glavu

Naslon za glavu se može podesiti po visini, dubini i orijentaciji:

Visina - otpustite gumb na stražnjoj strani naslona za glavu

Dubina - otpustite gumb na stražnjoj strani naslona za glavu. Oslonac omogućuje podešavanje dubine i nagiba naslona za glavu.

Orijentacija - stražnja strana naslona za glavu opremljena je sferičnim klinom koji omogućuje usmjeravanje naslona za glavu.

6.11 Koristite ručke

Ručka je namijenjena za upravljanje invalidskim kolicima ili za podešavanje naslona i nagiba

sjedala. Ručka se može podesiti po visini tako da otpustite gumbe na ručici, zatim je podignete ili spustite.

6.12 Koristite kotačiće protiv prevrtanja

Podesite visinu povlačenjem metalnog prstena, otpustite ga kada se pronađe ispravna visina.

6.13 Koristite kočnice

Stražnji kotači opremljeni su bubanj kočnicama. Pritisnite odgovarajuću polugu na upravljaču.

Otpustite za vožnju invalidskih kolica.

NAPOMENA: KOČNICE SE MOGU AUTOMATSKI ZAKLJUČATI. ZA ZAKLJUČAVANJE GURNITE ELEMENT ZA ZAKLJUČAVANJE ISPOD RUČICE KOČNICE. ZA OTKLJUČAVANJE PRITISNITE RUČICU SVE DOK ELEMENT ZA ZAKLJUČAVANJE POTPUNO NE IZAĐE IZ MJENJAČA.

7. ODRŽAVANJE

- Ova kolica pažljivo su provjerena i na tržište isporučena s oznakom EC. Preporuka za sigurnost:
- Prilikom prve uporabe i tijekom prvog mjeseca provjerite vijke okvira i po potrebi ih zategnite
- Svaka 3 mjeseca provjerite stanje svih komponenti i ispravno pričvršćivanje vijaka i matica svih mehaničkih dijelova, posebno onih koji se tiču kotača i kočionog sustava
- U slučaju popravka koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor. Slijedite prijedloge u poglavlju "PRIJE UPOTREBE".