

YUWELL ANYTIME ODAŠILJAČ ZA MJERENJE GLUKOZE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: CT-3

Anytime

Sustav za kontinuirano praćenje glukoze

Serijski CT3

VODIČ ZA POČETAK

Dijelovi



Aplikator
(sonda)



Odašiljač



Baza za
punjenje



Kabel za
punjenje


1 Priprema

Korak 1 Preuzmite softver

- Uključite mobilni Bluetooth
- Upotrijebite kameru svog pametnog telefona za skeniranje QR koda na paketu za preuzimanje ili ažuriranje aplikacije
- Slijedite upute za prijavu



1 Uključi Bluetooth

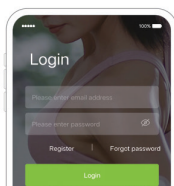

2 Prijava

Korak 2 Napunite odašiljač

- Stavite odašiljač u bazu za punjenje radi punjenja. Bijeli indikator će treptati (pokazuje punjenje).
- Bijelo svjetlo treperi na aplikatoru dok se puni i plavo svjetlo svjetli konstantno kada je pun.




Indikator

Bijeli indikator treperi: puni se
Plavi indikator: potpuno napunjen

2 Spojite uređaj

Korak 1 Spojite se na odašiljač

- Na stranici "Poveži odašiljač" u aplikaciji odaberite SN (serijski broj) koji odgovara odašiljaču da biste dovršili povezivanje.

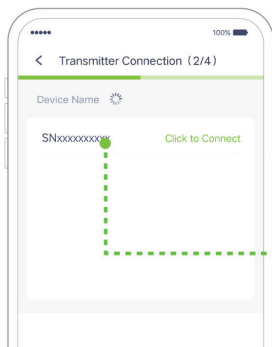

SNxxxxxxxx

Korak 2 Spojite se na senzor


- Na stranici aplikacije skenirajte QR kod na plastičnom kućištu senzora i uđite u način pokretanja odbrojavanja.



Korak 1

Prijedlog: nositi na trbuhu ili nadlaktici

- Dezinficirajte kožu na mjestu gdje ćete aplicirati senzor
- Nikada nemojte aplicirati senzor uzastopno na isto mjesto
- Za aplikaciju na trbuhu: aplikator se postavlja 5 cm dijagonalno iznad pupka, u iscrtkanom području prikazanom na slici, izbjegavajući kaluse, ožiljke i rebra.
- Za aplikaciju na nadlaktici: aplikator se postavlja na stražnjoj strani nadlaktice

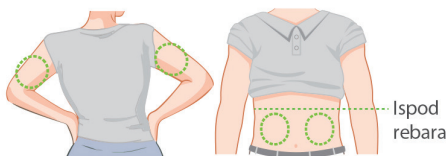

Korak 2

Nemojte otključavati prije nanošenja na kožu

- Skinite dva zaštitna filma s narančastog područja.



Korak 3


Nemojte otključavati prije nanošenja na kožu

- Pritisnite aplikator uz mjesto implantacije.




Korak 4

- Gurnite sigurnosnu bravu za otključavanje.

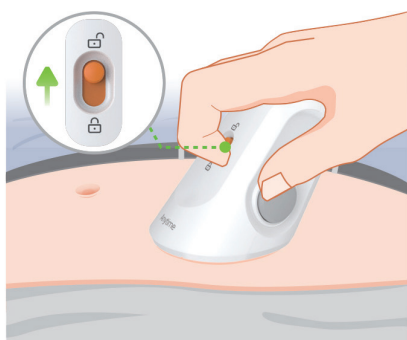

Korak 5


- Pritisnite tipke s dvije strane istovremeno dok se ne čuje "klik".

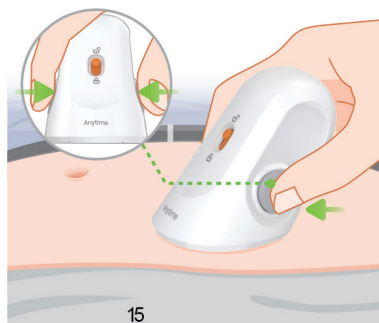

15

Korak 6

- Polako uklonite aplikator kako biste dovršili implantaciju senzora.

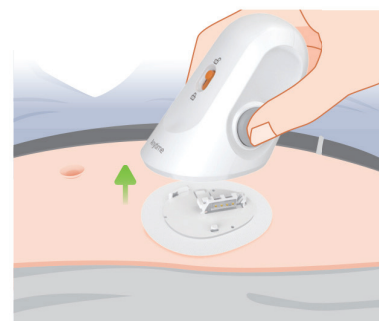

Korak 1

! Važni koraci

- Pričvrstite odašiljač na senzor prema kutu prikazanom na sljedećoj slici.



Korak 2


- Čvrsto stisnite odašiljač i senzor kao što je prikazano na sljedećoj slici dok se ne čuje "klik".

! Gurnite odašiljač unatrag kako biste provjerili je li zaključan.

1




2

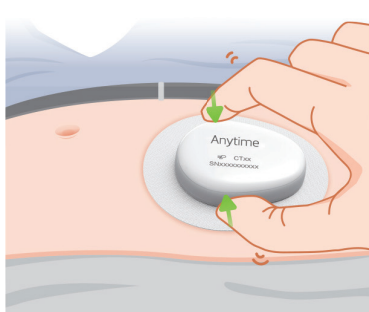




Softversko sučelje

- Aplikacija počinje prikazivati vrijednost glukoze u međustaničnom prostoru nakon inicijalizacije.

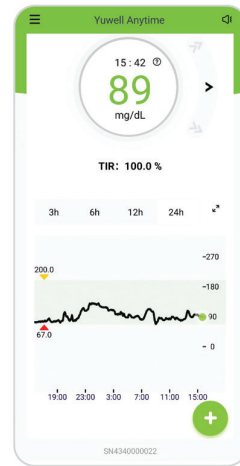

Prestanite nadzirati i uklonite uređaj

- Polako uklonite senzor i odašiljač zajedno s mjesta nošenja.
- Nakon uklanjanja, silom odvojite kopču prema dolje i otvorite odašiljač.
- Odložite senzor kao medicinski otpad.

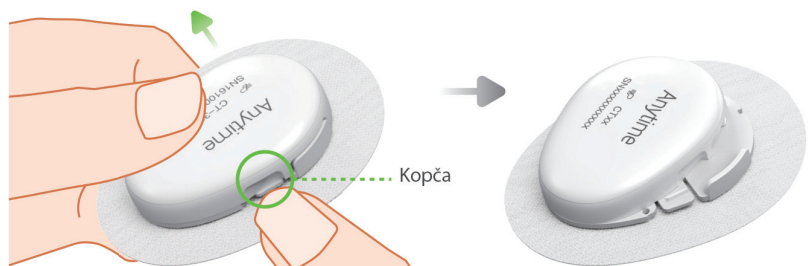

Nemojte greškom bacati odašiljač

Odašiljač odmah treba staviti na punjenje.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom DVIJE (2) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:
 Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
 TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr