



# ALARM ZA ODVIKAVANJE OD MOKRENJA DRI SLEEPER

MODEL: DRI



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## 1. OPĆI OPIS

DRI sleeper je pogodan za djecu stariju od 5 godina. Većina djece prestane mokriti u krevet do 5 godine života. Nakon te starosti, moguća je potreba za pomoći kako bi mokrenje u krevet prestalo. Ponekad se može raditi o medicinskom problemu, no najčešće se radi o nesvjesnom propustu pri učenju; dijete nije krivo zbog toga. Uspješan tretman DRI sleeperom traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Upornost je ključ uspjeha. Ukoliko ponovno dođe do mokrenja u krevet, drugi kratki tretman će obično uspjeti. Uvijek ohrabrujte dijete. DRI sleeper nije igračka i kada se ne koristi, treba ga spremati na sigurno kako bi se spriječile pogreške. Opis. DRI sleeper ima dva dijela, alarmnu jedinicu i detektor. Alarmna jedinica se stavlja na rame, a detektor ide u gaćice, kako bi reagirao s urinom i pokrenuo alarm.

## 2. TIJEK TRETMANA

1. DRI sleeper uči korisnika da se probudi kako počinje urinirati.
2. Korisnik postaje osjetljiviji na osjet punjenja mjehura i češće se budi tik pred ili nakon uriniranja.
3. Korisnik se budi s potrebom za uriniranjem, ali prije nego što je počeo urinirati.
4. Korisnik napreduje prema zrelijoj fazi kada može prospavati noć, i ne treba ustajati tijekom noći kako bi urinirao. Za detaljnije informacije i rezultate ispitivanja posjetite [www.dri-sleeper.com](http://www.dri-sleeper.com)

## 3. SAVJETI PRI KORIŠTENJU

Kad je uključen detektor u alarmnu kutiju, to uključuje uređaj i spreman je za detekciju vlage. Kada je isključen detektor, uređaj je ugašen. Tijekom dana držite isključen detektor, jer na taj način štedite bateriju.

## 4. NAČIN KORIŠTENJA DRI SLEEPER-A

1. Kako biste pričvrstili alarm na pidžamu: zašijte ili spojite sigurnosnom iglom «čičak» traku na pidžamu na mjesto ramena i pričvrstite DRI sleeper na «čičak». Najbolje je ukoliko utičnica gleda prema gore. Žica od alarmne kutijice do senzora ide ispod pidžame do gaćica.
2. Detektor se stavlja unutar uloška ili džepića koji se zatim umeće u gaćice.
3. Napravite mali rez na ulošku, uvucite škare i napravite tunelić u koji umetnete senzor. Kako biste osigurali da senzor ostane u ulošku, zalijepite izlaz ljepljivom trakom.
4. Vježbajte slijedeću rutinu prije spavanja: spojite DRI Sleeper alarmnu kutijicu na rame, uključite senzor i pokrenite alarm stavljanjem senzora u vodu, iskopčajte senzor, pravite se da idete na toalet, ponovite postupak 5 puta.
5. Kada se alarm uključi, dijete se budi, gasi alarm i odlazi na toalet.
6. Uvijek operite senzor (po mogućnosti u kupki od tekućeg sapuna) nakon svake noći i isperite u vodi temeljito i osušite na maramici. Ukoliko sapun nije pravilno ispran može prouzročiti uključivanje alarma. Kako biste sterilizirali, možete oprati senzor u alkoholu. Preporučamo da nabavite rezervni senzor i držite ga spremnim za slučaj potrebe.
7. Nastavite koristiti DRI Sleeper svaku noć tako dugo dok ne prođe 14 noći bez mokrenja u krevet.
8. Ispitivanje. Svaku noć prije korištenja isprobajte rad uređaja. U posudicu sa toplom vodom (najbolje imitira urin) lagano umočite senzor i gledajte koliko je pari crnih traka potrebno umočiti da se aktivira alarm. Ukoliko je potrebno više od 6 parova, vrijeme je da obnovite senzor.

## 5. PRONALAZENJE GREŠAKA

Nije uobičajeno da dođe do kvara uređaja. Izostajanje alarma je obično posljedica normalnog trošenja senzora. Poput baterija na uređaju za reprodukciju glazbe i senzor se mora mijenjati.

## JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja jamči ispravan rad uređaja tijekom 2 godine od dana kupnje. Servis i opskrba rezervnim dijelovima osigurani su 7 godina od dana kupnje uređaja. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Uro senzor ne podliježe jamstvu, on se normalno troši prilikom korištenja i mora se mijenjati. Jamstvo ne obuhvaća troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba, oštećenja nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem, troškove povremene kontrole i održavanja. Popravkom ili zamjenom uređaja jamstveni rok se ne produžava i ne obnavlja. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: .....

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA: .....

U slučaju reklamacija obratite se na:  
Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje HR-10437  
TEL: 01/2020-504, E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)