

PRIJENOSNA KADA ZA KUPANJE U KREKETU



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: EASY-BATH

KADA NA NAPUHAVANJE S ELEKTRIČNOM PUMPOM

Hvala što ste kupili Timago proizvod. Molimo Vas da pročitate upute za maksimalno zadovoljstvo korištenjem.

KARAKTERISTIKE

- 1 kada
- 2 ventil za odvod vode
- 3 ventil pumpe
- 4 odvod



Prijenosna kada na napuhavanje izrađena je od izdržljivog vinila. Dvostruke zračne komore pružaju zaštitu od prolijevanja vode i pjene. Odvod vode omogućuje brzo i sigurno pražnjenje kade nakon korištenja.

U setu: kada, električna pumpa, set za popravak

NAMJENA

Kada na napuhavanje omogućuje pranje tijela pacijenta u ležećem položaju. Osobito se preporuča za unutarnju upotrebu pri njezi ležećih i starijih osoba s poteškoćama u naginjanju glave i saginjanju.

NAČIN UPORABE

Korak 1. Stavite pacijenta u kadu. Napumpajte kadu pomoću pumpe i zatvorite ventil za odvod vode na dnu kade. Kada se može napuniti toplom vodom temperature ispod 50°C.

Korak 2. Nakon što se pacijenta okupate, otvorite ventil za odvod vode kako biste ispraznili kadu kroz odvod.

Korak 3. Ispustite zrak kroz ventil pumpe i prebacite pacijenta. Osušite kadu.

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije kade: 190 x 90 x 22 cm

Težina kade: 2,00 kg

Težina pumpe: 0,20 kg

Volumen kade: 35 litara

Potrošnja energije pumpe: 150 W

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Očistite sve dijelove seta nakon upotrebe i ostavite ih da se osuše.
- Kada kada nije u uporabi, zaštitite je od visoke temperature i vlage.
- Ne izlažite komplet izravnom kontaktu s oštrim predmetima.
- Podesite temperaturu vode kako biste pružili udobnost pacijentu.
- Nemojte koristiti deterdžente, otapala ili eterična ulja.
- Ne izlažite električnu pumpu izravnom kontaktu s vodom.
- Način rada crpke ne smije trajati duže od 20 minuta s 15 minuta pauze. Nemojte koristiti pumpu dok koristite kadu.

BILJEŠKE

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje kade, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.