

OMRON



Omron Body Monitor HBF-222T

UPUTE ZA KORIŠTENJE



Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Namjena

Medicinska svrha

Zahvaljujemo na kupnji ove visokokvalitetne dijagnostičke vage OMRON. Ovim medicinskim uređajem moći ćete precizno izmjeriti sljedeće parametre tjelesne građe te odmah protumačiti rezultate:

- Masno tkivo (u %)
- Mišićno tkivo (u %)
- Visceralna masnoća (do 30 razina)
- Indeks tjelesne mase (BMI)
- tjelesna težina
- metabolizam u mirovanju

Upozorenja

Opasnost:

• Nikada nemojte koristiti ovu jedinicu u kombinaciji s medicinskim elektroničkim uređajima kao što su:

- (1) Medicinski elektronički implantati kao što su srčani stimulatori.
 - (2) Elektronički sustavi za održavanje života poput umjetnog srca/pluća.
 - (3) Prijenosni elektronički medicinski uređaji kao što je elektrokardiograf.
- Ova jedinica može uzrokovati kvar ovih uređaja, što predstavlja značajan zdravstveni rizik za korisnike ovih uređaja.

Upozorenje:

- Nikada ne započinite terapiju smanjenja tjelesne težine ili vježbanja bez uputa liječnika ili specijalista.
 - Nemojte koristiti jedinicu na skliskim površinama, poput mokrog poda.
 - Držite uređaj izvan dohvata male djece. Sadrži male dijelove koji mogu uzrokovati opasnost od gušenja ako ih progutaju dojenčadi.
 - Kabel zaslona može izazvati slučajno davljenje kod male djece.
 - Ne skačite na uređaj i ne poskakujte gore-dolje po njemu.
 - Nemojte koristiti ovu jedinicu kada su vam tijelo i/ili stopala mokri, npr. poslije kupanja.
 - Na glavnu jedinicu uređaja stanite bosih nogu. Ako pokušate stati na nju dok nosite čarape, možete se poskliznuti i ozlijediti.
 - Nemojte stati na rub ili na prostor zaslona uređaja.
 - Osobama s invaliditetom ili fizički slabijim osobama pri korištenju ove jedinice uvijek treba pomagati druga osoba. Koristite rukohvat ili slično kada želite stati na uređaj.
 - Ako vam tekućina iz baterije dospije u oči, odmah ih isperite s puno čiste vode. Odmah se obratite liječniku.
 - Ako uređaj ne radi ispravno, može se jako zagrijati.
- Područja s mogućim porastom temperature:
- (1) Oko područja odjeljka za baterije: 105 °C (maks.)
 - (2) Elektrode i tipke za rad: 48 °C (maks.)
- Ako je uređaj u kvaru i ne radi, odmah se prestanite njime koristiti. Nemojte primjenjivati elektrode niti dodirivati tipke za upravljanje 10 minuta ili duže.

Oprez


- Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Nije namijenjen za profesionalnu upotrebu u bolnicama ili drugim medicinskim ustanovama.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili prepravljati zaslon ili uređaj.
- Tijekom mjerenja pazite da nijedan mobilni telefon ili bilo koji drugi električni uređaj koji emitira elektromagnetska polja nije unutar 30 cm od ovog uređaja. To može dovesti do neispravnog rada uređaja i/ili uzrokovati netočno očitavanje.
- Budite oprezni pri spremanju jedinice zaslon. Vaši prsti mogu ostati zarobljeni između drške i glavne jedinice ako je pritisnete prejako.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu navedene za ovaj uređaj. Ne umećite baterije s pogrešnim polaritetom.
- Istrošene baterije odmah zamijenite novima.
- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ako tekućina iz baterije dospije na vašu kožu ili odjeću, odmah je isperite s puno čiste vode.
- Izvadite baterije iz ovog uređaja ako ga nećete koristiti dulje vrijeme (otprilike tri mjeseca ili više).
- Nemojte zajedno koristiti različite vrste baterija.
- Nemojte koristiti nove i istrošene baterije zajedno.
- Uklonite zaslon s vage prije nego što stanete na vagu. Ako pokušate ukloniti zaslon dok stanete na vagu, možete izgubiti ravnotežu i pasti.

Opći savjeti:

- Nemojte postavljati ovu jedinicu na mekanu podnu površinu kao što je tepih ili prostirka. Točna mjerenja možda neće biti moguća.
- Ne postavljajte ovaj uređaj u vrlo vlažna okruženja i zaštitite ga od prskanja vodom.
- Ne postavljajte ovaj uređaj blizu izvora topline ili ispod klima uređaja i izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Nemojte na silu povlačiti kabel zaslona spojen na glavnu jedinicu.
- Budući da je ovaj uređaj precizan instrument, nemojte ga ispuštati, tresti ili snažno udarati.
- Odlaganje istrošenih baterija treba se provesti u skladu s nacionalnim propisima za odlaganje baterija.
- Ne perite zaslon ili uređaj vodom.
- Nemojte brisati uređaj benzolom, benzinom, razrjeđivačem, alkoholom ili drugim hlapljivim otapalima.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesto gdje će biti izložena kemikalijama ili korozivnim parama.
- Bateriju koristite u preporučenom roku koji je u njoj naveden.


Upoznajte svoj uređaj

Glavna jedinica (mjerna platforma)

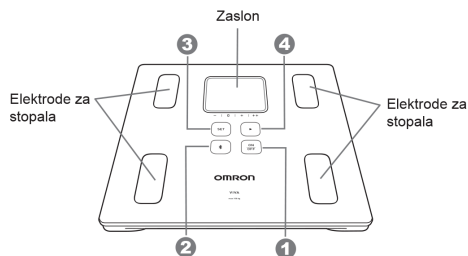

1		Gumb za uključivanje/isključivanje • Pritisnite ovaj gumb ako želite uključiti uređaj. • Pritisnite ovaj gumb (i zadržite ga 2 sekunde ili duže) ako želite isključiti uređaj.
2		Gumb za Bluetooth • Pritisnite ovaj gumb ako želite ručni prijenos podataka. • Pritisnite ovaj gumb (i zadržite ga 2 sekunde ili duže) ako želite upariti vagu s pametnim uređajem. • Ovaj gumb možete koristiti i kada je uređaj isključen.
3		Gumb SET • Pritisnite ovaj gumb za postavljanje i potvrdu podataka.
4		Gumb Advance (Naprijed) • Pritisnite ovaj gumb za ponicanje naprijed. • Pritisnite i zadržite ovaj gumb ako se želite brzo pomakati naprijed tijekom postavljanja datuma, vremena i visine.

Zaslon

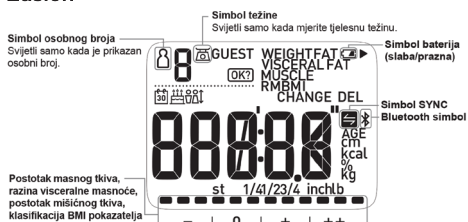

Umetanje i zamjena baterija


1. Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani glavne jedinice.

1) Pritisnite jezičak na poklopcu baterije kako biste ga oslobodili.

2) Povucite ga prema gore kao što je prikazano

2. Umetnite baterije u ispravan polaritet kako je označeno unutar odjeljka za baterije.

3. Zatvorite poklopac baterije

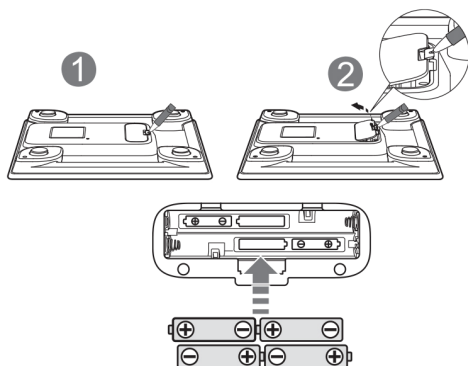

Trajanje baterije i zamjena

- Otrprike 6 mjeseci (kada se AAA alkalne baterije koriste u četiri mjerenja, četiri prijenos podataka i četiri osobe dnevno na sobnoj temperaturi od 23°C)
- Isporučene baterije su samo za probnu upotrebu, mogu imati kraći životni vijek.
- Kada se na zaslonu pojavi simbol prazne baterije zamijenite sve četiri baterije s novima.
- Zamijenite sve četiri baterije novima (istog tipa) u isto vrijeme.
- Kada simbol niske baterije treperi, preporučite zamjenu baterija s novima prije vremena.
- Zamijenite baterije nakon što isključite napajanje.
- Osobni podaci pohranjeni u uređaju ostaju čak i ako se baterije uklone.
- Zbrinjavanje istrošenih baterija treba se provesti u skladu s nacionalnim propisima za odlaganje baterija.
- Kada se baterije zamijene, potrebno je resetirati mjernu jedinicu, datum i vrijeme. (Pogledajte odjeljak 4.)
- Ako ste se već uparili s aplikacijom "OMRON connect", pritisnite gumb za komunikaciju s ovom aplikacijom, tada će se datum i vrijeme postaviti automatski.

O funkciji isključivanja napajanja

- Pritisnite tipku (2 sekunde ili duže) da biste isključili napajanje.
- Napajanje se automatski isključuje u sljedećim uvjetima.
 - 10 sekundi nakon što se prikaže "Err".
 - Jedinica se ne koristi 1 minutu kada se prikaže "0,0 kg".
 - Uređaj se ne koristi 3 minute.



Uparivanje uređaja s vašim pametnim uređajem

1. Uključite funkciju Bluetooth na pametnom uređaju.

2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju „OMRON connect” na svoj pametni uređaj.

Možete odabrati jedan od sljedeća 2 načina:

- Skenirajte QR kod kako biste dobili pristup sljedećoj adresi.



omronconnect.com/setup

QR kod

- Potražite aplikaciju „OMRON connect” u trgovini „App Store” ili „Google Play”.




3. Otvorite aplikaciju na pametnom uređaju i pratite upute za postavljanje i uparivanje. Ako već imate aplikaciju OMRON connect, idite u:

Menu > Device > Add Device (Izbornik > Uređaj > Dodaj uređaj)



NAPOMENE

- Jedan pametni uređaj upravlja podacima jednog korisnika.
- Ako upotrebljavate drugu aplikaciju, a ne „OMRON connect“, podatci se možda neće pravilno prenijeti.
- Za dodatne informacije, pročitajte upute za način korištenja unutar aplikacije.

Postavljanje mjerne jedinice, datuma i vremena



1. Pritisnite gumb  ako želite uključiti uređaj. Na zaslonu trepće oznaka "kg & cm".




2. Postavite mjernu jedinicu. Prilagodite koristeći gumb  pa potvrdite gumbom .

- Zadana je mjerna jedinica "kg & cm".
- Kao mjernu jedinicu možete postaviti „lb & inch“ (funte i inči) ili „st-lb & inch“ (stone-funta i inči).




3. Postavite točan datum i vrijeme na uređaju. Prilagodite koristeći gumb  pa potvrdite gumbom .

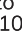- Postavljanje raspona godina: 2017. do 2045.
- Vrijeme se prikazuje u 24-satnom obliku.
- Tijekom postavljanja godine, datuma, sata i minute, držite pritisnutim gumb  za brzo pomicanje u koracima od 10.



Kada ste namjestili postavke za mjernu jedinicu, godinu, mjesec, dan, sate i minute, koje će se prikazati točno tim redoslijedom, uređaj će se automatski isključiti.

NAPOMENE


- Ako napravite bilo kakvu pogrešku tijekom postavljanja, pritisnite gumb  kako biste isključili napajanje i ponovno započeli od "1. koraka".
- Uređaj će se isključiti ako se ne koristi 3 minute. Iznova postavite mjernu jedinicu, datum i vrijeme.
- Ako želite izmijeniti mjernu jedinicu, datum i vrijeme, izvadite baterije i pričekajte barem 20 sekundi. Zatim vratite baterije i ponovno namjestite postavke.


Registriranje osobnih podataka



Prije mjerenja tjelesne građe potrebno je registrirati vaše osobne podatke (datum rođenja,

spol, visinu). Moguće je pohraniti registrirane podatke za do 4 osobe.

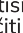

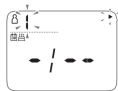- Osobne podatke možete registrirati također i u aplikaciji "OMRON connect".


1. Pritisnite gumb  ako želite uključiti uređaj. Uključit će se uređaj. Osobni broj "1" treperi. Prikazat će se datum rođenja (-1-).




2. Odaberite i potvrdite vaš osobni broj. Pritisnite gumb  i odaberite vaš osobni broj, zatim potvrdite gumbom .



3. Postavite datum rođenja. Pritisnite gumb  i postavite datum rođenja, zatim potvrdite gumbom .

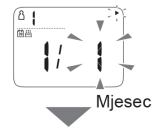




- Postavljanje raspona godina: 1900. do 2045.

- Tijekom postavljanja godine i datuma, držite pritisnutim gumb  kako biste se brzo pomicali u koracima od 10.





4. Postavite spol

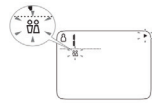Pritisnite gumb  kako biste postavili spol (MUŠKO) ili (ŽENSKO) te pritisnite gumb  kako biste potvrdili.



5. Postavite visinu.

Pritisnite gumb  za podešavanje visine pa potvrdite gumbom .

- Držite pritisnutim za brzo pomicanje u koracima od 10 cm (ili 1 inča).
- Kada se sve postavke prikažu da bi se potvrdile, na zaslonu se prikazuje oznaka "0,0 kg".


6. Kada se prikazuje oznaka „0,0 kg“, stanite na uređaj i obavite mjerenje. Podaci o tjelesnoj težini i tjelesnoj građi spremiće se u vagu za potrebe automatskog prepoznavanja.

Nakon nekog vremena, rezultati mjerenja će se prikazati kako slijedi.




7. Siđite s vage nakon prikaza rezultata mjerenja.

Završna je registracija osobnih podataka.

8. Pritisnite i zadržite gumb  (2 sekunde ili dulje) ako želite isključiti uređaj. Kako biste dodali nove osobne podatke, počnite od "1. koraka".

Kako napraviti točno mjerenje Ispravni položaji tijela tijekom mjerenja

Golim stopalima stanite na vagu. Svodove stopala stavite u sredinu vage.



Ne savijajte se u koljenima za vrijeme mjerenja.

Mjerenje napravite na tvrdom i ravnom podu.

Napomena

- Ako na vagu stanete u čarapama ili obući, mjerenje će biti netočno.

Napomena

- Mekana podna površina, kao što je otaš ili tepih, može dovesti do netočno mjerenja.

Više o „korekciji na 0 kg“ (upozorenje kod spremanja)

Vaga redovito automatski korigira točnost kada nije u upotrebi.

- Ako vagu postavite kako je prikazano u nastavku, funkcija korekcije točnosti neće raditi pa je potrebno obaviti „korekciju na 0 kg“ prije početka mjerenja.



Kako obaviti „korekciju na 0 kg“

1. Vagu postavite na tvrdi i ravni pod.

2. Pritisnite gumb **ON/OFF** ako želite uključiti uređaj.

3. Odaberite svoj osobni broj ili „ΔΔ“.

Odaberite svoj osobni broj ili „ΔΔ“ uporabom gumba **▶**, a zatim potvrdite gumbom **SET**.

4. Kada se prikazuje oznaka „0,0 kg“, pritisnite gumb **ON/OFF** (zadržite ga 2 sekunde ili dulje) kako biste isključili vagu.

Ovom se radnjom obavlja „korekcija na 0 kg“. Pričekajte 5 sekundi, zatim provedite mjerenje.

Mjerenje

Kada stanete na vagu, uključit će se i automatski prepoznati vaš osobni broj te započeti s mjerenjem.

U sjedećim slučajevima može se prikazati pogrešan osobni broj.

- Mjereni su korisnici slične vrste tijela i tjelesne težine.
- Vaša tjelesna težina promijenila se od posljednjeg mjerenja.

Ako se nastavi netočno prepoznavanje, odaberite vaš osobni broj i napravite mjerenje. (Pogledajte odjeljak 9.)

1. Napravite mjerenje kada je vaga isključena. Kada stanete na vagu, ista će se automatski

uključiti.



2. Mjerenje je završeno kada se prikažu osobni broj i rezultati mjerenja. Sijedite s vage.

3. Potvrdite vaš osobni broj.

- Ako je vaš osobni broj točan...

Pritisnite gumb **ON/OFF** za potvrdu osobnog broja. **OK?**

Čak i ako isključite vagu kada **OK?** trepće, rezultati će se spremati na uređaj kao mjerne vrijednosti povezane s prikazanim osobnim brojem.

- Ako je vaš osobni broj netočan...

Prije nego se vaga isključit, odaberite vaš osobni broj koristeći gumb **▶**, zatim potvrdite gumbom **SET**.

- Ako ste osobni broj potvrdili na neispravan način...

Prije isključivanja vage, pritisnite gumb **SET** i ponovno odaberite vaš osobni broj.

Ako na zaslonu trepće „no 1“ (br. 1) do „no 4“ (br. 4) ili je prikazana oznaka **GUEST** (Goat), vaga nije registrirala vaše osobne podatke.

Registrirajte osobne podatke.

Možete koristiti i način rada vage za gosta.


4. Provjerite rezultate mjerenja.

Prikaz rezultata automatski se mijenja kako je prikazano u nastavku.

Kada potvrdite vaš osobni broj, gumbom **▶** ćete se moći prebaciti na rezultat mjerenja koji želite vidjeti.

NAPOMENA

- Kao vodič za mjerenje koristite postotak masnog tkiva, stopu visceralnih masnoća, postotak mišićnog tkiva i pokazatelj klasifikacije BMI (Indeks tjelesne mase).
- Za bolje razumijevanje rezultata mjerenja pogledajte informacije i dijagrame u odjeljcima 17 i 18.

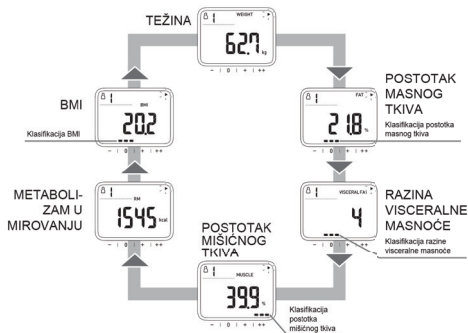

5. Pritisnite i zadržite gumb **ON/OFF** (2 sekunde ili dulje) ako želite isključiti uređaj. Uređaj će se isključiti ako se ne koristi 3 minute.

Pregled rezultata mjerenja na pametnom uređaju

Slijedite upute u aplikaciji „OMRON connect“ kako biste pregledali rezultate mjerenja. Nakon toga na pametnom uređaju možete potvrditi razliku između parametara težine i tjelesne građe.

NAPOMENA

- Aplikaciju „OMRON connect“ morate instalirati na svoj pametni uređaj. (Pogledajte odjeljak 3.)

Odabir osobnog broja i mjerenje

Ako vaš osobni broj često nije prepoznat, odaberite ga i napravite mjerenje prema sljedećim uputama.

1. Pritisnite gumb **ON/OFF** ako želite uključiti uređaj. Uključit će se uređaj. Osobni broj „1“ treperi.

2. Odaberite vaš osobni broj. Odaberite vaš osobni broj gumbom **▶**.

Kada je prikazan datum rođenja (-1 - -),

Vaši osobni podaci nisu registrirani u osobnom broju. Registrirajte osobne podatke. (Pogledajte odjeljak 5.)

3. Pritisnite gumb **SET** za potvrdu osobnog broja. Prikazuje se oznaka „0,0 kg“.

4. Kada se prikazuje oznaka „0,0 kg“, obavite mjerenje. Stanite na vagu.



5. Provjerite rezultate mjerenja. Prikaz rezultata automatski se mijenja.

6. Pritisnite i zadržite gumb **ON/OFF** (2 sekunde ili dulje) ako želite isključiti uređaj. Uređaj će se isključiti ako se ne koristi 3 minute.

Način rada vage za gosta (način rada bez spremanja)

Kada koristite ovaj način rada, rezultati mjerenja neće se spremati.

1. Pritisnite gumb **ON/OFF** ako želite uključiti uređaj. Uključit će se uređaj. Osobni broj „1“ treperi.

2. Odaberite i potvrdite „GUEST“. Odaberite mogućnost „GUEST (Gost)“ uporabom gumba **▶**, a zatim potvrdite gumbom **SET**.

3. Unos osobnih podataka.

3.1 Postavite datum rođenja Pritisnite gumb **▶** i postavite datum rođenja, zatim potvrdite gumbom **SET**.

- Postavljanje raspona godina: 1900. do 2045.

- Tijekom postavljanja godine i datuma, držite pritisnutim gumb **▶** kako biste se brzo pomicali u koracima od 10.

3.2 Postavite spol

Pritisnite gumb **▶** kako biste postavili spol **♂** (MUŠKO) ili **♀** (ŽENSKO) te pritisnite gumb **SET** kako biste potvrdili.

3.3 Postavite visinu Pritisnite gumb **▶** kako biste postavili visinu te pritisnite gumb **SET** kako biste potvrdili.

- Držite pritisnutim za brzo pomicanje u koracima od 10 cm.

Kada se sve postavke prikažu da bi se potvrdile, na zaslonu se prikazuje oznaka „0,0 kg“. Uređaj se isključuje ako ga ne upotrijebite 1 minutu nakon što se prikaže oznaka „0,0 kg“.

4. Započnite mjerenje nakon što se prikaže oznaka „0,0 kg“. Stanite na vagu.




5. Provjerita rezultate mjerenja.

Prikaz rezultata automatski se mijenja.


6. Pritisnite i zadržite gumb **ON/OFF** (2 sekunde ili dulje) ako želite isključiti uređaj. Uređaj će se isključiti ako se ne koristi 3 minute.

Mjerenje samo težine

Kada koristite ovaj način rada, vaš rezultat

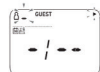

mjerjenja neće se spremati.

1. Pritisnite gumb  ako želite uključiti uređaj. Uključit će se uređaj. Osobni broj "1" treperi.


2. Odaberite i potvrdite "00". Odaberite "00" uporabom gumba , a zatim potvrdite gumbom .




3. Kada se prikazuje oznaka „0,0 kg”, stanite na vagu.




4. Provjerite rezultat mjerjenja. Prikazat će se vaša težina i treptanjem vas obavijestiti da je mjerjenje završeno.

5. Pritisnite i zadržite gumb  (2 sekunde ili dulje) ako želite isključiti uređaj. Uređaj će se isključiti ako se ne koristi 3 minute.

Mijenanje i brisanje osobnih podataka


1. Pritisnite gumb  ako želite uključiti uređaj. Uključit će se uređaj. Osobni broj "1" treperi.

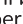


2. Odaberite vaš osobni broj koristeći gumb  odaberite vaš osobni broj.




Kada je prikazan datum rođenja (-/-). Vaši osobni podaci ne registriraju se u osobnom broju. Registrirajte osobne podatke. (Pogledajte odjeljak 5.)

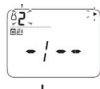

3. Gumbom  potvrdite vaš osobni broj. Prikazuje se oznaka „0,0 kg”.




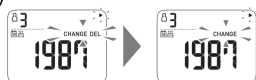
4. Pritisnite gumb . Oznake "CHANGE" (Promjena) i "DEL" (Brisanje) trepere.


5. Odaberite „CHANGE" (Promjena) ili „DELETE" (Brisanje) za osobne podatke

- Čak i ako izmijenite osobne podatke, rezultati mjerjenja neće biti promijenjeni i izbrisani. Kada koristite osobni broj koji već koristi neka druga osoba, izbrisajte ga pa ponovno registrirajte osobne podatke.

Promjena osobnih podataka (Rezultati mjerjenja neće biti izbrisani)


1. Gumbom  odaberite mogućnost „CHANGE" (Promjena)



2. Pritisnite gumb . Treptat će godina.





3. Promijenite datum rođenja, spol i visinu prema uputama u koracima 3 do 5 u 5. odjeljku.

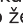- Ako želite odustati usred mijenjanja, pritisnite gumb  (i zadržite 2 ili više sekundi) kako bi se isključila vaga.
- Nepravilni rezultati mjerjenja neće se promijeniti.

Brisanje osobnih podataka (Rezultati mjerjenja također će biti izbrisani)


1. Pritisnite gumb  kako biste odabrali „DEL”

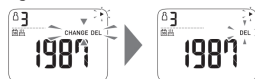

2. Pritisnite gumb  (OK?) trepće.




3. Ponovno pritisnite gumb .

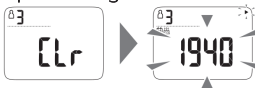


Brisanje postavke komunikacije

Ako želite prestati upotrebljavati aplikaciju "OMRON connect" ili izbrisati postavke komunikacije za pametni uređaj, postupite na sljedeći način. Izbrisat će se sve postavke komunikacije spremljene na uređaj.

1. Pritisnite i dulje od 2 sekunde zadržite gumb . "P" i simbol za Bluetooth trepere.



2. Ponovno pritisnite i dulje od 2 sekunde zadržite gumb . "OK?" i "Clr" trepere.

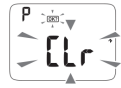

3. Pritisnite gumb  za potvrdu. Uređaj se isključuje ako ga ne upotrijebite 10 minuta nakon prikaza "Clr".

Održavanje i čuvanje

Postupak čišćenja vage

- Uređaj uvijek očistite prije uporabe.
- Uređaj obrišite mekanom suhom krpom. Ako je potrebno, koristite krpu navlaženu vodom ili deterdžent i dobro iscijedite prije početka brisanja, kojeg izvedite suhom krpom.
- Pri čišćenju vage nemojte koristiti benzen ili razređivač i druge nestabilne otopine.
- Uređaj nemojte prati vodom.

Briga i skladištenje

- Uređaj nemojte pohranjivati u sljedećim uvjetima:
 - vlažni uvjeti u kojima vlaga i voda mogu prodrijeti u vagu
 - visoke temperature, izravni utjecaj sunčeva











svjetla i prašnja mjesto
 - mjesto izloženo mogućim iznenadnim udarima i vibracijama
 - mjesto za pohranu kemikalija ili mjesto gdje se nalaze korozivni plinovi.










- Popravke nikog vrste nemojte vršiti sami. Ovaj proizvod kalibriran je za vrijeme proizvodnje. Ako u bilo kojem trenutku posumnjate u točnost mjerenja, obratite se ovlaštenom distributeru za tvrtku OMRON.

U pravilu se preporučuje da uređaj pregledate svake dvije godine kako biste osigurali njegov ispravan i točan rad.

Mogući problemi i rješenja

Ako se bilo koji od problema iz nastavka pojave za vrijeme mjerenja, najprije provjerite nalazi li se drugi električni uređaj unutar 30 cm. Ako problem ne nestane, pogledajte donju tablicu.

Prikaz pogreške	Uzrok	Rješenje
	Sišli ste s vage tijekom mjerenja tjelesne građe.	Nemojte silaziti s uređaja dok dijagnostičko mjerenje ne bude završeno. (Pogledajte odjeljak 6.)
	Vaša stopala nisu u čvrstom kontaktu s elektrodama.	Provjerite stojite li na vazi na pravilan način - stopala moraju biti čvrsto postavljena na elektrode prilikom mjerenja. (Pogledajte odjeljak 6.)
	Držanje tijela tijekom mjerenja nije pravilno, vaša stopala nisu u čvrstom kontaktu s elektrodama ili su suha.	Stojte s izravnatim koljenima i leđima. Držite stopala čvrsto postavljena na elektrode i ne pomičite ih prilikom mjerenja. (Pogledajte odjeljak 6.) Blago navlažite stopala natopljenim ručnikom i pokušajte ponovno.
	Nakon što se postave datum i vrijeme, uređaj je dotaknut ili se upotrebljavao prije automatskog ISKLJUČIVANJA zaslona.	Uklonite i ponovno umetnite bateriju. Ponovno pokrenite uređaj počevši od "Uparivanje uređaja s vašim pametnim uređajem". (Pogledajte odjeljak 3.) <ul style="list-style-type: none"> • Kada se datum i vrijeme prikazuju, ostavite uređaj bez nadzora dok se ne isključí.
	Greška uređaja.	Uklonite i ponovno umetnite bateriju. Nakon što se ova radnja završi, ponovno pokrenite uređaj. Ako se greška nastavi prikazivati, potražite pomoć servisnog zastupnika tvrtke OMRON.
	Greška u komunikaciji.	Isključite vagu i pokušajte ponovno uspostaviti komunikaciju. Ako se greška nastavi prikazivati, potražite pomoć servisnog zastupnika tvrtke OMRON.
	Pomakli ste se tijekom mjerenja.	Budite mimi tijekom mjerenja.
	Vala tjelesna težina je izvan mjerljivog raspona.	
	Greška u komunikaciji.	Potvrdite prikazanu obavijest na svojem pametnom uređaju i pridržavajte se uputa u aplikaciji "OMRON connect". Pogledajte "Help" (Pomoć) u aplikaciji "OMRON connect".
	Baterije su slabe.	Preporučujemo da baterije zamijenite i prije nego li se istroše do kraja. (Pogledajte odjeljak 2.)
	Baterije su prazne.	Zamijenite baterije. (Pogledajte odjeljak 2.)
 trepće	Spremljeno je 24 - 29 skupova rezultata mjerenja.	Prebacite rezultate mjerenja u aplikaciju "OMRON connect", a zatim simbol nestaje.
	Spremljeno je 30 skupova rezultata mjerenja.	Ako ih ima više od 30, najstariji se rezultati brišu. Prebacite rezultate mjerenja u aplikaciju "OMRON connect", a zatim simbol nestaje.

	Pritisnuli ste i dulje od 2 sekunde zadržali gumb  .	To će se prikazati kada uparite vagu s pametnim uređajem. Pridržavajte se uputa u aplikaciji "OMRON connect". Pritisnite gumb  (i zadržite ga 2 sekunde ili dulje) za prekid uparivanja.
	Pritisnuli ste gumb  .	Prikazuje se kada podatke prebacite na vaš pametni uređaj. Pridržavajte se uputa u aplikaciji „OMRON connect“. Pritisnite gumb  (i zadržite ga 2 sekunde ili dulje) za prekid prebacivanja.
	Pritisnuli ste i držali gumb  dulje od dvije sekunde kada su treptali "P" i simbol za Bluetooth.	Prikazuje se kada izbrisete postavku komunikacije. (Pogledajte odjeljak 13.) Pritisnite gumb  (i zadržite ga 2 sekunde ili dulje) za prekid rada.
Čak i kada uključite ili stanete na vagu, ništa se ne prikazuje.	Nisu umetnute baterije.	Umetnite baterije.
	Baterije su umetnute u pogrešnom smjeru.	Stavite baterije u propisanom smjeru.
	Baterije su istrošene.	Zamijenite sve četiri baterije novima.
Nakon zamjene baterija, ništa se ne prikazuje kada stanete na vagu.	Nakon zamjene baterija niste postavili mjernu jedinicu, datum i vrijeme.	Postavite mjernu jedinicu, datum i vrijeme. (Pogledajte odjeljak 4.)
	Vaša tjelesna težina je preniska (ispod 12 kg).	Odaberite osobni broj prije početka mjerenja.
Za neke rezultate prikazuje se "-----".	Registrirani podaci ili vrijednosti tjelesne građe izvan su mjerljivog raspona.	Provjerite ispravnost postavki za datum rođenja, spol i visinu. Čak i ako su te postavke ispravne, oznaka " - - - " se prikazuje ako su postavke izvan raspona godina koji se može prikazati ili koji je podržan.
Rezultat mjerenja je veći ili manji od stvarnog rezultata. Rezultati svakog mjerenja jako se razlikuju.	Za vrijeme mjerenja nema pravilan položaj tijela.	Napravite mjerenje uz pravilan položaj tijela.
	Mjerenje ste napravili na tepihu, obloženoj podnoj površini ili na neravnom podu.	Mjerenje napravite na tvrdom i ravnom podu.
	Vaša stopala i tijelo su hladni pa je narušena cirkulacija.	Prije mjerenja zagrijte tijelo kako biste vratili cirkulaciju na normalnu razinu.
	Elektrode za stopala vrlo su hladne.	Neko vrijeme ostavite vagu u toploj prostoriji prije početka mjerenja.
	Vaša stopala su suha.	Lagano navlažite stopala mokrim ručnikom prije početka mjerenja.
Nlatae Ispravno prepoznati.	"Korekcija na 0 kg" nije pravilno obavljena.	Obavite "korekciju na 0 kg" (Pogledajte odjeljak 6.3.).
	Vasa tjelesna težina prilično se promijenila od posljednjeg mjerenja.	Odaberite osobni broj prije početka mjerenja. (Pogledajte odjeljak 9.)
	Vrsta vašeg tijela slična je drugoj registriranoj osobi.	
Registrirani su rezultati mjerenja drugog korisnika.		
Želite izmjeriti tjelesnu građu, ali prikazana je samo tjelesna težina.	Niste odabrali osobni broj ili način rada GUEST. (Nije prikazan osobni broj ili oznaka GUEST.)	Odaberite osobni broj ili način rada GUEST prije početka mjerenja.
Gumb ne reagira.	Pritisnuli ste gumb dok ste stajali na vagi.	Sidite s vage pa pritisnite gumb.
	Gumb je mokar ili onečišćen.	Obrišite vodu ili mrlje prije početka mjerenja.
	Istovremeno ste pritisnuli dva ili više gumba.	Istodobno pritisnite samo jedan gumb.

Čak i kada ništa ne napravite, vaga se isključuje.	Pogledajte odjeljak "Više o funkciji isključivanja". (Pogledajte odjeljak 2.)
Nije uspjelo slanje podataka	Pogledajte „Help” (Pomoć) u aplikaciji "OMRON connect".

Tehnički podaci

Tjelesna težina: 2,0 do 150,0 kg u mjernim koracima od 0, 1 kg

Postotak masnog tkiva: 5,0 do 60,0% uz pomak od 0,1%

Postotak mišićnog tkiva: 5,0 do 50,0% uz pomak od 0,1%

BMI: 7,0 do 90,0 u mjernim koracima od 0,1

Matabolizam pri odmaranju: 385 do 3999 kcal uz pomak od 1 kcal

Razina visceralne masnoće: 30 razina uz pomak od 1 razine

Postotak masnog tkiva, postotak mišićnog tkiva i klasifikacija BMI: - (nizak)/O (normalan)/+ (visok)/++ (vrlo visok) 4 razine

Klasifikacija razina visceralne masnoće: 0 (normalna)/+ (visoka)/++ (vrlo visoka) 3 razine

- Dobni raspon za postotak masnog tkiva i klasifikacija postotka masnog tkiva je 10 do 80 godina.

- Dobni raspon za postotak mišićnog tkiva, klasifikaciju postotka mišićnog tkiva, razinu visceralne masnoće, klasifikaciju razine visceralne masnoće i metabolizam u mirovanju je od 18 do 80 godina.

Protokol za prijenos: Niskoenergetska tehnologija Bluetooth

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, jamči ispravan rad uređaja 2 godine od dana kupnje. Isto tako jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje. Popravci obavljeni tijekom jamstvenog roka ne produžuju jamstveni rok. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugima pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPNJE

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31,
10432 Bregana
TEL: 01/2020-504,
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr,
WEB: www.medicaldirect.hr