

KAKO RADI

Test per bevande alterate

Test Pad



Non sicuro

GHB

KET

Test GHB: Se il colore del test pad diventa arancione-rosso, la bevanda potrebbe non essere sicura da consumare.

Test KET: Se il colore del test pad diventa azzurro chiaro, la bevanda potrebbe non essere sicura da consumare.

BZO Strip



Test BZO: Se appare una linea o una linea indistinta, la bevanda potrebbe non essere sicura da consumare.

LOT



REF

1 Test



GHB test: Ako testna pločica postane narančastocrvena, piće možda nije sigurno za konzumaciju.

KET test: Ako testna pločica postane svijetloplava, piće možda nije sigurno za konzumaciju.

BZO test: Ako se pojavi linija ili mutna linija, piće možda nije sigurno za konzumaciju.