

DIGITALNA VAGA ZA BEBE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: INMD-039

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Prije instalacije i uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih za buduću referencu. Neispravna ili nepravilna uporaba uređaja može oštetiti vagu i uzrokovati štetu korisniku.
- Tijekom vaganja nikada ne ostavljajte bebu bez nadzora.
- Vagu koristite samo za težine do 20 kg. Korištenje vage s većim težinama može oštetiti uređaj i biti opasno.
- Za čišćenje vage koristite mekanu krpu, po mogućnosti navlaženu vodom. Ne uranjajte uređaj u tekućinu niti ga ispirite pod tekućom vodom.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje/otapala ili abrazivne tvari.
- Tijekom uporabe držite vagu podalje od izvora elektromagnetskih smetnji, poput mikrovalnih pećnica, mobilnih telefona i uređaja za bežičnu mrežu.
- Nemojte krivo spajati kontakte baterija unutar pretnice za baterije.
- U slučaju kvara ne pokušavajte sami popravljati vagu. Uvijek se obratite kvalificiranom tehničkom osoblju.
- Nikada ne dopustite bebi da se igra ambalažnim materijalima, posebno plastičnim vrećicama, jer mogu uzrokovati gušenje.
- Ako dođe do kvara uzrokovanog elektrostatičkim pražnjenjem, izvadite baterije na nekoliko minuta. To će vratiti normalnu funkciju uređaja.
- Ne stavljajte ništa na vagu kada se ne koristi.
- Ne izlažite vagu dugotrajnom opterećenju jer to može oštetiti mjerni mehanizam.
- Uklanjanjem ili zamjenom baterija brišu se svi pohranjeni podaci o mjerenju težine.
- Vaga će se automatski isključiti nakon 25 sekundi neaktivnosti. Za trenutno isključivanje vage pritisnite i držite tipku „ON/OFF/TARE“ dok se ne isključi.
- Izbjegavajte udarce ili padove te postavite vagu na ravnu, stabilnu i sigurnu površinu.
- Ova vaga namijenjena je isključivo kućnoj uporabi i dizajnirana je za mjerenje težine bebe. Nije odobrena za medicinsku uporabu ni za bilo koju svrhu osim privatne. Budući da je vaga namijenjena isključivo privatnoj uporabi, izuzeta je od zakonskih periodičnih provjera točnosti koje se zahtijevaju za komercijalne transakcije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Velika površina: 50,6 x 23,3 cm
- Dimenzije proizvoda: 54,8 x 32 x 3,5 cm
- LCD zaslon: 58 x 25 mm
- Kapacitet: 20 kg
- Gradacija: 10 g
- Mjerne jedinice: kg/lb/st
- Tare funkcija
- Automatsko isključivanje
- Indikator preopterećenja: O-Ld
- Indikator slabe baterije: Lo
- Napajanje: 2 AAA baterije (nisu uključene)
- Težina proizvoda: 1,17 kg

UPORABA

1. Otvorite pretnac za baterije ispod vage i umetnite 2 AAA baterije.
2. Postavite vagu na tvrd, ravnu površinu.
3. Pritisnite tipku  za uključivanje vage.
4. Ne stavljajte ništa na vagu dok se zaslon ne resetira na nulu. Vaga je spremna za uporabu kada LCD zaslon prikaže "0.00 kg".
5. Pritisnite tipku UNIT za odabir željene mjerne jedinice.

6. Stavite bebu na mjernu platformu; zaslon će prikazati težinu.
7. Tare funkcija: pritisnite tipku .
8. Maksimalni kapacitet je 20 kg. Ako se na zaslonu pojavi "O-Ld", to znači da je težina veća od dopuštene.
9. Ako se pojavi indikacija slabe baterije "Lo", odmah zamijenite baterije. Provjerite jesu li umetnute s ispravnom polaritetom.
10. Ako više ne trebate vagati, pritisnite tipku  za isključivanje ili pričekajte automatsko isključivanje nakon nekoliko sekundi.

NAPOMENE

1. Ne uranjajte vagu u vodu niti je čistite korozivnim kemikalijama.
2. Tijekom vaganja postavite vagu na tvrdi, ravnu površinu. Ne koristite je na tepihu ili mekanim materijalima.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr