



GRIJAČA DEKA

dvostruka i jednostruka

MODEL: INN-065 i INN-063



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

UPOZORENJA

- Prije upotrebe samog proizvoda, provjerite da proizvod nije oštećen. U slučaju oštećenja, problema u radu ili pada u vodu, ne koristite proizvod i molimo Vas da kontaktirate prodajni servis.
- Ne ostavljajte plastičnu vrećicu ili druge dijelove ambalaže u dohvatu djece.
- Kontrolna jedinica i grijajuća deka pakiraju se odvojeno. Grijajuću deku koristite samo sa priloženom kontrolnom jedinicom.
- Prije uključivanja u električnu mrežu provjerite dali vrijednosti voltaže el. sustava odgovaraju vrijednostima navedenim na uređaju.
- Grijajuća deka ne smije se upotrebljavati presavijena ili zgužvana.
- Proizvod je dizajniran i napravljen da se koristi kao pod-deka (smještena na madrac ispod platne), svaki drugi način uporabe nije primјeren i može ugroziti vašu sigurnost.
- Prije čišćenja uklonite kontrolnu jedinicu.
- Ne smije se prati u kemijskoj čistionici.
- Ne koristite uređaj ako je vlažan ili mokar.
- Deka se ne smije zavrтati ili gnječiti.
- Ne ubadajte pribadače, igle ili slične predmete u deku.
- Kada nije u uporabi deka mora biti isključena iz el. mreže.
- Ne vadite utikač iz utičnice povlačenjem za kontrolnu jedinicu.
- Kod uporabe na krevetima s pomicnom podnicom treba obratiti pažnju da se kod podizanja ili spuštanja podnice ne ošteći kabel za napajanje deke.
- Deka se smije koristiti samo na madracu kao podlozi, ne postavljajte ju na podnice, letvice, podeve ili druge krute površine.
- Ne uključujte uređaj u el. mrežu prije no što ga namjestite na ležaj.
- Uredaj nije namijenjen za uporabu djeci, hendikepiranim osobama, osobama ne osjetljivim na povišene temperature, osobama s ugrađenim »pacemakerom« ili nekim drugim baterijski napajanim medicinskim pomagalom.
- Ne koristite ovaj uređaj istovremeno s drugim grijajućim tijelima
- ovaj uređaj nije namijenjen medicinskoj uporabi u bolnicama
- preduga uporaba grijajućih tijela može izazvati opekline
- prije pospremanja uređaja mora se pričekati da se isti ohladi
- na pospremljeni uređaj ne odlažite druge predmete koji ga mogu deformirati
- u slučaju da uređaj ne funkcioniра ispravno odmah ga isključite i el. mreže, ne otklanjajte eventualni kvar sami.
- u slučaju da sigurnosni osigurač pregori uređaj treba vratiti proizvođaču ili ovlaštenom predstavniku na servis i zamjenu
- povremeno pregledajte uređaj zbog mogućih tragova istroženosti ili oštećenja
- Ako ste zamijetili na uređaju oštećenja ili uređaj ne radi ispravno обратите se ovlaštenom servisu ili proizvođaču
- Ako je kabel za napajanje oštećen zamijeniti ga smije samo ovlašteni servis ili proizvođač uređaja
- Uredaj nije namijenjen za vanjsku uporabu.

KORIŠTENJE

1. Grijajuću deku koristite samo uz priloženu kontrolnu jedinicu.
2. Za povezivanje kontrolne jedinice i grijajuće deke umetnite priloženi konektor (3) u utičnicu na deki.
3. Grijajuću deku položite na madrac tako da strana na kojoj se nalazi utičnica za povezivanje kontrolne jedinice bude okrenuta prema madracu.
4. Poravnajte deku ako je potrebno, deka ne smije biti zgužvana.
5. Ne presavijajte grijajuću deku.

6. Postavite plahtu preko grijajuće deke i namjestite krevet na uobičajeni način.
7. Za vrijeme uporabe ne smještajte kontrolnu jedinicu ispod jastuka ili pokrivača.
8. Prekidač na kontrolnoj jedinici postavite na nulu (0) prije uključivanja uređaja u el. mrežu.
9. Električnu grijajuću deku potrebno je uključiti sat vremena prije no što odlazite u krevet i odabratiti tome željenu temperaturu zagrijavanja. Na primjer:
Nivo 1: mala snaga zagrijavanja za osjećaj topline i ugode u krevetu
Nivo 2: srednja snaga kod umjerenog hladnog vremena
Nivo 3: velika snaga za intenzivno zagrijavanje kreveta, kada je temperatura prostorije izrazito niska.
Za brže zagrijavanje deke odaberite nivo 3.
Prije odlaska u krevet, ugasite uređaj i isključite ga iz električne mreže.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SPREMANJE

- Prije početka čišćenja odvojite kontrolnu jedinicu od grijajuće deke
- Ne koristite kemijska sredstva ili čišćenje u kemijskoj čistionici jer mogu oštetiti električne dijelove unutar deke i ugroziti vašu sigurnost
- Nikad ne stavlјate kontrolnu jedinicu ili kabel za napajanje u vodu ili drugu tekućinu
- Deku možete prati ručno i li u stroju za pranje rublja na temperaturi vode od maksimalno 40° C i uz najmanju brzinu centrifuge. Savjetujemo ručno pranje koje će produžiti životni vijek uređaja.
- Nikada ne sušite uređaj u sušilici za rublje
- Ne cijedite deku gnječenjem ili savijanjem, pustite da se deka osuši na zraku u ravnom položaju bez presavijanje. Ne glaća se. Ne odlazi ju dok je vlažna, deka se smije pospremiti ili ponovo koristiti tek kada je potpuno suha.
- Kada uređaj ne koristite, pustite ga da se ohladi, nježno savijte i pohranite u kutiju u kojoj je isporučen. Ne pritišćite deku i ne odlazi na nju teške predmete koji je mogu deformirati i oštetiti.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOŠI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr