

innoliving
— — *easy tech, easy life*

DIGITALNA KUPAONSKA VAGA

MODEL: INN-107



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

TEHNIČKE OSOBINE

Maksimalna nosivost: 180kg / 396lb

Rezolucija mjerenja: 100g / 0,2 lb

Gazište je izrađeno od kaljenog stakla

4 precizna senzora za mjerenje težine

Veliki i lako čitljivi LCD ekran

Automatsko isključivanje

Indikator preopterećenosti

Indikator potrošenosti baterija

Izbor mjernih jedinica kg / lb

Napajnje: 1 CR2032 litijaska baterija (uključena)

KORIŠTENJE

Otvorite kućište za bateriju s donje strane vage i izvadite izolacijsku trakicu koja se nalazi u njemu. Vratite poklopac kućišta na njegovo mjesto. Mjernu jedinicu odaberite uz pomoć prekidača koji se nalazi desno od kućišta za baterije. Vagu postavite na ravnu tvrdu površinu (izbjegavajte postavljanje vage na tepihe). Stanite na vagu i ona će se automatski uključiti i izmjeriti težinu te je prikazati na ekranu. Vaga će se sama ugasiti nakon nekoliko sekundi.

Za ponavljanje mjerenja

Sidite s vage, pričekajte nekoliko sekundi da se isključi, a zatim ponovo stanite na nju i pričekajte da izmjeri Vašu težinu. Važno: Za vrijeme vaganja stojite mirno i rasporedite težinu na obje noge ravnomjerno.

Izmjena baterija

Otvorite kućište za baterije i umetnite novu bateriju (CR2032) pazeći na polaritet.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Vagu čistite vlažnom i mekom krpom
- Izbjegavajte curenje vode po vagi.
- Ne koristite agresivna kemijska sredstva za čišćenje
- Ne uranjajte vagu u vodu ili neku drugu tekućinu
- Vagu ne pohranjujte u okomitom položaju kada nije u uporabi, može dovesti do prijevremenog pražnjenja baterije
- Ova vaga precizan je uređaj i treba se prema njemu pažljivo odnositi, ne bacajte ga, ne tresite i ne udarajte s njim.
- U slučaju kvara ne pokušavajte ga sami otkloniti već se obratite ovlaštenom servisu. Jamstvo neće biti važeće u slučaju da sami pokušavate otkloniti kvar na uređaju.
- Ako vaga neće biti korištena dulje vrijeme izvadite bateriju jer 'curenje' baterije može oštetiti uređaj. (Kako kvaliteta baterija varira od proizvođača do proizvođača jamstvo ne pokriva štete i kvarove uzrokovane njima.)
- Uređaj ne odlažite u blizini izvora visoke temperature, vlage ili na direktnom sunčevom svjetlu.
- Na vagu ne odlažite druge teške predmete.

U slučaju problema u radu vage

Provjerite dali je baterija ispravno umetnuta u ležište. Provjerite koju ste mjernu jedinicu odabrali. Provjerite da se vaga nalazi na čvrstoj ravnoj površini i da ne dodiruje zidove.

Indikator potrošenosti baterije

Kada se na ekranu prikaže tekst "Lo" ili se ekran uopće ne uključi baterija je ispražnjena i potrebno

ju je zamijeniti.

UPOZORENJA

Ova vaga namijenjena je samo kućnoj uporabi. Svaka druga uporaba nije primjerena i može biti opasna. Pakiranje sadrži plastične vrećice i treba ga čuvati van dosega djece. Vaga nije namijenjena za vaganje predmeta i ne može služiti za izračune bilo koje vrste.

Ova vaga nije medicinski uređaj i njeni rezultati mjerenja ne mogu se koristiti u dijagnostičke svrhe. Rezultati vaganja ne mogu biti razlog samoinicijativnog mijenjanja tretmana ili količina lijekova propisanih od strane liječnika. Kako bi izbjegli moguće povrede nemojte stajati uz sami rub gazišta vage.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom pet (5) godina od dana kupnje. Također, jamči-mo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr