

ELEKTRIČNI GRIJAČI POKRIVAČ



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: INN-766

PRIJE UPORABE MOLIMO PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆE REFERENCE.

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik s uputama, a posebno sigurnosna upozorenja i pridržavajte se istih. Ovaj priručnik čuvajte za referencu.

Ako se ne poštuju sigurnosne upute, to može prouzrokovati kvarove i jamstvo će biti poništeno, a proizvođač će se ograditi od svake odgovornosti.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li proizvod cjelovit. Ako primijetite vidljiva oštećenja, nemojte ga koristiti, već ga vratite proizvođaču ili prodavatelju.
- Držite plastičnu vrećicu i ostali ambalažni materijal izvan dohvata djece.
- Iz sigurnosnih razloga električna poddeka i upravljačka jedinica ne smiju se otvarati niti rastavljati.
- Električnu poddeku koristite isključivo s priloženom upravljačkom jedinicom.
- Prije priključivanja provjerite odgovara li napon naveden na oznaci napona mrežnom naponu.
- Ne koristite električnu poddeku presavijenu ili zgužvanu.
- Ovaj je proizvod namijenjen za kućnu uporabu kao električna poddeka. Svaka druga uporaba smatra se nepravilnom i opasnom.
- Odspojite upravljačku jedinicu prije pranja.
- Ne čistite kemijski.
- Ne koristite ako je električna poddeka ili bilo koji njezin dio vlažan ili mokar.
- Ne cijedite niti uvijajte.
- Ne zabadajte igle ili slične predmete u električnu poddeku.
- Isključite uređaj iz utičnice kada ga ne koristite.
- Nikada ne povlačite kabel ili upravljačku jedinicu prilikom odspajanja iz utičnice.
- Ova poddeka nije namijenjena medicinskoj uporabi u bolnicama.
- Koristite uređaj samo na madracu. Ne koristiti na tvrdim površinama (bez madraca, na podnici, letvicama, podu itd.).
- Isključite iz utičnice prije nego što legnete. Korisnik ne smije zaspati dok je uređaj uključen.
- Ne koristiti na osobama s invaliditetom, djeci, osobama neosjetljivima na toplinu te osobama s pacemakerom ili drugim medicinskim uređajima na baterije.
- Dugotrajna uporaba pri visokoj temperaturi može uzrokovati opekline na koži.
- Ne koristiti zajedno s drugim grijačima.
- Uređaj se ne smije koristiti na podesivim krevetima jer poddeka ili kabel mogu zapeti.
- Prije spremanja ostavite proizvod da se ohladi.
- Ne savijajte i/ili deformirajte električnu poddeku stavljanjem predmeta na nju tijekom skladištenja.
- Ne koristiti na otvorenom.
- U slučaju kvara ili nepravilnog rada isključite iz utičnice. Ne popravljajte sami – odmah kontaktirajte ovlašteni servis.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od 8 godina naviše i osobe s umanjnim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva, uz nadzor ili ako su dobile jasne upute o sigurnoj uporabi te razumiju opasnosti.
- Proizvod nije igračka. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem. Držite proizvod izvan dohvata djece.
- Ako zaštitni osigurač pregori, uređaj se mora vratiti proizvođaču ili njegovom zastupniku.
- Redovito pregledavajte uređaj radi znakova istrošenosti ili oštećenja. Ako primijetite oštećenja ili uređaj ne radi ispravno, kontaktirajte ovlašteni servis. Ako je kabel ili utikač oštećen, ne koristite proizvod – obratite se ovlaštenom servisu ili proizvođaču.
- Korisnik ne smije zaspati dok je uređaj uključen i spojen na mrežu.
- UPOZORENJE: Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju ga koristiti zbog nemogućnosti reagiranja na pregrijavanje.
- Električnu poddeku ne smiju koristiti djeca osim ako roditelj/skrbnik nije prethodno postavio upravljačku jedinicu ili ako dijete nije dovoljno poučeno za sigurnu uporabu.
- Proizvod nije namijenjen osobama koje su neosjetljive na toplinu ili se ne mogu adekvatno zaštititi od pregrijavanja.
- Proizvod nije namijenjen medicinskoj uporabi u bolnicama.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora odrasle osobe.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis kako bi se izbjegao

rizik.

- Uređaj se može koristiti kod djece u dobi od 3 do 8 godina samo uz nadzor i ako je kontrolna jedinica postavljena na minimalnu temperaturu.
- Kabel i upravljačka jedinica mogu predstavljati rizik od zaplitanja, gušenja ili spoticanja ako nisu pravilno učvršćeni. Korisnik mora osigurati da je višak kabela pravilno fiksiran.



NE KORISTITE ELEKTRIČNU
DEKU PRESAVIJENU
ILI ZGUŽANU



NE ZABADAJTE ŠTAPIĆE
ILI IGLE U DEKU

Kako koristiti:

Ovaj je proizvod namijenjen za korištenje kao pokrivač, stoga korisnika mora pokriti izravnim kontaktom ili preko plahte. Ne koristite proizvod kao „PODDEKU“ ili „ispod pokrivača“. Spojite priloženi kabel za upravljanje na poklopac (poklopac ima utikač spojen na upravljačku jedinicu) i provjerite je li potpuno spojen.

KAKO KORISTITI ELEKTRIČNU DEKU

Ne stavljajte regulator ispod jastuka ili pokrivača tijekom upotrebe.

Postavite prekidač za paljenje u položaj 0 i umetnite utikač u utičnicu. Postavite birač temperature na maksimalnu razinu. Nakon 15 minuta postavite temperaturu na željenu razinu.

Preporučljivo je uključiti grijač kreveta jedan sat prije odlaska u krevet pomicanjem prekidača na željenu razinu temperature.

Odabrana razina temperature ovisi o temperaturi prostorije i osobnim preferencijama. Na primjer:

Razina 1: niska snaga za lagano grijanje,




Razina 2: srednja snaga

Razina 3: visoka snaga za grijanje kreveta kada je prostorija posebno hladna.

Za brže zagrijavanje kreveta odaberite razinu br. 3.

Prije odlaska u krevet isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice.

Temperatura koju mjeri ruka razlikuje se od one koju tijelo osjeća kada leži u krevetu; na drugim dijelovima tijela temperatura može biti izuzetno vruća. Temperatura koja se može otkriti na pokrivaču nakon zagrijavanja je u rasponu od 34° - 38°. Varijacije u detektabilnoj temperaturi mogu biti uzrokovane posebnim uvjetima okoline u kojima se koristi pokrivač.

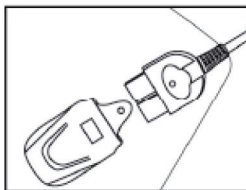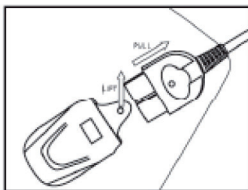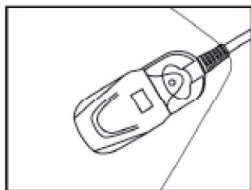

Isključite priključak

Za isključivanje priključka izvucite utikač. Nikada ne povlačite kabel.

Nakon upotrebe:

Provjerite je li regulator u položaju 0 kada se električni pokrivač ne koristi i izvucite utikač iz utičnice. Ako se električni pokrivač neće koristiti dulje vrijeme, uređaj stavite na hladno i suho mjesto.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije pranja ili čišćenja uređaja, isključite upravljačku jedinicu iz električne navlake.

- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora odrasle osobe.

	Nemojte kemijski čistiti ili koristiti kemijska otapala, jer ta sredstva mogu oštetiti električnu pokrivač i ugroziti sigurnost uređaja.		Ne izbjeljivati.
	Električnu deku perite ručno ili u perilici rublja na maksimalnoj temperaturi od 30°C uz nisko mehaničko djelovanje i centrifugu. Preporučuje se ručno pranje uređaja kako biste produžili vijek trajanja proizvoda. Nakon pranja, električnu deku stavite na žicu za rublje da se osuši. Nemojte koristiti štipaljke za rublje jer mogu oštetiti grijaće elemente.		Nemojte gužvati, cijediti ili uvijati električnu pokrivač.

- Nikada ne uranjajte upravljačku jedinicu ili kabel za napajanje u vodu.

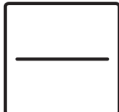	Nikada ne sušite u sušilici rublja.		Suho ležanje
	Ne peglati.		Ovaj proizvod ne smiju koristiti mala djeca (0-3 godine)

- Ne priključujte uređaj u utičnicu kako biste ga brže osušili.
- Ne ostavljajte uređaj suhim na suncu.
- Ne koristite sušilo za kosu za sušenje uređaja.
- Pustite da se električna deka osuši prirodnim putem.
- Ne koristite ako su električna deka ili njezini dijelovi vlažni ili mokri.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom tri (3) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr