

DIGITALNI ALKOTESTER




UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

SKU: INN-991

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

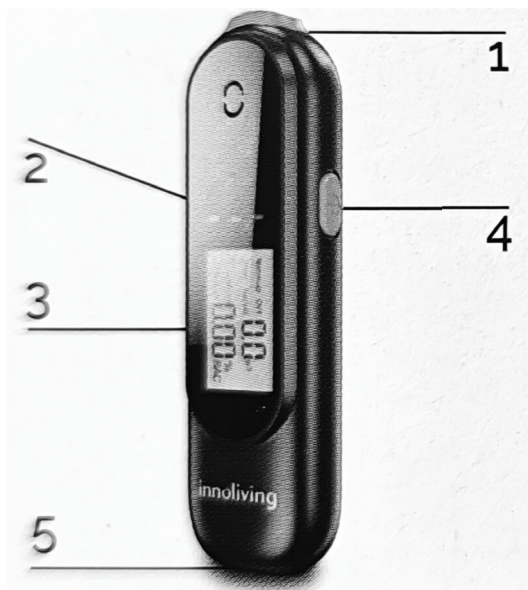

1. usnik
2. svjetlosni indikatori
3. ekran
4. prekidač
5. USB izlaz

Tester vam pruža informacije za određivanje razine alkohola u krvi istovremeno s korištenjem testa. Koncentracija alkohola u krvi mijenja se s vremenom, a na mjerenje mogu utjecati uvjeti okoline. Ovaj proizvod je namijenjen samo kao referenca kako bi se potaknula odgovorna i sigurna vožnja. Pruža isključivo indikativno mjerenje, ne zamjenjuje niti isključuje moguće testove koje provode nadležna tijela, a koji mogu imati različita očitavanja. Očitavanja testera nemaju pravnu vrijednost i ne oslobađaju nikakvu pojedinačnu odgovornost. Nepravilno skladištenje proizvoda i/ili nepravilna upotreba proizvoda mogu utjecati na točnost mjerenja. Ne biste se trebali oslanjati na to kao jedinu osnovu za utvrđivanje stanja pijanstva ili je li sigurno voziti vozilo, upravljati opremom ili se baviti opasnim aktivnostima. Innoliving Spa nije odgovoran za nepravilnu upotrebu ovog proizvoda iz bilo kojeg razloga. Prije upotrebe provjerite je li uređaj neoštećen i bez vidljivih oštećenja. U slučaju sumnje, nemojte koristiti proizvod i obratite se ovlaštenom servisu. Nakon upotrebe, proizvod uvijek čuvajte dalje od izvora topline, sunčeve svjetlosti, vlage, oštih predmeta ili slično. Ne koristite alkoholne tvari poput boja ili insekticida u blizini testera.

Ne koristite kemikalije za čišćenje testera. Nikada ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tekućine, senzor bi se mogao oštetiti. Ne pokušavajte sami popraviti proizvod, pod kaznom poništenja jamstva, već se uvijek obratite ovlaštenom servisu.

Određene tvari, poput tekućina za ispiranje usta i određenih lijekova koji sadrže etanol, mogu utjecati na rezultat.

Potrebno je oko 20 minuta da se alkohol apsorbira u krvotok putem probavnog sustava; stoga se preporučuje mjerenje 20 minuta nakon konzumiranja alkoholnih pića. Ako se mjerenje izvrši odmah nakon pijenja, rezultati mogu odražavati koncentraciju alkohola u piću, a ne stvarnu koncentraciju u krvi.

Preporučuje se pušačima da pričekaju najmanje 5 minuta nakon pušenja prije mjerenja ovim uređajem. Za dobivanje točnijih rezultata mjerenja, razmak između dva uzastopna mjerenja trebao bi biti veći od 3 minute. Ponovite mjerenja 2 ili 3 puta kako biste dobili točniji rezultat.

NAPOMENA: Ako se test provodi s baterijom niske razine napunjenosti, vrijednost testa može se razlikovati od stvarne vrijednosti. Kada je baterija niska, zaslon uređaja prikazat će «L» i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom kako bi signalizirao potrebu za punjenjem baterije. Tijekom punjenja uređaja, indikatorska lampica će postati crvena; kada je potpuno napunjena, crveno svjetlo će se ugasi. Nakon potpunog punjenja, uređaj može izvršiti oko 200 mjerenja. Ugrađena baterija nije zamjenjiva. Ne pokušavajte je ukloniti. Tekućine koje čine bateriju vrlo su agresivne. U slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja koje rezultira curenjem tekućine iz baterije, ne dodirujte proizvod bez odgovarajuće zaštite kože i očiju. Ne bacajte u vatru, postoji opasnost od požara i eksplozije. Odmah prestanite koristiti uređaj ako primijetite oteklinu,

curenje ili druge abnormalnosti.

UPOZORENJE: Vožnja pod utjecajem alkohola je kazneno djelo upravljanja vozilom s razinom alkohola u krvi višom od one dopuštene zakonom. U Italiji je dopuštena razina alkohola u krvi 0,50 g/l. Članak 186. talijanskog Zakona o cestama regulira vožnju pod utjecajem alkohola, razlikujući je prema razini alkohola u krvi, vrsti vozača i drugim okolnostima.

Raspon mjerenja: 0,00-0,19%BAC (0,0-1,9g/l)

Raspon temperature za korištenje: -5°C~C45°C Raspon temperature skladištenja: -20°C~50°C

KAKO KORISTITI ALKOHOL TESTER

Proizvodi rade s ugrađenom litijevom baterijom od 120mAh 3,7V koja se puni putem isporučenog USB kabela.

ZAGRIJAVANJE

1. Pritisnite gumb za uključivanje i držite ga 2 sekunde. Čut ćete «bip» kada se uključi, zaslon je UKLJUČEN.
2. Na zaslonu se pojavljuje riječ «WARM-UP», uređaj započinje odbrojavanje od 10 sekundi do predzagrijavanja. Pričekajte da se predzagrijavanje završi.

NAPOMENA:

Budući da će površina senzora oksidirati kada se test ne koristi dulje vrijeme, kada se tester prvi put izvadi iz pakiranja ili se tester nije koristio dulje vrijeme, korisnik treba zagrijati proizvod što je više puta moguće prije izvođenja testa na alkohol.

MJERENJE

1. Na kraju predgrijavanja, uređaj puhanjem prelazi u fazu mjerenja, na zaslonu se prikazuje riječ "PUHANJE" i započinje odbrojavanje od 10 do 0.
2. Tijekom odbrojavanja puhnite u usisnik zraka. Nakon što uređaj detektira plin, započinje odbrojavanje od 3 sekunde i zvučni signal će signalizirati prestanak puhanja.
3. Rezultat očitajte izravno na zaslonu proizvoda.
4. Ako je rezultat detektirane koncentracije alkohola 0,00% BAC (ili 0,0 g/l), to znači da alkohol nije detektiran i LED indikator postaje zelen.
5. Ako je rezultat veći od 0,01% BAC (0,1 g/l), ali manji od 0,04% BAC (0,4 g/l), na zaslonu će se prikazati "UPOZORENJE", a LED indikator će postati žut, uz zvučni signal.
6. Ako je rezultat veći od 0,05% BAC (0,5 g/l), na zaslonu će se prikazati "OPASNOST", a LED indikator će postati crven, uz zvučni signal.

SIMBOLI I LED INDIKATORI ZAGRIJAVANJE: nakon uključivanja uređaja, na zaslonu se pojavljuje riječ "ZAGRIJAVANJE" koja označava fazu predgrijavanja. PUHANJE: kada je predgrijavanje završeno, na zaslonu se prikazuje "PUHANJE" za početak puhanja zraka u usis zraka.

REZULTAT: kada se prikaže izmjerena vrijednost, na zaslonu se istovremeno pojavljuju riječ "REZULTAT" i odgovarajuća izmjerena vrijednost u g/l i %BAC.

ISKLJUČENO: "ISKLJUČENO" se pojavljuje 10 sekundi nakon što je vrijednost detektirana kako bi signalizirao automatsko isključivanje.

Ovisno o detektiranoj vrijednosti, svjetlosni indikator poprima drugu boju:

Zelena: rezultat niži od 0,1 g/L

Žuta: rezultat od 0,1 g/l do 0,4 g/L

Crvena: rezultat viši od 0,5 g/L

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr