

PODLAKTNA ŠTAKA ZA DJECU S PODEŠAVANJEM VISINE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: JMC2047-2


PODLAKTNA ŠTAKA ZA DJECU

Hvala što ste kupili Timago proizvod. Molimo Vas da pročitate upute za maksimalno zadovoljstvo korištenjem.

KARAKTERISTIKE

Štaka za podlakticu sastoji se od udobne i izdržljive ručke i anodizirane, te od aluminijske anodizirane noge s visokokvalitetnim gumenim vrhom. Štaka ima ergonomski oblik i pravilno usklađen kut lakta zahvaljujući kojem se sila pritiska raspoređuje na rukohvat.

- a. rukohvat
- b. potpora za ruke
- c. podešavanje visine – klin za zaključavanje
- d. gumeni vrh

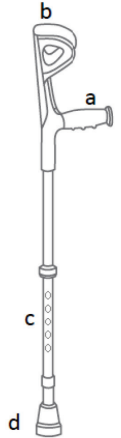

PRIMJENA

Štaka za podlakticu je pomoćna oprema koja se koristi za povećanje površine oslonca kod teško pokretljivih pacijenata. Štaka se preporučuje pacijentima kojima je potrebna pomoć i podrška pri hodu, a može se koristiti i za reedukaciju hoda kao pomoć u održavanju ravnoteže nakon ozljeda donjih udova ili trupa.

Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koji mogu ometati korisnika u osloncu na štaku.

PODEŠAVANJE

Za podešavanje štake, pritisnite metalni klin i odaberite odgovarajući položaj unutarnje cijevi. Zatim zaključajte položaj cijevi pomoću metalnog klina. Štaka je podesiva u koracima od 2,5 cm.

- Da biste podesili odgovarajuću duljinu štake, stanite uspravno i savijte gornji ekstremitet u zglobu lakta pod kutom od 20°.
- Štaku treba prilagoditi individualno korisniku tako da rukohvat bude u razini zgloba kuka, a potpora za ruke u visini gornjeg dijela podlaktice.
- Prije uporabe provjerite je li štaka stabilna i da klin za zaključavanje u potpunosti strši kroz otvor za podešavanje na štaci.
- Preporučljivo je koristiti dvije štake istovremeno.

BILJEŠKA! U slučaju nedoumice oko tehnike kretanja sa štakama, obratite se osobi koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

TEHNIČKI PODACI

Noga: aluminij s anodiziranjem

Podešavanje visine: 82-98 cm

Visina od tla do rukohvata: 61-77 cm

Maksimalni kapacitet: 110 kg

Težina štake: 0,55 kg

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistite štaku samo vodom i blagim deterdžentima. Temeljito osušite.
- **Nemojte koristiti:** jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).
- Preporuča se redovito provjeravati gumeni vrh. Odmah zamijenite istrošeni vrh.

BILJEŠKE

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje štake, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.