



**Sigurnosna ograda koja se montira na toalet**

**JMC5300KD**



## **UPUTE ZA KORIŠTENJE**

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.

Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

Tel: +385 1 20 20 504

E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)

Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## SIGURNOSNA OGRADA KOJA SE MONTIRA NA TOALET

Hvala što ste kupili Timago proizvod. Molimo Vas da pročitate upute za maksimalno zadovoljstvo korištenjem.

### KARAKTERISTIKE


Sigurnosna ograda WC-a izrađena je od ultra laganog anodiziranog aluminija. Podesiv je po visini i širini kako bi zadovoljio potrebe korisnika.

#### Set uključuje:

- Lijevi okvir
- Desni okvir
- Priključak

#### Elementi stolice komoda:

- a. naslon za ruku
- b. podešavanje širine
- c. priključak
- d. podešavanje visine – klin za zaključavanje
- e. vrhovi protiv klizanja

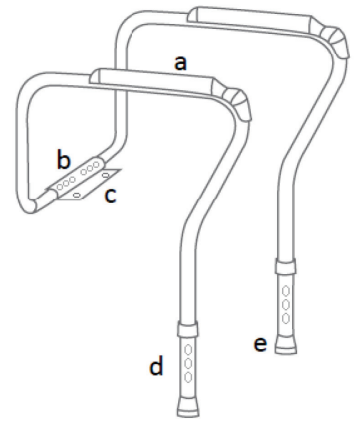

### PRIMJENA

Sigurnosna ograda za WC je pomoćna oprema koja korisniku pomaže u obavljanju fizioloških aktivnosti. Sigurnosna ograda se preporučuje osobama s disfunkcijom i onima koji su izgubili sposobnost samostalnog sjedenja i ustajanja. Zahvaljujući podešavanju visine i širine, okvir se može prilagoditi veličini WC školjke.

### PODEŠAVANJE

- Prvo rastavite WC dasku; odvrnuti pričvrstne vijke WC školjke.
- Montažni element sigurnosne ograde postavite tako da odgovara montažnim otvorima WC školjke.
- Montirajte okvir WC školjke.
- Za podešavanje širine, pritisnite metalni klin na montažnom elementu, odaberite odgovarajuću širinu i zaključajte položaj cijevi jedne u odnosu na drugu.
- Za podešavanje visine pritisnite metalni klin u nožici, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj cijevi jedna u odnosu na drugu.
- Sastavite WC dasku.

**Bilješka!** Klinovi moraju biti postavljeni na istoj razini na svakoj nozi. Noge trebaju stajati stabilno na tlu.

### TEHNIČKI PODACI

**Ukupna širina:** 53-63 cm

**Ukupna dubina:** 44 cm

**Visina:** 64-74 cm

**Dimenzije sjedala:** 47 cm x 42 cm

**Težina:** 0,4 kg

**Maksimalni kapacitet:** 100 kg

**Boja okvira:** srebrna

### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistite sigurnosnu ogradu samo vodom i blagim deterdžentima. Temeljito osušite.
- **Nemojte koristiti:** jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).
- Preporuča se redovito provjeravati gumeni vrh. Odmah zamijenite istrošeni vrh.

### BILJEŠKE

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje sigurnosne ograde, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.