

SIGURNOSNA OGRADA KOJA SE MONTIRA NA TOALET



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: JMC5300KD

SIGURNOSNA OGRADA KOJA SE MONTIRA NA TOALET

Hvala što ste kupili Timago proizvod. Molimo Vas da pročitate upute za maksimalno zadovoljstvo korištenjem.

KARAKTERISTIKE


Sigurnosna ograda WC-a izrađena je od ultra laganog anodiziranog aluminija. Podesiv je po visini i širini kako bi zadovoljio potrebe korisnika.

Set uključuje:

- Lijevi okvir
- Desni okvir
- Priključak

Elementi stolice komoda:

- a. naslon za ruku
- b. podešavanje širine
- c. priključak
- d. podešavanje visine – klin za zaključavanje
- e. vrhovi protiv klizanja

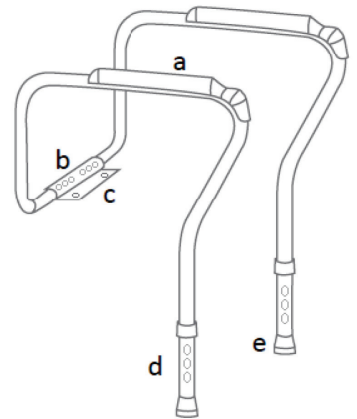

PRIMJENA

Sigurnosna ograda za WC je pomoćna oprema koja korisniku pomaže u obavljanju fizioloških aktivnosti. Sigurnosna ograda se preporučuje osobama s disfunkcijom i onima koji su izgubili sposobnost samostalnog sjedenja i ustajanja. Zahvaljujući podešavanju visine i širine, okvir se može prilagoditi veličini WC školjke.

PODEŠAVANJE

- Prvo rastavite WC dasku; odvrnuti pričvrstne vijke WC školjke.
 - Montažni element sigurnosne ograde postavite tako da odgovara montažnim otvorima WC školjke.
 - Montirajte okvir WC školjke.
 - Za podešavanje širine, pritisnite metalni klin na montažnom elementu, odaberite odgovarajuću širinu i zaključajte položaj cijevi jedne u odnosu na drugu.
 - Za podešavanje visine pritisnite metalni klin u nožici, odaberite odgovarajuću visinu i zaključajte položaj cijevi jedna u odnosu na drugu.
 - Sastavite WC dasku.
- Bilješka!** Klinovi moraju biti postavljeni na istoj razini na svakoj nozi. Noge trebaju stajati stabilno na tlu.

TEHNIČKI PODACI

Ukupna širina: 53-63 cm

Ukupna dubina: 44 cm

Visina: 64-74 cm

Dimenzije sjedala: 47 cm x 42 cm

Težina: 0,4 kg

Maksimalni kapacitet: 100 kg

Boja okvira: srebrna

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistite sigurnosnu ogradu samo vodom i blagim deterdžentima. Temeljito osušite.
- **Nemojte koristiti:** jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivač, benzin ili otapala (može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i kao posljedicu - gubitak prava na jamstvo).
- Preporuča se redovito provjeravati gumeni vrh. Odmah zamijenite istrošeni vrh.

BILJEŠKE

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje sigurnosne ograde, nepridržavanje sigurnosnih propisa i zlouporabu.