



**Profesionalni
bolnički
inhalator Hospyneb**

LT139

UPUTE ZA KORIŠTENJE



Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Dijelovi:

- 1.) ON/OFF prekidač
- 2.) Regulator radnog tlaka
- 3.) Mjerač radnog tlaka
- 4.) Priključak za zračnu cijev
- 5.) Filter za zrak

Uključen pribor:

Fasterjet® čašica, nastavak za nos i usta, masku za odrasle i djecu, zračnu cijev, Porex® rezervni filter i kabel za napajanje. Medicinski uređaj (Klasa IIa - MDD 93/42/EEC) Hospyneb je profesionalni inhalator za aerosolnu terapiju respiratornog trakta. Sadrži klipni kompresor i zračni filter (zamjena svakih 70 uporaba). Pouzdan i izdržljiv medicinski uređaj klase IIa.

Napomena

Medicinski uređaj je namijenjen za profesionalnu i kućnu uporabu isključivo uz preporuku liječnika. Uređajem se koristite prema natuknicama u ovim uputama za korištenje. Važno je da se pacijent prije korištenja upozna s uređajem i njegovim korištenjem. Uređaj koristite samo za aerosolnu terapiju. Proizvođač nije odgovoran za neprikladno korištenje uređaja. Ne koristite uređaj za anesteziju ili pulmonarnu ventilaciju. Ne koristite ga u prisutstvu zapaljivih anestetika u kombinaciji sa zrakom, kisikom ili dušikovim oksidom.

Kućiste uređaja nije vodonepropusno. Inhalator i medikamente koristite isključivo po uputama liječnika. Upotrebljavajte ga s uključenim priborom uz uređaj. Ne koristite produžne kablove i adaptere te strujni kabel odmotajte kako ne bi došlo do pregrijavanja. Držite dalje od toplih površina. Nakon korištenja, isključite kabel. Ne uranjajte uređaj u vodu. Ako dođe do kontakta s vodom, odmah isključite uređaj iz utičnice. Ne dirajte i ne pokušavajte izvaditi uređaj iz vode bez da ste prvo isključili kabel iz utičnice. Uređaj ne koristite nakon kontakta s vodom, obratite se ovlaštenom servisu za pomoć. Ne otvarajte kućište i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Kod nepravilnog rada, odmah isključite uređaj i obratite se u ovlašteni servis. Uređaj sadrži sitne dijelove koji se mogu lagano skinuti i progutati. Maloljetne osobe i osobe s poteškoćama u razvoju mogu koristiti uređaj samo uz nadgledanje odrasle osobe s punim mentalnim kapacitetom. Čuvajte na suhom i čistom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti, izvora topline i vremenskih neprilika. Ne ostavljajte na mjestu dostupnom djeci i osobama s poteškoćama u razvoju. Uređaj bacajte prema važećim zakonima za reciklažu.

Upute za korištenje Sastavljanje uređaja

1. Priključite kabel u utičnicu pravilne voltaže za uređaj.
2. Odvrnite čašicu i odvojite je na dva dijela (slika A).
3. Donji dio čašice napunite lijekom prema preporuci liječnika (slika B).

4. Nazad spojite dva dijela čašice (slika C).
5. Priključite zračnu cijev na čašicu na za to predviđen priključak na uređaju.
6. Priključite masku, nastavak za nos ili usta.
7. Nakon što ste sastavili sve dijelove, isključite uređaj i isključite kabel iz utičnice.

Čišćenje i dezinfekcija

Operite ruke prije čišćenja i dezinfekcije pribora. Zamjena filtera: podignite poklopac s filtera izvucite stari filter koji ćete zamijeniti novim. Postupak je prikazan na slici niže. Čišćenje kompresora: ne uranjajte uređaj u vodu i ne perite ga pod mlazom vode. Koristite isključivo vlažnu krpu s neagresivnim deterđentom.

Poteškoće - uzrok i rješenja

Uređaj se ne može upaliti

Provjerite je li kabel dobro priključen u utičnicu. Provjerite je li prekidač u "ON" poziciji. Uređaj je uključen, no ne stvara maglicu. Provjerite je li dobro spojena čašica i dijelovi u njoj. Provjerite je li zračna cijev savijena ili slomljena. Provjerite zračni filter, ako je prljav ili oštećen, zamijenite ga novim. Provjerite ima li lijeka u čašici.

Uređaj ne radi

Zaštita od pregrijavanja je uključena ako uređaj radi blizu izvora topline ili u uvjetima s temperaturom višom od 40°C. Ostavite uređaj da se ohladi barem 60 minuta te ga onda ponovno upalite. Za sve ostale poteškoće se javite ovlaštenom servisu.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, jamči ispravan rad uređaja 2 godine od dana kupnje. Isto tako jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje. Popravci obavljeni tijekom jamstvenog roka ne produžuju jamstveni rok. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugima pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara. Jamstvo pokriva samo kompresor. Zamjenjive komponente poput raspršivača, maske, usnik, crijevo za zrak i filtri nisu uključene u jamstvo.

DATUM KUPNJE

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA