

KOMPAKтни INHALATOR ZA BEBE, DJECU I ODRASLE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

SKU: LTK210


Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Uvod

Hvala vam što ste kupili naš kompresorski inhalator. Uređaj je kompaktan medicinski aparat namijenjen učinkovitoj inhalaciji lijekova koje je propisao liječnik u bronhijalne šupljine.

Uz pravilno korištenje i održavanje, uređaj će osigurati dugogodišnje učinkovito liječenje.

Dijelovi inhalatora

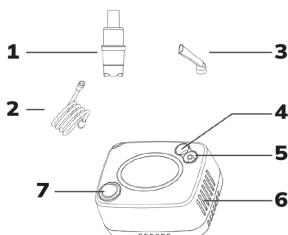

1. čašica
2. crijevo
3. usnik
4. filter i poklopac filtera
5. izlaz zraka
6. otvori za zrak
7. prekidač

VAŽNA UPOZORENJA

Ovaj se uređaj smije koristiti samo u svrhe opisane u ovim uputstvima. Proizvođač ne može biti odgovoran za štetu nastalu nepravilnom primjenom. Uređaj nije prikladan za anesteziju i ventilaciju pluća. Smije se koristiti samo s originalnim dodacima kao što je prikazano u ovim uputama. Ne koristite uređaj ako mislite da je oštećen ili primijetite bilo što neobično. Nikada ne otvarajte uređaj. Uređaj sadrži osjetljive komponente i s njim se treba postupati oprezno. Pridržavajte se uvjeta skladištenja i rada opisanih u odjeljku "Tehničke specifikacije". Zaštite ga od vode, vlage, ekstremnih temperatura, udara, padova, onečišćenja, prašine, izravnog sunčevog svjetla, topline i hladnoće. Koristite samo lijekove koje vam je propisao liječnik i slijedite liječnikove upute s obzirom na doziranje, trajanje i učestalost terapije. Sav pribor smije koristiti samo jedna osoba. Nikada ne naginjite inhalator iznad 60°.

- Uređaj nije zaštićen od tekućine.
- S obzirom na njihovu duljinu, kabel za napajanje i cijevi mogu predstavljati opasnost od davljenja.

Pazite da djeca ne koriste uređaj bez

nadzora neki su dijelovi dovoljno mali da ih mogu progutati.

Upotreba inhalatora nije zamjena za savjetovanje s liječnikom.

PRIPREMA I UPORABA

Prije prve upotrebe uređaja, preporučujemo da ga očistite kako je opisano u odjeljku "Čišćenje i dezinfekcija".

1. Postavite kompresorski inhalator na ravnu, stabilnu površinu. Osigurajte da su kontrole lako dostupne dok sjedite.
2. Izvadite sav pribor iz torbe za nošenje. Važno: Prije prve upotrebe, čašica se mora temeljito očistiti slijedeći „Čišćenje i dezinfekcija“ navedene u priručniku.
3. Lagano okrenite gornji dio čašice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga rastavili.
4. Napunite donji dio čašice lijekom koji vam je propisao liječnik ili fiziološkom otopinom. Provjerite je li konus umetnut u donji dio.
5. Lagano okrenite gornji dio u smjeru kazaljke na satu kako biste ponovno sastavili čašicu. Provjerite jesu li dva dijela sigurno spojena.
6. Spojite jedan kraj cijevi za zrak na bazu čašice.
7. Spojite drugi kraj cijevi za zrak na priključak cijevi za zrak koji se nalazi na prednjoj strani kompresora.
8. Pričvrstite usnik ili masku po vašem izboru na vrh čašice.
9. Uključite kabel za napajanje u odgovarajuću električnu utičnicu. U ovoj fazi provjerite je li prekidač za napajanje u položaju "ISKLJUČENO".



10. Pritisnite prekidač za napajanje kako biste započeli propisani tretman. Važno: Motor kompresora opremljen je toplinskom zaštitom koja će isključiti uređaj prije nego što se pregrije. Ako toplinska zaštita isključi uređaj, molimo:
- a. Isključite uređaj.
- b. Isključite uređaj iz električne utičnice.
- c. Pričekajte 30 minuta da se motor ohladi prije početka sljedećeg tretmana.
- d. Provjerite jesu li otvori za zrak prohodni.
11. Na kraju tretmana isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice.
12. Ispraznite preostali lijek iz čašice i očistite uređaj kako je opisano u odjeljku "Čišćenje i dezinfekcija".

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Temeljito očistite sve komponente kako biste uklonili ostatke lijekova i moguće nečistoće nakon svake uporabe. Kompresor 1 i cijev za zrak 6 treba očistiti čistom, vlažnom krpom.

Uvijek dobro operite ruke prije čišćenja i dezinfekcije dodataka.

Ne izlažite kompresor vodi ili toplini.

Zamijenite cijev kod svake uporabe na novom pacijentu ili u slučaju nečistoća.

Prije čišćenja odspojite uređaj.

Čišćenje vodom

Operite sve dijelove raspršivača (osim cijevi za zrak) pod toplom vodom iz slavine (max 60 °C) oko 5 minuta, dodajući po potrebi malu količinu deterdženta slijedeći ograničenja doziranja i upotrebe kako je propisao proizvođač deterdženta. Temeljito isperite pazeći da se sve naslage isperu i ostavite ih da se osuše.

Dezinfekcija

Sve komponente raspršivača (osim cijevi) mogu se dezinficirati kemijskim dezinficijensima slijedeći ograničenja doziranja i uporabe kako je propisao proizvođač dezinficijensa. Dezinficijensi su obično dostupni u ljekarnama.

Steriliziranje parom

Sve komponente raspršivača (osim cijevi za zrak i maski) mogu se sterilizirati parom do 121 °C (20 min.) ili 134 °C (7 min.). Nakon sterilizacije uvijek ohladite sve komponente na sobnu temperaturu prije daljnje uporabe.

Ne ponavljajte ciklus sterilizacije dok su komponente još tople.

ODRŽAVANJE, NJEGA I USLUGE

Sve rezervne dijelove naručite kod svog ljekarnika.

Preporučljivo je raspršivač zamijeniti nakon nekih 100 do 120 korištenja na jednom pacijentu ili nakon otprilike 20 ciklusa sterilizacije. Stalno provjeravajte filter radi čistoće i zamijenite ga ako je prljav ili nakon najviše 3 mjeseca uporabe. Uz uređaj se isporučuju rezervni filtri. Da biste zamijenili filter, otvorite odjeljak filtra za zrak 4 i promijenite filter 11.

GREŠKE I RJEŠENJA

Uređaj se ne može uključiti

Provjerite je li kabel za napajanje 2 pravil-

no uključen u utičnicu. Osigurajte da je prekidač za uključivanje/isključivanje 3 u položaju "I".

Raspršivač funkcionira loše ili uopće ne funkcionira

Provjerite je li cijev za zrak 6 pravilno spojena na oba kraja. Pazite da zračna cijev nije zgnječena, savijena, prljava ili začepljena. Ako je potrebno, zamijenite je novom. Osigurajte da je raspršivač 5 pravilno sastavljen 12. Provjerite jesu li dodani potrebni lijekovi.

TEHNIČKI PODACI

Klipni elektrokompresor

Model: LTK210

Napon: 220V - 60Hz

Dimenzije: 94 x 75 x 125 mm

Težina: 0,75 kg cca.

Tlak: 7.0 ~ 13.0 Psi/48.0 ~ 89.0 Kpa

Protok zraka: 3 - 6 lpm

Razina buke: 65 dBA (EN13544-1)

Brzina: ≥ 0.2ml/min

Kapacitet raspršivača: 6 ml

MMAD: 2.93 ± 0.03 µm

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, jamči ispravan rad uređaja 3 godine od dana kupnje. Isto tako jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje. Popravci obavljeni tijekom jamstvenog roka ne produžuju jamstveni rok. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugima pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara. Jamstvo pokriva samo inhalator. Zamjenjive komponente poput čašice, maske, usnika, i USB kabela nisu uključene u jamstvo.

DATUM KUPNJE

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31,
10432 Bregana
TEL: 01/2020-504,
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr,
WEB: www.medicaldirect.hr