



ELEKTRIČNI GRIJAČI POJAS ZA LEĐA

MODEL: LTK720



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. UVOD

Hvala Vam na odabiru električnog grijača za noge Kyara linije, talijanske tvrtke Moretti. Prije uporabe uređaja, posebno pročitajte upute za uporabu i sigurnosna upozorenja i slijedite ih u svakom trenutku. Držite ovaj priručnik i ilustrativni vodič s uređajem za buduće savjete. Ako uređaj predate drugom korisniku, obavezno uključite i ovu dokumentaciju. Ovaj priručnik sadrži prijedloge za ispravnu upotrebu uređaja i dragocjene savjete za vašu sigurnost. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se prodavaču koji će vam pomoći i ispravno Vas savjetovati.

NAPOMENA: Provjerite sve dijelove proizvoda da nisu oštećeni tijekom isporuke. U slučaju oštećenja ne koristite proizvod i obratite se prodavaču radi daljnjih uputa.

2. SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Nakon što ste uklonili uređaj iz ambalaže, provjerite njegovu cjelovitost na temelju crteža i provjerite ima li oštećenja nastalih tijekom transporta. Ako sumnjate, nemojte koristiti uređaj i obratite se lokalnom prodavaču. Ne dopustite djeci da se igraju s ambalažom! Držite plastičnu ambalažu izvan dohvata djece; postoji rizik od gušenja!
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovaraju li naponi napajanja na identifikacijskoj pločici podacima dostupne električne mreže. Identifikacijska pločica pričvršćena je na uređaj.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo kao podloga za grijanje za kućnu upotrebu. Svaka druga upotreba nije ispravna i potencijalno je opasna.
- Kad je prvi put koristite, zbog sintetskih materijala možete zamijetiti neugodan miris.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost, nadzor ili nakon što su dobili upute u vezi s njegovom upotrebom. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Uređaj ne koristite za bolesne ljude, dojenčad ili osobe neosjetljive na toplinu. Ovaj aparat djeca ne smiju koristiti ako roditelji ili staratelji ne kontroliraju upravljački uređaj ili ako dijete nije pravilno upućeno kako sigurno koristiti uređaj.
- **UPOZORENJE - NIJE** pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju koristiti uređaj jer ne mogu reagirati u slučaju pregrijavanja.
- **NE** aktivirajte kontroler temperature mokrim rukama.
- **NEMOJTE** vući kabel za napajanje ili sam aparat kako biste uklonili utikač iz utičnice.
- **NE** uranjajte kabel napajanja i daljinski upravljač.
- Uvijek isključite aparat iz mreže prije čišćenja ili održavanja i kada se uređaj ne koristi.
- U slučaju kvara ili neispravnog rada uređaja, isključite ga i ne dirajte ga. Ako

je potrebno popraviti uređaj, obratite se ovlaštenom servisu.

- Ako je mrežni kabel oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar kako bi se spriječili svi rizici.
- Uređaj se mora koristiti samo s onim vrstama upravljanja koje su označene na naljepnici.
- NE postavljajte daljinski upravljač (1) ili kabel za napajanje ispod ili iznad grijača kad je aparat uključen.
- NE upotrebljavajte presavijeni uređaj.
- Prije skladištenja, ostavite da se aparat ohladi prije nego što ga preklopите.
- NE ostavljajte tkaninu unutar uređaja ako je presavijen.
- Uređaj često pregledavajte kako biste provjerili ima li oštećenja i istrošenosti. Ako se pronađu takvi znakovi ili ako se aparat nepravilno koristi, prije nastavka upotrebe kontaktirajte ovlašteni centar za tehničku pomoć.
- Osobe s pejsmejkerima ne smiju koristiti uređaj.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za medicinsku upotrebu u bolnicama.
- **NE** upotrebljavajte aparat ako je mokar ili na mjestima s visokom vlagom (npr. kupaonica).
- **NE** upotrebljavajte uređaj za grijanje životinja.
- **NE** ostavljajte aparat da radi dok spavate.
- Ako se uređaj koristi dulje vrijeme, selektor treba postaviti na razinu 2-1 (minimalna toplina).
- **NE** upotrebljavajte uređaj na natečenim ili bolnim dijelovima tijela.
- Odmah isključite uređaj ako osjetite bol tijekom uporabe.
- **NE** upotrebljavajte uređaj ako u zraku postoje lako zapaljivi plinovi.
- **NIKADA** ne upotrebljavajte uređaj u blizini izvora plina.
- **NE** stavljajte na uređaj zapaljive materijale ili materijale koji se lako razgrađuju zbog vrućine (npr. karton, plastika, papir, svijeće).
- **NIKADA** ne izlažite uređaj drugim toplinskim izvorima (poput plamenika ili peći na nižim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, vlazi).
- **NE UBACUJTE OŠTRE PREDMETE.**
- Dugotrajno nanošenje uređaja na visokoj temperaturi može spaliti kožu.


UPOZORENJE!

U slučaju nepravilne uporabe, postoji rizik od mogućih ozljeda.

3. SIMBOLI

-  Šifra proizvoda
-  Mjesec i godina proizvodnje
-  CE oznaka
-  Upute za uporabu
-  Raspolaganje
-  Klasa izolacije II

4. OPĆI OPIS

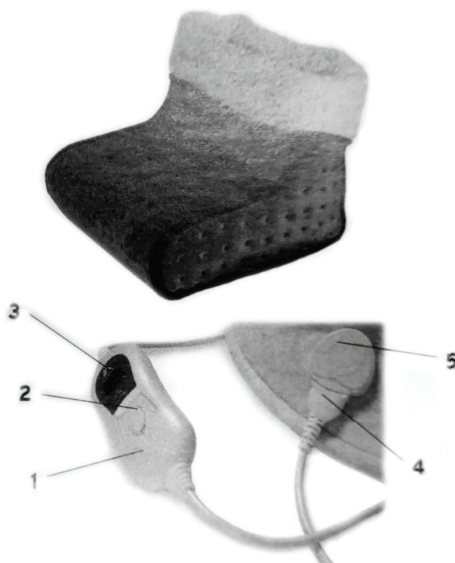

GLAVNE KOMPONENTE

1. Daljinsko upravljanje
2. Selektor temperature
3. Prikaz
4. Konektor
5. Baza konektora

5. UPUTE ZA UPORABU

Električni grijač za noge dizajniran je za zagrijavanje ljudskog tijela. Omogućuje ciljanu primjenu topline.

PAŽNJA!

Električni grijač za noge se može koristiti samo uz isporučeni regulator. Relativni model naveden je na naljepnici pričvršćenoj na grijaču.

- Umetnite konektor (4) u bazu konektora (5) za spajanje selektora temperature na grijaču.
- Umetnite utikač u utičnicu i odaberite temperaturu.
- Postavite grijač na stopala.

5.1 Funkcija automatskog isključivanja

- Električni grijač za noge opremljen je sustavom za automatsko isključivanje. Nakon 90 minuta rada automatski se isključuje.

- Da biste uređaj ponovo uključili, postavite regulator temperature u položaj «0», pričekajte nekoliko sekundi, a zatim još jednom odaberite željenu temperaturu.

5.2 Isključivanje

- Isključite grijaču ploču postavljanjem izbornika temperature u položaj «0».
- Izvucite utikač iz utičnice.

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

-  Ne koristite izbjeljivač
-  Ručno pranje na temperaturi do 30 °C
-  Nemojte kemijski čistiti
-  Ne sušite grijač u sušilici
-  Ne peglati

- Prije čišćenja provjerite da grijač nije spojen na električni kabel i da je hladna.
- Prije čišćenja provjerite je li priključni kabel odspojen.
- Električni grijač za noge može se prati ručno (NE KORISTITE STROJ ZA PRANJE) na temperaturi do 30 °C.
- Koristite neutralno sredstvo za čišćenje.
- NE upotrebljavajte izbjeljivač.
- NE sušite u sušilici, ostavite grijač na zraku. NE postavljajte na radijatore ili druge sustave grijanja.
- NE glačajte.
- Prije ponovne upotrebe osigurajte da se jastučić za grijanje potpuno osušio.
- Tijekom čišćenja ne koristite kemijske ili abrazivne proizvode.

7. OPĆI UVJETI ZA ODLAGANJE



Proizvod je pakiran u materijale koji se mogu reciklirati. Odložite je u skladu sa standardima zaštite okoliša.



Proizvod se mora zbrinuti na odgovarajući način, u skladu s europskom oznakom 2002/96 / EC. Materijal koji se može reciklirati sadrži u uređaju  mora biti uklonjen kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša. Za daljnje informacije obratite se lokalnom tijelu za odlaganje ili prodavaču uređaja.

8. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- mjere 30 x 30 x 24 cm
- Snaga 100 W
- Napon 240 - 220 V
- Materijal 100% poliester

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PAŽNJA!

Ako električni uređaj ne radi ispravno i neispravan je, nemojte ga pokušavati popraviti sami.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RIJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Uređaj ne prima izvor napajanja.	Provjerite je li: a. kabel za napajanje spojen na priključnu utičnicu; b. utikač umetnut u utičnicu; c. utičnica neispravna; d. osigurač vašeg mrežnog priključka aktiviran.
	Bilo koja temperatura je odabrana. Selektor temperature je u položaju 0.	Pomaknite regulator temperature u položaj 1, 2 ili 3.
	Aktivirana je zaštita od pregrijavanja.	Uređaj mora provjeriti proizvođač.

10. GARANCIJA

Svaki Moretti proizvod ima garanciju 2 (dvije) GODINE od datuma kupnje, osim dolje navedenih ograničenja. Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju štete uzrokovane nepravilnom uporabom, zlouporabom, promjenama proizvoda ili bilo kojom drugom uporabom koja nije u skladu s korisničkim priručnikom.

Pravilna upotreba proizvoda navedena je u korisničkom priručniku. Moretti S.p.A. neće biti odgovoran za bilo kakve štete ili osobne ozljede uslijed nepravilnog sklapanja / nepravilne uporabe uređaja, nije u skladu s korisničkim priručnikom.

Moretti ne garantira svoje proizvode protiv oštećenja ili grešaka u sljedećim slučajevima: prirodne katastrofe, neovlašteno održavanje ili popravci, štete uzrokovane problemima u opskrbi električnom energijom (ako su predviđeni), upotreba dijelova ili komponenata koje Moretti ne osigurava, neuspjeh u ispunjavanju smjernica i upute za uporabu, neovlaštene preinake, oštećenja uslijed transporta (različita od originalne isporuke Moretti) ili neuspjeh u održavanju uređaja kako je navedeno u priručniku.

Jamstvo ne pokriva sastavne dijelove koji se istroše ako oštećenje nastaje zbog uobičajene uporabe proizvoda.

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje HR-10437

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr