



# DIGITALNI ALKOTESTER

MODEL: MM1707



## UPUTE ZA KORIŠTENJE


U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)


Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

**I.**

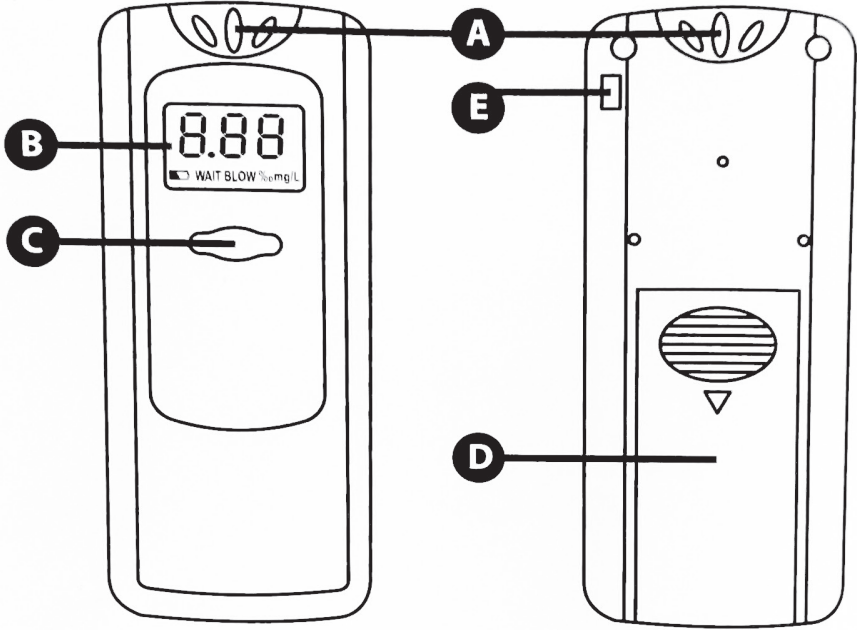

**II.**

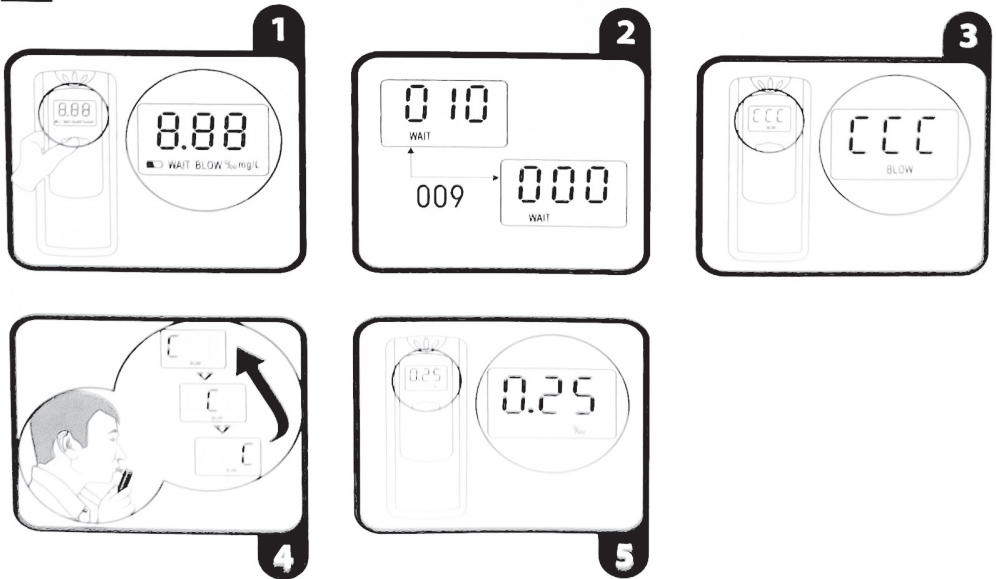

## Upute za uporabu

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Uvjerite se da kod promjene baterija pratite označeni polaritet.
- Ako je uređaj van uporabe duže vrijeme, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom uporabe.
- Ne dopuštajte djeci i neupučenim osobama uporabu uređaja.
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu opisanu u Upustu za korištenje.
- Prije čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja poklopca, isključite uređaj i izvadite baterije.
- Ne koristite abrazivna i kemijski agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcionira regularno, ako je pao sa visine, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tekućini. Uređaj odnesite na popravak ovlaštenom servisnom centru.
- Uređaj je pogodan isključivo za kućnu uporabu i nije predviđen za komercijalne svrhe.
- Držite uređaj podalje od izvora topline, kao što su radijatori, pećnice, itd. Ne izlažite uređaj direktno sunčevim zrakama ili vlazi.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ovaj proizvod je precizan mjerni uređaj. Štitite ga od lomljenja i pada.
- Ne popravljajte sami uređaj. Kontaktirajte autorizirani servis.

### NEPOŠTOVANJE PROIZVOĐAČEVIH UPUTSTAVA MOŽE DOVESTI DO ODBIJANJA JAMSTVA.

#### OPIS:

A: upuhni

B: LCD zaslon

C: gumb

D: držač baterije

E: držač remena za ruku

#### KORISTITI:

1 Uključiti

2 Čekaj!

3 spreman

4 Pušiti!

5 rezultat

### KORIŠTENJE:

• **Priprema:** Ako se uređaj nije koristio više od 2 tjedna mora biti kalibriran. Prije upotrebe upalite uređaj, pustite da se zagrije, ugasisite i ponovo ponovite proces.

• **Paljenje:** Pritisnite gumb na 2 sekunde, uređaj će početi odbrojavanje i prikazati «WAIT» na ekranu

• **Korištenje:** Kada završi odbrojavanje do nule, na ekranu će se prikazati «BLOW» i «C-C-C», otvorite usta i postavite alkotester između gornjih i donjih zubi kao na slici, duboko udahnite i pušite 3 sekunde i budite sigurni da pušete iz pluća, a ne iz usta.

• **Rezultat:** Prikazati će se rezultat nakon svjetljenja LCD-a

• **Gašenje:** Automatsko

### BATERIJE:

Koristite 2 alkalne AAA baterije, te ih promijenite kada se isprazne .

### OBAVIJESTI:

• Okruženje će utjecati na točnost testa, a test služi samo kao obavijest, te proizvođač preporučuje da ne vozite ako konzumirate alkohol.

• Za bolju točnost testirajte se 15 minuta nakon konzumiranja zadnjeg pića.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površina uređaja može se očistiti samo uporabom mokre krpe. Ne koristite deterdžent i gruba sredstva jer mogu oštetiti površinu uređaja!

**Nikada ne čistite uređaj pod tekućom vodom, nemojte ga prati i potapati u vodu!**

## **POPRAVAK I ODRŽAVANJE:**

Bilo kakav popravak ili održavanje, kojem je potreban dostup unutrašnjim dijelovima, mora se odraditi kod ovlaštenog i stručnog servisera.

## **JAMSTVO**

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

### **OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.**

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: .....

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr