

# INFRACRVENA LAMPA

**MODEL: MM3000**



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## **Uputa za uporabu INFRACRVENA LAMPA Model MM3000**

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

### **TEHNIČKI PODACI:**

- Voltaža: 230 V / 50 Hz
- Snaga: 100 W

### **PRIMJENA:**

Ova infracrvena lampa je namjenjena samo za zračenje ljudskog tijela. Infracrveno zračenje, raspon od 780 - 1400 nm, stvara toplinu koja se prenosi na ljudsko tijelo. Opskrba krvlju se povećava u zračenom području i povećava se brzina metabolizma u grijanom području. Infracrveno zračenje potiče tijelo na liječenjestoga se primjenjuje na određenim područjima tijela. Toplina potiče na bolju cirkulaciju krvi i limfne tekućine. Ove tekućine brže uklanjaju metabolične tvari i moguće toksične tvari te povećavaju opskrbu kisikom.

Infracrveno svjetlo se može koristiti kao dodatan tretman u liječenju bolesti ušiju, nosa i grla te pomaže u održavanju ljepote i njege lica, naročito kod nečiste kože.

Prije korištenja se savjetujte s obiteljskim liječnikom odgovara li ovaj tretman s medicinskog stajališta vama kao pacijentu.

### **UPOTREBA:**

Uklonite sav ambalažni materijal. Provjerite je li infracrvena žarulja pravilno uvrnuta. Uređaj držite na sigurno i ravnoj površini. Provjerite kabel od oštećenja. Kabel nikada ne smije doći u doticaj sa toplom električnom žaruljom. Udaljenost tretiranog područja tijela i infracrvene lampe ne bi trebala biti manja od 60 cm. Uvijek zatvorite oči za vrijeme zračenja! preporučeno trajanje tretmana je najviše 12 minuta. Lampu priključite na napajanje samo za vrijeme korištenja. Nakon završetka rada isključite je iz struje i ostavite da se ohladi. Za početak preporučamo da krenete sa kraćim vremenom zračenja. Međutim, neke osoba mogu pokazati preosjetljivost kože (npr. jako crvenilo, mjehurići, svrbež, jako znojenje) ili alergijsku reakciju na toplinsko zračenje iako je lampa korištena pravilno. Redovno pregledavajte ozračeno područje kože. Odmah prestanite sa zračenjem ako se pokažu znakovi preosjetljivosti ili alergijske reakcije te posjetite liječnika.

### **Upozorenje!**

Proizvod nije namjenjen osobama sa smanjenim psihičkim i mentalnim sposobnostima ili osobama bez iskustva ni poznavanja uređaja (što uključuje i djecu). Može se koristiti jedino uz nadgledanje i instrukcije osobe koja zna koristiti uređaj i odgovorna je za zdravlje osobe koja ga koristi. U slučaju da uređaj koriste djeca, nadgledanje odrasle osobe je nužno.

### **ČIŠĆENJE / ZAMJENA INFRACRVENE ŽARULJE:**

Prije svakog čišćenja i kod zamjene infracrvene žarulje, uređaj obavezno ugasite, isključite iz struje i pustite da se ohladi.

Uređaj čistite vlažnom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Voda ne smije ući u uređaj. Uređaj možete koristiti tek nakon što se u potpunosti osuši.

Kod zamjene, koristite samo originalne infracrvene žarulje.

Žarulje nisu uključene u jamstvo!

### **Važno!**

Sačuvajte za daljnje korištenje:

Detaljno pročitajte upute i čuvajte ih za buduću referencu drugim korisnicima.

Kućište lampe i infracrvena lampa za vrijeme rada postaju vrlo vruće. Stoga postoji opasnost od opekline ako se dotaknu. Uvijek ostavite lampu da se ohladi prije kontakta.

- Prije korištenja uklonite sav materijal od pakiranja.

- Kod korištenja lampe na licu, uvijek zatvorite oči kako bi izbjegli oštećenje očiju (ne gledajte direktno u infracrveno svjetlo).

- Osobe osjetljive na toplinu ne bi trebale koristiti lampu. Osjetljivost na toplinu se može smanjiti ili povećati u slijedećim slučajevima:

- kod dijabetičara
- kod osoba sa nesanicom, demencijom ili poteškoćama s koncentracijom
- kod kožnih bolesti ili osoba sa ožiljcima u području primjene lampe
- kod alergičara
- djece i starijih osoba
- nakon konzumacije lijekova ili alkohola
- U slučaju akutnih upalnih procesa, izlaganje zračenju se preporuča jedino uz konzultaciju sa liječnikom.
- Uvijek ograničite period korištenja i pratite reakcije na licu.
- Lijekovi, kozmetika ili hrana mogu uzrokovati preosjetljivost kože ili alergijsku reakciju pod određenim uvjetima. U ovom slučaju, odmah prekinite izlaganje zračenju.
- Ukoliko se uređaj koristi neprekidno, budite vrlo oprezni - nikada nemojte zaspati za vrijeme zračenja!
- Dugotrajno korištenje (duže od predviđenog) može izazvati opekline na koži.
- Ne dirajte infracrvenu lampu i ne pokušavajte je odvrnuti dok je priključena u struju.
- Djeca ne razumiju rizik korištenja električnih pomagala. Stoga pazite da djeca ne koriste uređaj bez odgovarajućeg nadzora.
- Uređaj se smije koristiti samo uz nadzor.
- Ne spremajte uređaj dok je još topao.
- Uvijek isključite kabel iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi prije dodirivanja.
- Držite zapaljive predmete na udaljenosti od barem 1,0 metra od infracrvene lampe. Ne vješajte lampu na zid ili strop.
- Ne dirajte uređaj mokrim rukama dok je spojen u struju; nikada ne prskajte uređaj vodom niti ga uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Rukujte suhim rukama.
- Zaštitite uređaj od udara i oštećenja.
- Ne isključujte priključnicu iz utičnice povlačenjem kabela.
- Ako se kabel ili kućište ošteti, kontaktirajte servis. Ne pokušavajte sami popraviti kvar.
- Uređaj ne upotrebljavajte vani. Koristite ga samo za njegovu svrhu.
- Žarulja nije uključena u jamstvo.
- U slučaju nepravilnog korištenja, krivog rukovanja ili nepravilnog popravka, proizvođač se ograničava od odgovornosti za nastalu štetu. Također, takvo djelovanje poništava jamstvo.
- Uređaj nije namjenjen za komercijalnu upotrebu.

## ZAŠTITA OKOLIŠA

Ambalažu i stari uređaj reciklirajte.  
Transportnu kutiju odložite kao sortirani otpad.  
Polietilenske vrećice reciklirajte.

## Recikliranje proizvoda na kraju njegovog radnog vijeka:

Simbol na proizvodu ili na ambalaži proizvoda prikazuje da se ovaj proizvod ne smije odložiti zajedno s kućnim otpadom. Proizvod se treba odložiti na namjenjenom mjestu u ovlaštenom odlagalištu za recikliranje takvog otpada. Vođenjem računa o pravilnom bacanju ovog uređaja, po moći ćete u zaštitu prirode i okoline od negativnih utjecaja za ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim bacanjem ovog proizvoda. O recikliranju možete saznati više od lokalnih vlasti, u servisu za odlaganje bačenih kućanskih uređaja ili kod prodavača ovog uređaja.

# JAMSTVO

Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi 2 godine od dana kupnje i odnosi se na elektronski sklop unutar uređaja. Uvoznik se obvezuje da će tijekom ovog razdoblja uređaj biti besplatno popravljn ili zamijenjen ukoliko kvar nije moguće otkloniti. Ovo jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem suprotnim uputama iz ovog priručnika ili ne ovlaštenim pokušajem popravka uređaja u jamstvenom roku. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

**OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA I NE POKRIVA ŽARULJU.**

DATUM KUPOVINE: .....

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:  
Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr