



## ANALOGNA VAGA



MODEL: MM5207

# UPUTE ZA KORIŠTENJE

### TEHNIČKI PARAMETRI:

Raspon vaganja: 200 kg

Koraci vaganja: 1 kg

Dimenzije: 320x70x430 mm

### UPUTE ZA UPORABU:

1. Postavite vagu na ravnu površinu. Tvrdna površina najbolja je za maksimalnu točnost. Postavljanje vage na vrlo mekani debeli tepih može utjecati na točnost vaganja.
2. Namjestite gumb ispod ruba platforme vage tako da brojčanik ili indikator očitavaju nulu.
3. Stanite i siđite sa vage i provjerite postavku "nula". Ako se pokazivač ne vrati na nulu, ponovite korak 2.
4. Stanite na vagu i mirujte. Postavite stopala na način koji će vam ravnomjerno rasporediti težinu po cijeloj platformi vage, čitajte težinu.

**BILJEŠKA!** Normalno je da vaša težina varira tijekom dana i iz dana u dan. Male promjene u vašoj težini općenito su normalne.

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih je nadzirala ili uputila osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali s vagom.
- Koristite proizvod samo za predviđenu namjenu navedenu u Uputama za uporabu.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu uporabu. Nije predviđen za komercijalnu uporabu.
- Proizvod je krhki mjerni uređaj. Pazite da vam ne padne.
- Nemojte sami popravljati uređaj. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

## JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom DVIJE (2) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: ..... PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA: .....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr  
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr  
Web: www.medicaldirect.hr