



DIGITALNA VAGA S ANALIZOM TJELESNE MASE - 7 FUNKCIJA

MODEL: MM5876



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Upute za uporabu

Osobna digitalna vaga s analizom tjelesne mase - 7 funkcija

Model MM5876

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prilikom umetanja i zamjene pazite na označeni polaritet baterija.
- Ako uređaj duže vrijeme neće biti u upotrebi, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se koristi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Proizvod koristite samo prema namjeni koja je navedena u Priručniku za uporabu.
- Jedinicu koristite samo na stabilnoj vodoravnoj površini.
- Prije čišćenja, montaže ili demontaže poklopca, isključite jedinicu i izvadite baterije!
- Za čišćenje uređaja ne koristite abrazivne ili kemijski agresivne tvari.
- Ne koristite jedinicu ako ne radi ispravno ili je pala, oštećena ili izložena bilo kojoj tekućini. Odnesite jedinicu u ovlašten servisni centar na ispitivanje i popravak.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu upotrebu. Nije predviđen za komercijalni rad.
- Uređaj držite podalje od izvora topline, kao što su radijatori, pećnice itd. Ne izlažite ga izravnom suncu ili vlazi.
- Ne dirajte jedinicu mokrim ili vlažnim rukama.
- Proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
- Proizvod je krhak mjerni uređaj. Sprječite ga da padne ili se razbije.
- Ne popravljajte aparat sami. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanjem jamstva.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Tehnički parametri	
Napon	2 kom 3V CR2032 litijske baterije
Raspon vaganja	2 - 180 kg
Razmaci vaganja	100 g
Starost	10 do 80 godina
Jedinice za vaganje	Kg, Oz, St:lb
Tjelesna visina	100 do 240 cm
Memorijska mjesta	za 10 osoba

KORIŠTENJE VAGE



1. Prije prve uporabe odstranite zaštitnu foliju ispod baterija.
2. Položite vagu na čvrstu, ravnu površinu (ne na tepih ili neku drugu meku površinu)
3. Uključite vagu "SET" gumbom, pričekajte nekoliko sekundi dok se na ekranu ne prikaže "0.0" ili stanite odmah na vagu ukoliko samo želite izmjeriti težinu.

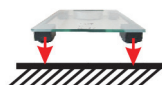

4. Odaberite jedinicu za vaganje (kg/st/lb) koristeći gumb "UNIT". On se nalazi na poleđini vage.
5. Pažljivo stanite na vagu. Težina treba biti pravilno raspoređena. Dok vaga mjeri budite mirni. Vaša težina biti će prikazana na ekranu u dva kratka intervala.
6. Nakon što siđete s vage ona će se automatski ugasiti nakon 10 sekundi.

7. Ako ne stanete na vagu nakon što se na ekranu prikaže "0.0" vaga će se automatski ugasi nakon 10 sekundi.

MJERENJE TJELESNE MASNOĆE

Kako bi rezultati mjerenja bili što točniji korisnik mora unijeti osobne podatke: godine, spol i visinu. Ova vaga ima mogućnost spremi podatke 10 korisnika. Tehnologija analize bioelektrične impedancije (BIA) koju ova vaga koristi tehnološki je naprednija od indeksa tjelesne mase (BMI) gdje se postotak masnoće računa koristeći samo težinu i visinu. BIA koristi 5 parametara za izračun postotka masnoće - godine, spol, visinu, težinu i biološki otpor. Na vagu morate stati bosi nakon što se na ekranu prikaže "0.0" tako da vam stopala dodiruju metalne elektrode. Prvo se zabilježu podataka o težini, a nakon toga na ekranu će se prikazati □ □ □ □ dok vaga analizira. Nemojte silaziti sa vage. Kada analiza završi vaga će dvaput prikazati težinu, tjelesnu masnoću, vodu, masu mišića, kostiju, KCAL i BMI prije nego se ugasi. Možete provjeriti rezultate sa tablicom ispod. Zbog prirodnih razlika između ljudi ova tablica služi samo kako referenca.

TABLICA OMJERA TJELESNE MASNOĆE				
DOB	ŽENE			
	nisko	normalno	povišeno	pretilo
<39	<21	21-33	33-39	39>
40-59	<23	23-35	35-40	40>
59>	<24	24-36	36-42	42>
DOB	MUŠKARCI			
	nisko	normalno	povišeno	pretilo
<39	<8	8-19	19-25	25>
40-59	<11	11-22	22-28	28>
59>	<13	13-25	25-30	30>

FUNKCIJA MEMORIJE

Nakon prikaza rezultata vaganja "M" će se pojaviti na displeju što znači da je zadnje izmjerena težina spremljena u memoriju. Ako ne trebate razliku u težini između novog i zadnjeg vaganja pritiskom na ON/OFF gumb dvaput brzo podatak iz memorije će biti obrisani. "M" će nestati sa ekrana. Odstranjivanje baterija također će obrisati memoriju.

OSTALE INFORMACIJE O PRIKAZU:

Ako se nakon uključivanja prikaže "LO" upozorenje, ili na zaslonu nema ničega, baterije su prazne i treba ih zamijeniti.

PROMIJENITE BATERIJU:

Otvorite držač baterije na stražnjoj strani vage i pažljivo izvadite bateriju pritiskom na malu ploču srebrne boje kako biste izvukli bateriju iz držača baterije. Zamijenite slabu bateriju novom baterijom. Staru bateriju treba odložiti na za to odgovarajuće mjesto.

BATERIJE NISU UKLJUČENE U JAMSTVO!

Ako se na zaslonu pojavi znak "ERR", to znači da je skala preopterećena, u ovom slučaju težina se mora smanjiti (preopterećenje može uzrokovati neispravnosti senzora). Kada ekran prikaže "ERR2", "ERRH" ili "ERRL" radi se o grešci u postotku tjelesne masnoće.

AUTOMATSKA IDENTIFIKACIJA RASPONA (2KG)

Ako ste zadnji puta dobro izmjerili tjelesnu masnoću, automatski će se zabilježiti korisnikova težina te kod sljedećeg mjerenja korisnik može odmah stati na vagu i mjeriti masnoću, nije potrebno ponovno unositi korisničke podatke. Stanite ravno na vagu i ona će prvo prikazati težinu, nakon čega će se na ekranu prikazati □ □ □ □ dok vaga analizira. Ako vaga identificira dva korisnika slične težine koristite ▲ i ▼ kako bi odabrali pravog korisnika. U slučaju da nema korisnika slične težine, ili razlika u težini nije veća od 2 kg, automatski će identificirati korisnika.

FUNKCIJA MJERENJA TEŽINE

Vaga ima nagazi funkciju ako niste unijeli podatke korisnika ili se trenutna težina razlikuje od prije zabilježene težine korisnika za više od 2 kg.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu jedinice smije se čistiti samo vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili tvrde predmete jer mogu oštetiti površinu jedinice!

Nikada ne čistite jedinicu pod tekućom vodom, ne ispirite ju i ne potapajte u vodu!

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Spako veće održavanje ili popravak koje zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti stručni servisni centar.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr