



DIGITALNA VAGA ZA BEBE

MODEL: MM6401



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Uputa za uporabu DIGITALNA VAGA ZA BEBE Model 6401

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prilikom umetanja i zamjene pazite da slijedite označeni polaritet baterija.
- Ako uređaj duže vrijeme neće biti u upotrebi, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se koristi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Proizvod koristite samo prema namjeni koja je navedena u Priručniku za uporabu.
- Jedinicu koristite samo na stabilnoj vodoravnoj površini.
- Prije čišćenja, montaže ili demontaže poklopca, isključite jedinicu i izvadite baterije!
- Za čišćenje uređaja ne koristite abrazivne ili kemijski agresivne tvari.
- Ne koristite jedinicu ako ne radi ispravno ili je pala, oštećena ili izložena bilo kojoj tekućini. Odnesite jedinicu u ovlašten servisni centar na ispitivanje i popravak.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu upotrebu. Nije predviđen za komercijalni rad.
- Uređaj držite podalje od izvora topline, kao što su radijatori, pećnice itd. Ne izlažite ga izravnom suncu ili vlazi.
- Ne dirajte jedinicu mokrim ili vlažnim rukama.
- Proizvod je krhak mjerni uređaj. Spriječite ga da padne ili se razbije.
- Ne popravljajte aparat sami. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Automatska funkcija čekanja
- Precizni mjerni sustav
- Funkcija prikaza težine
- Tare funkcija
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Indikator preopterećenja

Tehnički parametri	
Napon	2 kom 3V CR2032 litijske baterije
Raspon vaganja	20 kg
Razmaci vaganja	5 g
Jedinice za vaganje	Kg, Lb, St
Radna/skladišna temperatura	20 - 25 °C / 15 - 40 °C
Veličina zaslona	Promjer LCD-a = 8 cm

OPIS UREĐAJA:

1. Površina za vaganje
2. Gumb ON / OFF
3. Gumb UNIT
4. Gumb TARE
5. Prikaz



RADNI GUMBI:

- Vaga se može uključiti i isključiti pomoću tipke za uključivanje/isključivanje. (Pritisnite gumb jednom.)
- Pomoću gumba TARE možete koristiti funkciju tare. "0.00" se na zaslonu prikazuje 2 sekunde nakon pritiska na tipku.
- Gumb UNIT je prikladan za odabir potrebne mjerne jedinice, stvarna mjerna jedinica može se vidjeti na desnoj strani zaslona.

UPUTE ZA UPORABU:

1. Vaga uključuje litijeve zamjenske baterije. Prije uporabe obavezno zaštitite foliju za akumulator (Sl. 1).
2. Postavite mjernu jedinicu (kg-lb-st) pomoću gumba UNIT.
3. Postavite vagu na tvrdu, ravnu površinu. (Ne koristite ga na mekoj površini)
4. Pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje nakon uključivanja vage. Moli-mo pričekajte dok se ne prikaže "0,00" kg (Sl. 2).
5. Stavite dijete na vagu. Izmjerena težina bit će prikazana kroz nekoliko sekundi i automatski će se spremiti u memoriji. Kada na zaslonu postoji "M", tada se u memoriju pohranjuju informacije. Ne ostavljajte dijete bez nadzora na vagi.
6. Pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje nakon što se vaga isključuje. Vaga se automatski isključuje nakon 30 sekundi ako nije izvršeno nikakvo mjerenje.

Nakon sljedećeg mjerenja na zaslonu se prikazuje za 2 sekunde prebacivanje izmjerene težine i razlika na prethodno mjerenje. Zadnja izmjerena težina automatski se pohranjuje u memoriju.



Sl. 1



Sl. 2

MEMORIJA:

Ako je na ekranu "M", a skala je uključena, to znači da je posljednja izmjerena težina pohranjena u memoriji kako bi se mogla prikazati razlika u težini. Vaga je prikladna za mjerenje količine konzumiranog mlijeka, ako dijete vagate prije i nakon dojenja. Ako vam nije potrebna razlika u težini, tada se pritiskom na tipku Tare tijekom 3 sekunde memorija može izbrisati. "M" će nestati sa zaslona. Ako izvadite baterije, tada će se također izbrisati i memorija.

OBAVIJEST:

Temperatura može utjecati na mjerne podatke. Točno mjerenje može se izvršiti na sobnoj temperaturi (20 - 25 °C). Ako za mjerenje ne koristite samo vagu, nego u nju stavite i pokrivač ili jastuk, prije nego što izmjerite dijete, morate postaviti nulu gumbom Tare. Ako je težina ovog pribora manja od 5 kg, tada najveća izmjerena težina može biti 20 kg. Ako je njihova težina veća od 5 kg, tada najveća izmjerena težina može biti manja od 20 kg. Morate odbiti dodatnu masu od 20 kg i to će biti maksimalna izmjerljiva težina.

OSTALE INFORMACIJE O PRIKAZU:

Ako se nakon uključivanja prikaže "Lo" upozorenje (Sl. 3), ili na zaslonu nema ničega, baterija je ispražnjena i treba je zamijeniti.

Ako se na zaslonu pojavi znak "ERR" (Sl. 4.), to znači da je skala preopterećena, u ovom slučaju težina se mora smanjiti (preopterećenje može uzrokovati neispravnosti senzora).

Ako se na zaslonu pojavi poruka "OUT2" (Sl. 5.), to znači grešku senzora (nakon preopterećenja ili nakon naglog velikog dinamičkog opterećenja). U ovom slučaju, za proizvod nemamo nikakvu garancijsku odgovornost.



Sl. 3



Sl. 4



Sl. 5

PROMIJENITE BATERIJU:

Otvorite držač baterije na stražnjoj strani vage i pažljivo izvadite bateriju pritiskom na malu ploču srebrne boje kako biste izvukli bateriju iz držača baterije.

Zamijenite slabu bateriju novom baterijom. Staru bateriju treba odložiti na za to odgovarajuće mjesto.

BATERIJE NISU UKLJUČENE U GARANCIJI!

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površinu jedinice smije se čistiti samo vlažnom krpom. Ne koristite deterdžente ili tvrde predmete jer mogu oštetiti površinu jedinice!

Nikada ne čistite jedinicu pod tekućom vodom, ne ispirite ju i ne potapajte u vodu!

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Svako veće održavanje ili popravak koje zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti stručni servisni centar na okoliš i zdravlje ljudi koji bi u protivnom mogli nastati neprimjerenim odlaganjem ovog proizvoda.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr