



DIGITALNA VAGA ZA NOVOROĐENČAD I DJECU

MODEL: MM6477



UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

Uputa za uporabu DIGITALNA VAGA ZA BEBE

Model 6477

Hvala vam što ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ćete biti zadovoljni s našim proizvodom tijekom njegovog vijeka trajanja. Pažljivo proučite cijeli priručnik za uporabu prije nego što počnete koristiti proizvod. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu za buduće reference. Provjerite jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prilikom umetanja i zamjene pazite da slijedite označen polaritet baterija.
- Ako uređaj duže vrijeme neće biti u upotrebi, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se koristi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Proizvod koristite samo prema namjeni koja je navedena u Priručniku za uporabu.
- Jedinicu koristite samo na stabilnoj vodoravnoj površini.
- Prije čišćenja, montaže ili demontaže jedinicu i izvadite baterije!
- Za čišćenje uređaja ne koristite abrazivne ili kemijski agresivne tvari.
- Ne koristite jedinicu ako ne radi ispravno ili je pala, oštećena ili izložena bilo kojoj tekućini. Odnosite jedinicu u ovlašteni servisni centar na ispitivanje i popravak.
- Uređaj je prikladan samo za kućnu upotrebu. Nije predviđen za komercijalni rad.
- Uređaj držite podalje od izvora topline, kao što su radijatori, pećnice itd. Ne izlažite ga izravnom suncu ili vlazi.
- Ne dirajte jedinicu mokrim ili vlažnim rukama.
- Proizvod je krhak mjerni uređaj. Sprječite ga da padne ili se razbije.
- Ne popravljajte aparat sami. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Nepoštivanje uputa proizvođača može prouzrokovati odbijanje jamstva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:


- Automatska HOLD funkcija (automatsko spremanje rezultata vaganja)
- Precizni mjerni sustav sa 4 senzora
- Funkcija prikaza razlike težine od zadnjeg mjerenja
- Tare funkcija
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Indikator preopterećenja

Tehnički parametri

Napon	1 kom 3V CR2032 litijske baterije
Raspon vaganja	20 kg
Razmaci vaganja	10 g
Jedinice za vaganje	Kg, Lb, St
Radna/skladišna temperatura	20 - 25 °C / 15 - 40 °C
Veličina zaslona	Promjer LCD-a = 8 cm

OPIS UREĐAJA:

1. Površina za vaganje
2. Gumb ON / OFF
3. Gumb UNIT
4. Gumb TARE
5. Ekran

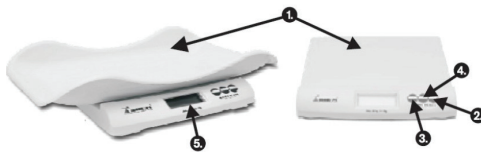

TIPIKE ZA UPRAVLJANJE UREĐAJEM:

1. Vagu uključite/isključite jednokratnim pritiskom na gumb ON/OFF.
2. Gumb TARE omogućava početak vaganja s 0. Po pritisku na taj gumb, za 1-2 sekunde na ekranu će ispis biti 0,00 kg. Npr., ako ne trebate prikazati razliku mjerenja, onda pritisnite gumb TARE na 3 sekunde i memorija će biti izbrisana.
3. Gumbom "Kg, Lb, St" lako izaberete između različitih jedinica mjere, trenutna mjernja jedinica je prikazana na desnoj strani ekrana.

UPUTE ZA UPORABU:

1. Vaga radi na 2 kom. zamjenjivih litijskih baterija. Odstranite zaštitnu foliju prije upotrebe.
2. Prije vaganja bebe, umetnite podlogu za vaganje, tako da stoji stabilno.
3. Nema potrebe za instaliranjem podloge ako se važe dijete.



4. Pritiskom na gumb ON/OFF jednom, "0,00" se prikazuje na ekranu.



5. Postavite bebu ili dijete na vagu. Izmjerena težina pojavit će se na ekranu za nekoliko sekundi, i pohraniti u memoriju automatski. Na ekranu se prikazuje "M" koji označava prisutnost podataka u memoriji. Nakon sljedećeg vaganja na zaslonu će se prikazati izmjerena težina i razlika između izmjerene težine i prethodne težine za 2 sekunde. Zadnja izmjerena težina automatski se pohranjuje u memoriju u slučaju ručnog i automatskog isključivanja.

6. Pritiskom na gumb ON/OFF jednokratno, vaga se gasi. Ako se vaga ne koristi duže od 30 sekundi, automatski se isključuje.

MEMORIJA:

Nakon uključivanja vage, prikazuje se "M" što znači da je zadnja izmjerena težina pohranjena u memoriji, tako da se može prikazati "0,00" i maksimalno mjerenje će biti 20 kg. Ako dodate težinu veću od 5 kg, nakon pritiska na tipku TARE ekran će prikazati "0,00" ali će maksimalna težina biti manja od 20 kg. Točnije 20 kg minus dodana težina.

FUNKCIJA TARE:

Ako koristite dodatnu težinu na podlozi za vaganje (dekica, jastuk...) lakšu od 5 kg, nakon pritiska na tipku TARE ekran će prikazati "0,00" i maksimalno mjerenje će biti 20 kg. Ako dodate težinu veću od 5 kg, nakon pritiska na tipku TARE ekran će prikazati "0,00" ali će maksimalna težina biti manja od 20 kg. Točnije 20 kg minus dodana težina.

DRUGE INFORMACIJE NA ZASLONU:

Ako se na zaslonu uređaja pojavi oznaka upozorenja "Lo" ili se zaslon ne uključi, potrebno je promijeniti bateriju.



Otvorite pokrov pretinca za baterije na poledini vage i pažljivo uklonite bateriju laganim pritiskom malog srebrnog držača baterije. Zamijenite dotrajalu bateriju novom. Staru i dotrajalu bateriju odložite shodno lokalnoj regulativi o zbrinjavanju otpada.

BATERIJE NE PODLIJEŽU JAMSTVU!

Ako dođe do preopterećenja vage, pojavit će se sljedeća oznaka i težina mora biti smanjena. Ako se na zaslonu prikaže poruka "OUT2" znači da je došlo do greške na senzoru (nakon preopterećenja vage ili naglog opterećivanja). U tom slučaju kvar ne podliježe jamstvu.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površina uređaja može se čistiti jedino mokrom krpom. Pri tome ne koristite nikakva sredstva za pranje ili tvrde predmete kako ne biste oštetili površinu!

Nikad ne čistite vagu pod tekućom vodom, ne potapajte ju i ne ostavljajte ispod vode.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

Zaštitno pakiranje i zastarijeli uređaji trebaju biti reciklirani.

- Transportne kutije se mogu odložiti kao sortirani otpad.
- Polietilenske vreće potrebno je predati na reciklažu.

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Svako veće održavanje ili popravak koje zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora izvesti stručni servisni centar.

RECIKLIRANJE UREĐAJA NAKON NJEGOVA RADNOG VIJEKA:

Simbol na aparatu ili pakiranju označava da se uređaj ne smije odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Mora se odnijeti na mjesto sabiranja elektronskog otpada. Vodite računa o pravilnom odlaganju uređaja jer na taj način sprječavate negativne efekte zagađenja okoline i čovjekovog zdravlja. U lokalnoj upravi možete dobiti informaciju gdje odložiti ovaj tip otpada. Također se možete raspitati u trgovini gdje ste kupili uređaj o pravilnom odlaganju uređaja.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPOVINE:

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:.....

U slučaju reklamacija obratite se na:
Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr