

ŠTAP S ČETIRI NOGE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:


Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: QUATRO

1. Konstrukcija

Četveronožni štap izrađen je od anodiziranog aluminijskog okvira. Opremljen je ergonomskim ručkama, remenom za zapešće, mogućnošću podešavanja visine i bazom s četiri noge.

Elementi štapa:

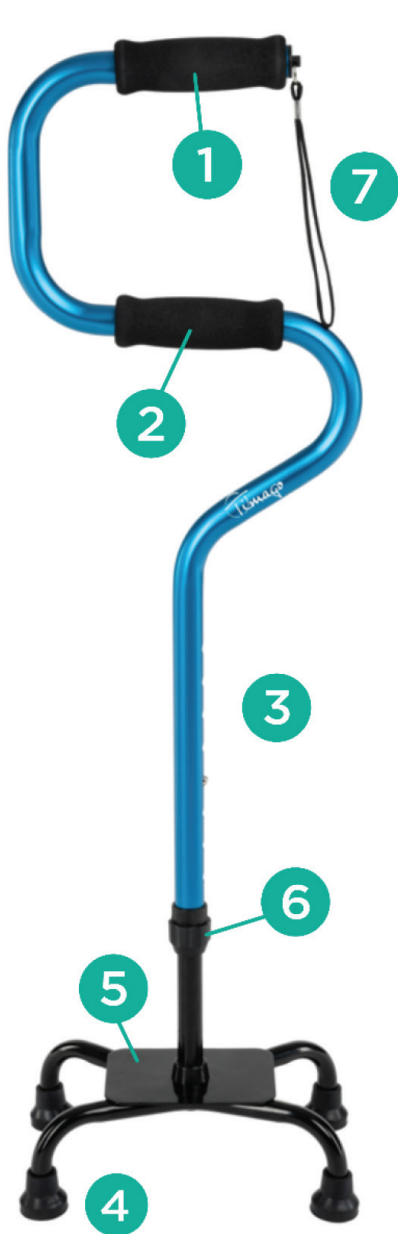

- 1 rukohvat
- 2 rukohvat za potporu
- 3 podešavanje visine
- 4 gumeni vrhovi
- 5 baza
- 6 zaključavanje podešavanja
- 7 traka za zapešće

2. Namjena

Četveronožni štap je pomoćno pomagalo dizajnirano za osobe s smanjenom pokretljivošću koje trebaju stabilnu potporu i pomoć pri hodanju. Također se preporučuje starijim osobama kao pomoć u održavanju ravnoteže. Dizajn s četiri noge pruža veću stabilnost u usporedbi s običnim štapovima. Dodatna ručka olakšava korisniku ustajanje, osiguravajući još bolju stabilnost.

3. Namještanje

- Za podešavanje četveronožnog štapa, odvrnite sigurnosni mehanizam i pritisnite blokirajući pin kako biste odabrali odgovarajuću visinu. Zatim ponovno zategnite sigurnosni mehanizam. Štap se podešava u koracima od 2,5 cm.
- Kako biste pravilno odredili duljinu štapa, stanite uspravno i savijte ruku u laktu pod kutom od 20°.
- Štap treba individualno prilagoditi korisniku tako da gornja ručka bude u visini zgloba kuka.

- Prije uporabe provjerite je li štap stabilan i je li sigurnosni mehanizam pravilno zategnut.

NAPOMENA! U slučaju nedoumice oko tehnike hodanja uz pomoć četveronožnog štapa, savjetujte se s osobom koja posjeduje odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnička specifikacija

Tip štapa	podesiv, sa sjedištem
Podešavanje visine	75-92 cm
Maks. kapacitet	136 kg
Težina	1 kg
Boja	crna

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje štapa, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje suprotno namjeni.

- Prije svake uporabe štapa provjerite da je sve u redu. Ne koristite štap ako se uoče kvarovi ili nedostaci.

6. Održavanje

Elemente štapa potrebno je redovito održavati:

- Sjedalo se može čistiti hladnom ili toplom vodom pomoću vlažne (ne mokre) krpe i bez upotrebe deterdženata. Teže mrlje treba očistiti spužvom.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, djelovanju vode ili vlage.

