



# TOALETNI STOLAC - PRINCEZA I SKLOPIVA TOALETNA KOLICA

MODEL: RC300-45 i RC320-43



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## 1. UVOD

Hvala vam što ste odabrali stolac MOPEDIA komoda tvrtke MORETTI S.p.A., dizajniranu za pomoć osobama koje imaju poteškoća u hodanju, evakuaciji i kretanju. Proizvod zadovoljava zahtjeve važećih europskih propisa o medicinskim proizvodima (2017/745). Ovaj korisnički priručnik sadrži neke prijedloge o pravilnom i sigurnom korištenju uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj cijeli priručnik prije korištenja uređaja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za odgovarajući savjet i pomoć.

## 2. OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE instalirati ili koristiti proizvod prije nego pročitate i razumijete ovaj priručnik s uputama. Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza i upute, obratite se zdravstvenom djelatniku, prodavaču ili tehničkom operateru prije nego što pokušate instalirati proizvod, kako biste izbjegli oštećenje ili osobne ozljede;
- Uvijek se obratite svom liječniku ili terapeutu za pravilnu upotrebu uređaja;
- Zapakirani proizvod držite podalje od izvora topline jer je pakiranje kartonsko;
- Životni vijek uređaja ovisi o istrošenosti nepopravljivih i/ili nezamjenjivih dijelova;
- Uvijek vodite računa kada su djeca prisutna;
- Nikada ne podižite stolac držeći dijelove koji se mogu odvojiti, jer bi se mogli slučajno odvojiti od nje tijekom podizanja.

## 3. OPĆI PRIKAZ DIJELOVA

### 3.1 RC300-45



1. Naslon za leđa
2. Preklopni nasloni za ruke
3. Sjedalo u obliku slova "U" s presvlakom
4. posuda za nuždu
5. Noge podesive po visini

### 3.2 RC320-43



1. Naslon za leđa
2. Preklopni nasloni za ruke
3. Sjedalo u obliku slova "U" s presvlakom
4. posuda za nuždu
5. Kotačiči (stražnji s parkirnom kočnicom)
6. Dodaci za podnožje

## 4. SASTAVLJANJE

### 4.1 Sastavljanje RC300-45

Proizvod se isporučuje rastavljen, slijedite dolje navedene korake za ispravno sastavljanje:

- Sastavite noge, pazeći da ih sve postavite na istu visinu i pričvrstite ih odgovarajućim c-kopčama (sl. 1);
- Uklonite sjedalo u obliku slova U iz kutije i sastavite ga na okvir (sl. 2);
- Uklonite kopče sa stražnje strane okvira i sastavite element naslona + naslona za ruke (sl.3), pazeći da naslone za ruke postavite prema donjoj strani proizvoda;
- Sada pričvrstite naslon pomoću c-kopči koje ste prethodno skinuli i podignite naslone za ruke kako biste ih zaključali (sl.4);




### 4.2 Sastavljanje RC320-43

Proizvod se isporučuje rastavljen, slijedite korake u nastavku za ispravno sastavljanje:

- Izvadite sklopivi okvir iz pakiranja i postavite ga, produžujući prečku, da formira kvadrat (sl. 6);
- Koristite sjedalo za zaključavanje sklopnog okvira (sl. 7);
- Uklonite C-kopče sa stražnje strane okvira i sastavite element naslona + naslona za ruke (sl.3), pazeći da naslone za ruke postavite prema donjoj strani proizvoda;
- Sada pričvrstite naslon pomoću kopči koje ste prethodno skinuli i podignite naslone za ruke kako biste ih zaključali (sl.4);
- Sastavite oslonce za noge (sl. 5);
- Dovršite montažu proizvoda postavljanjem kante (sl. 8);

### 4.3 Podešavanje nogara (RC320-43)

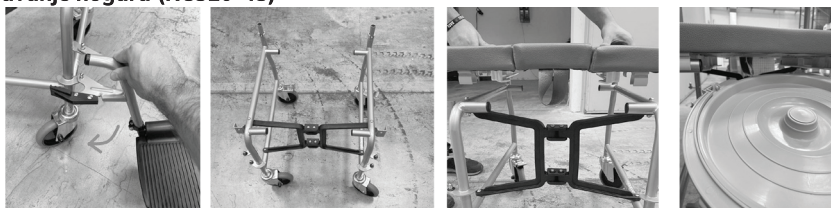

Moguće je podesiti visinu nogara na stolcu, kako bi se pacijentu pružila najveća udobnost. Upotrijebite gumbe sa strane same ploče za noge da biste je prilagodili.

Pritisnite gumb i pomaknite cijev na idealnu visinu. Uvijek provjerite jesu li dvije nogare na istoj visini na kraju.

### 4.4 Rastavljanje

Slijedite postupak sastavljanja obrnutim redom.

## 5. PRIJE SVAKE UPOTREBE

- Provjerite ispravnost montaže uređaja.
- Uvijek provjerite istrošenost pokretnih mehaničkih dijelova, kako biste bili sigurni da se uređaj može koristiti uz potpunu sigurnost za ljude i imovinu.
- Provjerite ispravnost kočnica na stražnjim kotačima (samo za model s kotačima). Umetnite kočnice na oba kotača, lagano gurnite stolac naprijed-nazad: kotači se ne bi trebali pomicati.

## 6. UPOZORENJA PRI UPORABI

- Stolec je samo za unutarnju upotrebu i nije namijenjen za drugo;
- Uvijek i samo koristite stražnju polugu za guranje stolice i nikada je ne gurajte pomoću drugih dijelova (samo za model s kotačima);
- Budite posebno oprezni ako se stolec koristi na kosoj površini;


- Izbjegavajte nagle pokrete ako je potrebno zaustaviti se na kosoj površini;
- Ako dvije osobe podižu stolac, izbjegavajte hvatanje na mjestima koja bi mogla biti opasna za pacijenta, kao što su ploče za noge i nasloni za ruke, i koristite samo okvir i stražnje ručke;
- Preporučljivo je čuvati proizvod dalje od izvora topline, jer bi određeni dijelovi, poput presvlake naslona za leđa i sjedala, ručki za guranje i naslona za ruke, ako bi bili izloženi sunčevoj svjetlosti, mogli dosegnuti temperature koje bi mogle oštetiti kožu.

### 6.1 Kočnice

Zaključajte kotače stolca prije ulaska, izlaska, naginjanja naprijed. Kočnice se aktiviraju pritiskom poluge na svakom kotaču stolca.

### 6.2 Kotači

Povremeno provjeravajte kotače i po potrebi ih podmažite.

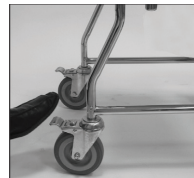

## 7. KAKO KORISTITI

Napomena: pogledajte opća upozorenja i korisničke upute u ovom priručniku

### 7.1 Sjedenje na stolac

1. Približite se stolcu što je više moguće, tako da bude postavljen uz vas
2. Zaključajte kočnice na prednjim kotačima (samo za model s kotačima); da biste lakše ušli u stolac, podignite naslon za ruke na strani na kojoj se izvode te radnje.
3. Oslonite svoju težinu na strukturu okvira pomoću ruku i polako se spustite u sjedalo

### 7.2 Ustajanje sa stolca

- 1. Približite se što bliže drugom sjedalu
- 2. Zaključajte kočnice na prednjim kotačima (samo za model s kotačima); da biste lakše ustali iz stolca, uklonite naslon za ruke na strani na kojoj se izvode te radnje.
- 3. Oslonite se rukama na okvir stolca u koji ulazite, podignite se i polako kliznite prema njemu

## 8. NJEGA I ODRŽAVANJE

Vaš stolac zahtijeva minimalnu brigu i održavanje. Sljedeći dijelovi zahtijevaju pregled i/ili njegu i održavanje.

### 8.1 Čišćenje presvlaka i podstava

Navlake i podstava izrađeni su od PVC-a. Očistite ih vodom i blagim sapunom.

### 8.2 Čišćenje toaletne posude

Redovito čistite i dezinficirajte WC koristeći uobičajeno sredstvo za dezinfekciju kupaoonice. Uvijek očistite barem prije svake uporabe.

### 8.3 Čišćenje okvira i metalnih dijelova

Koristite vodu i neutralni sapun i za okvir i metalne dijelove, zatim osušite mekom krpom kako biste izbjegli ogrebanje boje okvira.

### 8.4 Čišćenje kotača (samo za model s kotačima)

Koristite vodu i neutralni sapun za čišćenje kotača. Budite izuzetno oprezni pri sušenju, jer korištenje stolca s vlažnim kotačima može biti vrlo opasno.

### 8.5 Dezinfekcija

Koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju ako trebate dezinficirati proizvod. 4

**NAPOMENA:** Nikada ne koristite proizvode s kiselinama, lužinama ili otapalima, poput acetona ili razrjeđivača.

## 9. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

RC300-45	62	53	43	96,5-103,5	73,5-81,5	51,5-59,5	-	48	45	55	11,5	12,5	12,5	120
RC320-43	87,5	62,5	43	96,5	74,5	52,5	30-38	43	45	52,5	12,5	12,5	12,5	120