

TOALETNI STOLAC - PRINCEZA I SKLOPIVA TOALETNA KOLICA



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

**SKU: RC300-45 i
RC320-43**

1. UVOD

Hvala vam što ste odabrali stolac MOPEDIA komoda tvrtke MORETTI S.p.A., dizajniranu za pomoć osobama koje imaju poteškoća u hodanju, evakuaciji i kretanju. Proizvod zadovoljava zahtjeve važećih europskih propisa o medicinskim proizvodima (2017/745). Ovaj korisnički priručnik sadrži neke prijedloge o pravilnom i sigurnom korištenju uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj cijeli priručnik prije korištenja uređaja. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za odgovarajući savjet i pomoć.

2. OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE instalirati ili koristiti proizvod prije nego pročitate i razumijete ovaj priručnik s uputama. Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza i upute, obratite se zdravstvenom djelatniku, prodavaču ili tehničkom operateru prije nego što pokušate instalirati proizvod, kako biste izbjegli oštećenje ili osobne ozljede;
- Uvijek se obratite svom liječniku ili terapeutu za pravilnu upotrebu uređaja;
- Zapakirani proizvod držite podalje od izvora topline jer je pakiranje kartonsko;
- Životni vijek uređaja ovisi o istrošenosti nepopravljivih i/ili nezamjenjivih dijelova;
- Uvijek vodite računa kada su djeca prisutna;
- Nikada ne podižite stolac držeći dijelove koji se mogu odvojiti, jer bi se mogli slučajno odvojiti od nje tijekom podizanja.

3. OPĆI PRIKAZ DIJELOVA

3.1 RC300-45



1. Naslon za leđa
2. Preklopni nasloni za ruke
3. Sjedalo u obliku slova "U" s presvlakom
4. posuda za nuždu
5. Noge podesive po visini

3.2 RC320-43



1. Naslon za leđa
2. Preklopni nasloni za ruke
3. Sjedalo u obliku slova "U" s presvlakom
4. posuda za nuždu
5. Kotačiči (stražnji s parkirnom kočnicom)
6. Dodaci za podnožje

4. SASTAVLJANJE

4.1 Sastavljanje RC300-45

Proizvod se isporučuje rastavljen, slijedite dolje navedene korake za ispravno sastavljanje:

- Sastavite noge, pazеći da ih sve postavite na istu visinu i pričvrstite ih odgovarajućim c-kopčama (sl. 1);
- Uklonite sjedalo u obliku slova U iz kutije i sastavite ga na okvir (sl. 2);
- Uklonite kopče sa stražnje strane okvira i sastavite element naslona + naslona za ruke (sl.3), pazеći da naslone za ruke postavite prema donjoj strani proizvoda;
- Sada pričvrstite naslon pomoću c-kopči koje ste prethodno skinuli i podignite naslone za ruke kako biste ih zaključali (sl.4);




4.2 Sastavljanje RC320-43

Proizvod se isporučuje rastavljen, slijedite korake u nastavku za ispravno sastavljanje:

- Izvadite sklopivi okvir iz pakiranja i postavite ga, produžujući prečku, da formira kvadrat (sl. 6);
- Koristite sjedalo za zaključavanje sklopnog okvira (sl. 7);
- Uklonite C-kopče sa stražnje strane okvira i sastavite element naslona + naslona za ruke (sl.3), pazеći da naslone za ruke postavite prema donjoj strani proizvoda;
- Sada pričvrstite naslon pomoću kopči koje ste prethodno skinuli i podignite naslone za ruke kako biste ih zaključali (sl.4);
- Sastavite oslonce za noge (sl. 5);
- Dovršite montažu proizvoda postavljanjem kante (sl. 8);

4.3 Podešavanje nogara (RC320-43)

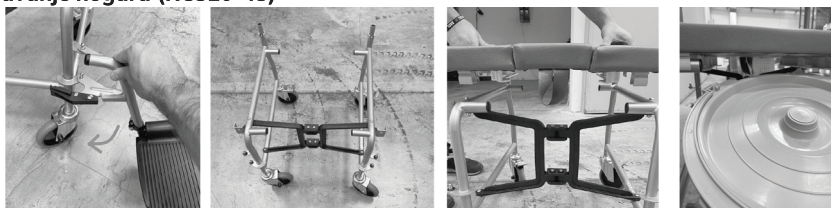

Moguće je podesiti visinu nogara na stolcu, kako bi se pacijentu pružila najveća udobnost. Upotrijebite gumbе sa strane same ploče za noge da biste je prilagodili.

Pritisnite gumb i pomaknite cijev na idealnu visinu. Uvijek provjerite jesu li dvije nogare na istoj visini na kraju.

4.4 Rastavljanje

Slijedite postupak sastavljanja obrnutim redom.

5. PRIJE SVAKE UPOTREBE

- Provjerite ispravnost montaže uređaja.
- Uvijek provjerite istrošenost pokretnih mehaničkih dijelova, kako biste bili sigurni da se uređaj može koristiti uz potpunu sigurnost za ljude i imovinu.
- Provjerite ispravnost kočnica na stražnjim kotačima (samo za model s kotačima). Umetnite kočnice na oba kotača, lagano gurnite stolac naprijed-nazad: kotači se ne bi trebali pomicati.

6. UPOZORENJA PRI UPORABI

- Stolec je samo za unutarnju upotrebu i nije namijenjen za drugo;
- Uvijek i samo koristite stražnju polugu za guranje stolice i nikada je ne gurajte pomoću drugih dijelova (samo za model s kotačima);
- Budite posebno oprezni ako se stolec koristi na kosoj površini;


- Izbjegavajte nagle pokrete ako je potrebno zaustaviti se na kosoj površini;
- Ako dvije osobe podižu stolac, izbjegavajte hvatanje na mjestima koja bi mogla biti opasna za pacijenta, kao što su ploče za noge i nasloni za ruke, i koristite samo okvir i stražnje ručke;
- Preporučljivo je čuvati proizvod dalje od izvora topline, jer bi određeni dijelovi, poput presvlake naslona za leđa i sjedala, ručki za guranje i naslona za ruke, ako bi bili izloženi sunčevoj svjetlosti, mogli dosegnuti temperature koje bi mogle oštetiti kožu.

6.1 Kočnice

Zaključajte kotače stolca prije ulaska, izlaska, naginjanja naprijed. Kočnice se aktiviraju pritiskom poluge na svakom kotaču stolca.

6.2 Kotači

Povremeno provjeravajte kotače i po potrebi ih podmažite.

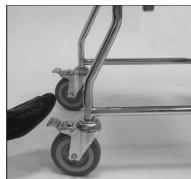

7. KAKO KORISTITI

Napomena: pogledajte opća upozorenja i korisničke upute u ovom priručniku

7.1 Sjedenje na stolac

1. Približite se stolcu što je više moguće, tako da bude postavljen uz vas
2. Zaključajte kočnice na prednjim kotačima (samo za model s kotačima); da biste lakše ušli u stolac, podignite naslon za ruke na strani na kojoj se izvode te radnje.
3. Oslonite svoju težinu na strukturu okvira pomoću ruku i polako se spustite u sjedalo

7.2 Ustajanje sa stolca

- 1. Približite se što bliže drugom sjedalu
- 2. Zaključajte kočnice na prednjim kotačima (samo za model s kotačima); da biste lakše ustali iz stolca, uklonite naslon za ruke na strani na kojoj se izvode te radnje.
- 3. Oslonite se rukama na okvir stolca u koji ulazite, podignite se i polako kliznite prema njemu

8. NJEGA I ODRŽAVANJE

Vaš stolac zahtijeva minimalnu brigu i održavanje. Sljedeći dijelovi zahtijevaju pregled i/ili njegu i održavanje.

8.1 Čišćenje presvlaka i podstava

Navlake i podstava izrađeni su od PVC-a. Očistite ih vodom i blagim sapunom.

8.2 Čišćenje toaletne posude

Redovito čistite i dezinficirajte WC koristeći uobičajeno sredstvo za dezinfekciju kupaoonice. Uvijek očistite barem prije svake uporabe.

8.3 Čišćenje okvira i metalnih dijelova

Koristite vodu i neutralni sapun i za okvir i metalne dijelove, zatim osušite mekom krpom kako biste izbjegli ogrebanje boje okvira.

8.4 Čišćenje kotača (samo za model s kotačima)















Koristite vodu i neutralni sapun za čišćenje kotača. Budite izuzetno oprezni pri sušenju, jer korištenje stolca s vlažnim kotačima može biti vrlo opasno.

8.5 Dezinfekcija

Koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju ako trebate dezinficirati proizvod. 4

NAPOMENA: Nikada ne koristite proizvode s kiselinama, lužinama ili otapalima, poput acetona ili razrjeđivača.

9. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

														
RC300-45	62	53	43	96,5-103,5	73,5-81,5	51,5-59,5	-	48	45	55	11,5	12,5	12,5	120
RC320-43	87,5	62,5	43	96,5	74,5	52,5	30-38	43	45	52,5	12,5	12,5	12,5	120