

ŠTAP OTVORENE DRŠKE ZA PRETILE OSOBE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: RH150 i RH720

NAMJENA

Štap za hodanje MOPEDIA i štap s 4 noge pomagala su kojima se rukuje jednom rukom prilagođena za podršku i/ili pomoć pri kretanju osoba s poteškoćama u kretanju.

OPĆA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte cijeli priručnik prije uporabe uređaja.

- Posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom kako biste utvrdili točnu prilagodbu i ispravnu upotrebu proizvoda.
- Provjerite je li proizvod isporučen kompletan i držite ga zapakiranog dalje od izvora topline.
- Granica upotrebe uređaja određena je istrošenošću dijelova.
- Ne dopustite djeci da se igraju ili rukuju uređajem.

OPĆI OPIS

RH150

Štap za hodanje RH150 izrađen je od čelika i karakterizira ga otvorena ručka otvorena u PVC-u i široki protuklizni gumeni vrh. Podesiva visina na svakih 2,5 cm. Štap olakšava boravak u uspravnom položaju i put. Stabilizira osobu kod problema s ravnotežom i podržava je kod problema sa snagom.

RH720


Štap s 4 noge izrađen je od čelika i karakterizira ga otvorena ručka od PVC-a i protuklizni gumeni vrhovi. Visina podesiva po visini svakih 2,5 cm. Koristan je za olakšavanje stojećeg položaja korisnika. Stabilizira osobu kod problema s ravnotežom i podržava je kod problema sa snagom.

KAKO KORISTITI

Upotreba štapa za hodanje i četveronožnog štapa razlikuje se od slučaja do slučaja. Iz tog razloga potrebna vam je minimalna obuka od strane kvalificiranog osoblja s obzirom na informacije o vrsti stepenice ili vrsti potpore. Ako je tijekom njege bolesnika potrebno asistent se nalazi na boku tijela koji je slabiji i bolesniji.

Podešavanje visine za RH150

Za podešavanje visine štapa:

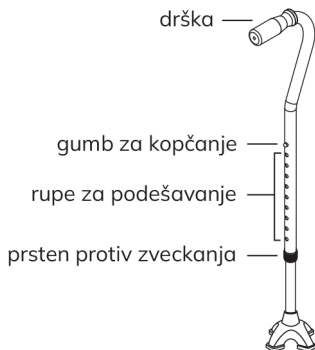


- Okrenite prsten protiv zveckanja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga olabavili;

- Pritisnite gumb za kopčanje;
- Gurnite nastavke prema gore ili dolje dok gumb za kopčanje ne strši kroz rupu za podešavanje na kraju ručke štapa (čut će se "klik" kada gumb za kopčanje sigurno strši kroz rupu za podešavanje);
- Zategnite prsten protiv zveckanja u smjeru kazaljke na satu.

Podešavanje visine za RH720

Za podešavanje visine štapa s 4 noge slijedite upute u nastavku:

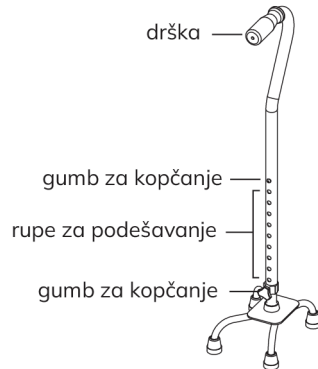

- Otpustite gumb za zaključavanje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu;
- Pritisnite gumb za kopčanje;
- Gurnite nastavke prema gore ili dolje dok gumb za kopčanje ne strši kroz otvor za podešavanje na kraju ručke štapa (čut će se "klik" kada gumb za kopčanje sigurno strši kroz otvor za podešavanje);
- Zategnite gumb za zaključavanje okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Podešavanje štapa za korištenje desnom ili lijevom rukom

Za podešavanje strane korištenja štapa udesno ili ulijevo potrebno je:

- Otpustite prsten za zaključavanje;
- Pritisnite gumb za kopčanje i okrenite ručku štapa za 180 stupnjeva dok se gumb ne zaključa u istu rupu za podešavanje visine na drugoj strani štapa;
- Kada je ručka štapa čvrsto postavljena na željenu visinu i gumb za kopčanje strši kroz otvor za podešavanje visine na ručki štapa, okrenite prsten za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu kako biste ga učvrstili.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Čišćenje

Koristite samo vlažnu krpu i neutralni sapun. Zatim dobro osušiti prije upotrebe.

Dezinfekcija

Ako je potrebno dezinficirati proizvod, koristite uobičajeni neutralni deterdžent za dezinfekciju.