



# TOALETNI STOLAC ZA PRETILE OSOBE

MODEL: RH780



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## 1. UVOD

Zahvaljujemo što ste kupili proizvode za tuširanje Moretti. Ovaj korisnički priručnik daje neke prijedloge kako ispravno koristiti proizvod koji ste odabrali i daje neke vrijedne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za savjet i pomoć. U slučaju nedoumica, preporučamo da kontaktirate trgovca koji vam može pomoći i dati odgovarajući savjet.

## 2. OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod ili bilo koju dostupnu dodatnu opremu bez prethodnog potpunog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama. Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se zdravstvenom radniku, trgovcu ili tehničkom osoblju prije nego što pokušate koristiti ovu opremu, inače može doći do ozljeda ili štete.
- Držite stolac za tuširanje dalje od izvora topline.
- Granica uporabe proizvoda određena je istrošenošću dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili rukuju stolcem za tuširanje.

## 3. OPĆI PRIKAZ DIJELOVA

Čelična konstrukcija sa sjedištem i naslonom od HDPE. PE nasloni za ruke s mogućnošću podizanja. Ne-klizajući gumeni vrhovi. Podesiva po visini. Može se koristiti u 4 funkcije: povišena WC daska, potpora za WC, stolica i klupa za tuširanje.

## 4. SASTAVLJANJE

- Proizvod se isporučuje već sastavljen. Jedini elementi koje treba sastaviti su noge. Za postavljanje nogu pritisnite gumb za zaključavanje na svakoj nozi i umetnite noge. Popravite položaj zaključavanjem gumba u jednoj od prisutnih rupa.

## 5. KAKO KORISTITI

- Kod sjedanja nemojte sjesti oslanjajući se samo na jednu stranu;
- Uvijek se oslanjajte na obje ruke kako biste ustali i održali ravnotežu;
- U slučaju da stolac koriste osobe s poteškoćama u kretanju, uvijek im pomozite pri sjedanju ili ustajanju sa stolca.

Za podešavanje visine:

- Pritisnite gumb za fiksiranje i pomaknite cijev na željenu visinu;
- Fiksirajte položaj zaključavanjem gumba u jednoj od prisutnih rupa.

## 6. NJEGA I ODRŽAVANJE

Stolac MORETTI pažljivo je provjeren prije stavljanja na tržište i opremljen zaštitnim znakom CE. Za sigurnost pacijenata predlažemo da redovito kontrolirate sljedeće dijelove:

- Glavni okvir proizvoda i spojni dijelovi;
- Montaža i rad kotača/nogu;
- Sve točke zavarivanja;
- Istrošenost vrhova tamo gdje je prisutna.

### 6.1 Čišćenje

Za čišćenje pomagala i konstrukcije koristite otopinu alkohola i neutralnog sapuna (u jednakim dijelovima) pomiješane s vodom.

### 6.2 Dezinfekcija

Koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju ako trebate dezinficirati proizvod.

NAPOMENA: Nikada ne koristite proizvode s kiselinama, lužinama ili otapalima, poput acetona ili razrjeđivača.

## 7. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije: D: 71 cm Š: 51,5 cm V: 74,5 do 85,5 cm

Sjedalo: 59 x 47 x 5,5 cm

Visina sjedala: 49 do 60 cm

Visina naslona za ruke: 67 do 78 cm

Maksimalna nosivost: 290 kg