

# INVALIDSKA TOALETNA I TUŠ KOLICA ZA PRETILE OSOBE



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

**SKU: RH840**

## 1. UVOD

Zahvaljujemo što ste kupili proizvode za tuširanje Moretti. Ovaj korisnički priručnik daje neke prijedloge kako ispravno koristiti proizvod koji ste odabrali i daje neke vrijedne savjete za vašu sigurnost. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču za savjet i pomoć. U slučaju nedoumica, preporučamo da kontaktirate trgovca koji vam može pomoći i dati odgovarajući savjet.

## 2. OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod ili bilo koju dostupnu dodatnu opremu bez prethodnog potpunog čitanja i razumijevanja ovog priručnika s uputama. Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza ili upute, obratite se zdravstvenom radniku, trgovcu ili tehničkom osoblju prije nego što pokušate koristiti ovu opremu, inače može doći do ozljeda ili štete.
- Držite stolac za tuširanje dalje od izvora topline.
- Granica uporabe proizvoda određena je istrošenošću dijelova.
- UVIJEK držite ruke i prste podalje od pokretnih dijelova kako biste izbjegli ozljede.
- NEMOJTE dopustiti djeci da se igraju ili rukuju stolcem za tuširanje.


## 3. OPĆI PRIKAZ DIJELOVA

Samohodna tuš kolica. Demontažni čelični okvir, sjedalo i naslon od PU. Preklapni nasloni za ruke, preklopni i uklonjivi nasloni za noge.

## 4. SASTAVLJANJE

Proizvod se isporučuje djelomično sastavljen i za sastavljanje nije potreban nikakav alat. Kolica za tuširanje sastoje se od sljedećih dijelova:

- lijeva strana okvira;
  - desna strana okvira;
  - naslon za leđa;
  - oslonac za lijevu i desnu nogu;
  - sjedalo i presvlaka za sjedalo;
  - kanta;
  - 4 x C-kopča sa sigurnosnom bravom;
  - 2 x gumbi za pričvršćivanje;
  - 2 x spojne cijevi.
- Za dovršetak montaže izvršite sljedeće radnje:

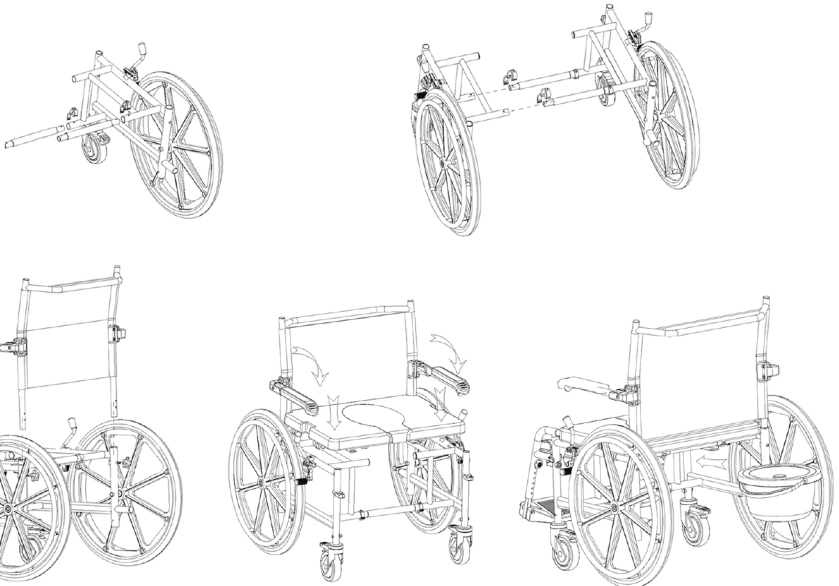

- Umetnite pričvrzne cijevi na lijevu ili desnu stranu okvira, poravnajte rupe i umetnite C-kopče;
- Spojite novostavljeni dio na drugu stranu okvira koristeći iste dvije pričvrzne cijevi i dvije dodatne C-kopče kao što je opisano u prethodnoj točki;
- Umetnite naslon za leđa u rupe na okviru invalidskih kolica i pričvrstite naslon pomoću dva gumba za pričvršćivanje;
- Postavite sjedalo na okvir invalidskih kolica i pritisnite prema dolje da popravite njegov položaj, zatim dodajte presvlaklu;
- Umetnite oslonce za noge sa strane i okrenite ih prema naprijed dok se ne pričvrste u držač;
- Umetnite kantu sa stražnje strane stolice za tuširanje tako da je gurnete u utore.

## 5. KAKO KORISTITI

Koristite samo stražnju ručku za pomicanje kolica, nikada ne koristite druge potpore. Upoznajte se s vlastitim mogućnostima i ograničenjima u smislu snage i izdržljivosti prije nego što se pokušate popeti uz rampu. Pomoć se preporučuje kada je nagib veći od 10%. Ako se trebate zaustaviti na kosoj površini, izbjegavajte nagle pokrete. Tijekom nizbrdice nemojte naglo mijenjati smjer. Podignite stolicu ako je potrebno, koristeći glavni okvir, a ne naslone za ruke ili noge.

## KOČNICE

Kolica možete zakočiti pritiskom poluge na svakom kotaču. Ako trebate podesiti ručku kočnice, možete odvrnuti maticu, pomaknuti stezaljku u željeni položaj i zatim je ponovno zategnuti.

## WC

Koristite WC kada su invalidska kolica potpuno blokirana. Za korištenje toaleta izvadite pomični dio sjedala pomoću ručke na prednjem dijelu. Izvadite WC pomoću ručke.

## PODEŠAVANJE VISINE

Naslon za leđa i ruke mogu se podesiti zajedno na dvije različite visine. Odvijte i uklonite gumbe koji pričvršćuju naslon za sjedalo i po potrebi podignite ili spustite naslon. Na kraju ponovno umetnite i zategnite gumbe.

## PODEŠAVANJE OSLONCZA ZA NOGE

Oslonci za noge stolice za tuširanje mogu se prilagoditi prema vašim potrebama:

- Odvijte vijak;
- Namjestite visinu oslonca za noge;
- Ponovno pritegnite vijak. Provjerite jesu li oba oslonca za noge podešena na istoj visini.

## 6. NJEGA I ODRŽAVANJE

Stolac MORETTI pažljivo je provjeren prije stavljanja na tržište i opremljen zaštitnim znakom CE. Za sigurnost pacijenata predlažemo da redovito kontrolirate sljedeće dijelove:

- Glavni okvir proizvoda i spojni dijelovi;
- Montaža i rad kotača/hogu;
- Sve točke zavarivanja;
- Istrošenost vrhova tamo gdje je prisutna.

### 6.1 Čišćenje

Za čišćenje pomagala i konstrukcije koristite otopinu alkohola i neutralnog sapuna (u jednakim dijelovima) pomiješane s vodom.

### 6.2 Dezinfekcija

Koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju ako trebate dezinficirati proizvod.

NAPOMENA: Nikada ne koristite proizvode s kiselinama, lužinama ili otapalima, poput acetona ili razrjeđivača.

## 7. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije: D: 83 cm Š: 100 cm V: 97 cm

Sjedalo: 61 x 40 cm

Visina sjedala: 50,5 cm

Maksimalna nosivost: 200 kg