

TOALETNA POVIŠENJA VISINE 10 ,6 ILI 14 CM



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: RP400-6, RP400-10, RP400-14, RP410-6, RP410-10 i RP410-14

1. UVOD

Hvala što ste odabrali univerzalno toaletno povišenje MOPEDIA tvrtke Moretti. Njegov dizajn i kvaliteta jamče maksimalnu udobnost, sigurnost i pouzdanost. Ove upute sadrže korisne savjete za pravilno korištenje i važne napomene za vašu sigurnost. U slučaju nedoumica, obratite se prodavaču koji će vam moći ispravno pomoći i savjetovati vas.

2. NAMJENA

MOPEDIA toaletno povišenje pomagalo je namijenjeno osobama s poteškoćama u kretanju pri korištenju WC-a.

PAŽNJA!

- Zabranjeno je koristiti ovaj uređaj u svrhe koje nisu navedene u ovim uputama.
- Moretti S.p.A. ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom uređaja ili upotrebom koja nije u skladu s ovim uputama.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja i ovih uputa bez prethodne najave, u svrhu poboljšanja karakteristika proizvoda.


3. DIJELOVI UREĐAJA

A. Povišenje

B. Stezaljke

C. Unutarnji rub

D. Prednji rub

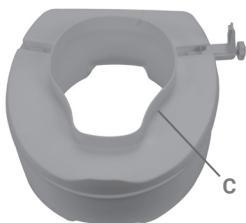

4. UPUTE ZA MONTAŽU

- Umetnite bočne stezaljke na sljedeći način: preokrenite MOPEDIA toaletno povišenje i položite ga na ravnu i stabilnu površinu. Umetnite obje stezaljke u odgovarajuće bočne vodilice, lagano ih gurnite i okrenite ručice vijaka u smjeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili stezaljke na povišenje.

PAŽNJA! Ako se ručica okreće u prazno: čvrsto pritisnite stezaljku prema navoju utisnutom u povišenje, održavajući stalni pritisak na ručicu kako biste osigurali kontakt između vijka i navoja.

Napomena: U ovoj fazi nemojte do kraja pritegnuti stezaljke, inače neće biti moguće postaviti MOPEDIA povišenje na keramiku WC školjke.

- Podignite poklopac i dasku WC-a te MOPEDIA toaletno povišenje postavite na keramiku WC školjke sa stezaljkama okrenutim prema stražnjem dijelu WC-a. Pazite da unutarnji rub bude u cijelosti unutar WC-a, a prednji rub izvana.

Napomena: Povišenje mora biti u savršeno ravnom položaju na keramici WC školjke.

- Okrenite ručice stezaljki u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite lagani otpor, a zatim provjerite je li MOPEDIA toaletno povišenje dobro pričvršćeno na WC i ne može li se pomicati.

PAŽNJA! Mehanizam zaključavanja dizajniran je kako bi podešavanje bilo jednostavno i bez napora.

Važno je ne okretati ručicu dalje kada stezaljka dosegne položaj kontakta s WC-om.

5. UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Sve dijelove moguće je prati toplom vodom i neutralnim sapunom. MOPEDIA toaletno povišenje može se u potpunosti uroniti u vodu i dezinficirati odgovarajućim sredstvima za dezinfekciju.

6. MJERE OPREZA

- Ne prekoračujte maksimalnu nosivost od 136 kg.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li MOPEDIA toaletno povišenje dobro pričvršćeno na WC i je li bez oštećenja koja bi mogla ugroziti stabilnost proizvoda.
- Nemojte koristiti povišenje kao oslonac za ustajanje ili sjedanje na WC.