



## SKLOPIVI ROLATOR DYONE

MODEL: RP690B



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

Servis za Hrvatsku:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

## 1. UVOD

Hvala što ste odabrali rolator MOPEDIA tvrtke MORETTI S.p.A. za podršku osobama s poteškoćama u kretanju unutar i izvan doma, tijekom putovanja ili u jednostavnim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj korisnički priručnik sadrži male savjete za pravilnu uporabu pomagala koje ste odabrali i vrijedne savjete za vašu sigurnost. Preporučljivo je pažljivo pročitati cijeli ovaj priručnik prije uporabe rolatora. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se distributeru koji će vam pomoći i pravilno vas savjetovati.

Napomena: Provjerite jesu li svi dijelovi rolatora oštećeni tijekom otpreme. U slučaju oštećenja nemojte koristiti proizvod i obratite se prodavaču za daljnje upute.



### POZOR!

Zabranjena je uporaba ovog proizvoda u svrhe koje nisu definirane u ovom priručniku. MORETTI S.p.A. se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda ili uporabom koja nije navedena u ovom priručniku. Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja i sljedećeg priručnika bez prethodne najave kako bi se poboljšale njegove karakteristike.

## 2. NAMJENA

Ovaj rolatator namijenjen je osobama s motoričkim poteškoćama i može se koristiti kao pomoć u olakšavanju hodanja. Rolator pruža veću stabilnost, potporu i sigurnost tijekom hodanja. U svakom slučaju, ne mogu ga koristiti osobe s vidljivo slabom funkcijom šake i/ili ruke i osobe s problemima s ravnotežom. Rolator se može koristiti i vani i unutra. Preporučuje se uporaba samo na površinama na kojima svi kotači dodiruju tlo. Ne smije se koristiti na kamenitom tlu ili na nagnutim površinama jer rolatator tada može biti nestabilan. Proizvod nije namijenjen prijevozu osoba ili drugog materijala.

## 3. OPĆA UPOZORENJA

- **NEMOJTE** instalirati ili koristiti proizvod prije čitanja i razumijevanja ovog proizvoda.
- Ako ne možete razumjeti upozorenja, mјere opreza i upute, obratite se zdravstvenom radniku, prodavaču ili tehničkom osoblju prije nego što pokušate instalirati proizvod izbjegavajući štetu ili osobnu ozljedu;
- Rolator smiju koristiti samo pacijenti s odgovarajućim motornim kapacitetom koji jamči uporabu bez rizika;
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste utvrdili prikladnost proizvoda, regluciju i pravilnu uporabu rolatora;
- Vaš liječnik ili terapeut trebao bi vam pomoći prilagoditi visinu rolatora za maksimalnu potporu, za pravilno aktiviranje kočnice, za pravilno sastavljanje općenito.

### 3.1 Upozorenja za uporabu

1. Uvijek provjerite je li sajla kočnice pravilno pričvršćena.
2. Uvijek provjerite ispravan rad kočnice nakon svakog postavljanja visine kako biste izbjegli slobodno i prekomerno savijanje sajle.
3. Nepoštivanje ovih jednostavnih upozorenja može dovesti do ozljeda.
4. Rolator se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte se penjati stepenicama pomoću rolatora!
5. Uvijek se oslonite na obje ručke kako biste održali ravnotežu.
6. Obratite posebnu pozornost na mokre, zaledene ili snježne površine.
7. Nemojte preopteretiti rolatator.
8. Nemojte koristiti sjedalo rolatora (ako postoji) za prijevoz stvari ili ljudi; sjedalo je namijenjeno za sjedanje korisnika s uključenom parkirnom kočnicom;
9. Svi kotači moraju biti u kontaktu s podom u bilo kojem trenutku tijekom uporabe osigurajte ispravan balans rolatora i maksimalnu sigurnost.
10. Parkirna kočnica mora biti aktivirana prije korištenja sjedala.

### 3.2 Upozorenja o stabilnosti

- Uključujući opterećenje košare za pohranu, rolator pruža pomoć pojedincu težine do 136 kg
- Košara ima ograničenje težine od 5 kg. Nemojte preopterećivati kako biste izbjegli neravnoteže i rizike od prevrtanja.

- Donji nosač ima ograničenje težine od 5 kg. Ne preopterećujte kako bi se izbjegle neravnoteže i rizici od prevrtanja.

### 3.3 Upozorenja za montažu

- Nakon postavljanja ili rasklapanja rolatora, provjerite je li sigurnosni uređaj pričvršćen u ispravnom položaju.
- Provjerite jesu li obje potporne cijevi ručke pravilno umetnute u rolator i čvrsto pričvršćene s vijcima za zaključavanje s krilnim maticama.
- Ne vješajte ništa na okvir rolatora kako biste izbjegli izobličenje cijevi i kako bi se izbjeglo ugrožavanje njegove stabilnosti.
- Obratite pozornost na zarobljavanje prstiju i/ili odjeće tijekom faze otvaranja i zatvaranja.

## 4. OPĆI OPIS



## 5. PRIJE SVAKE UPORABE

- Da su svi dijelovi rolatora čvrsto zaključani;
- Jesu li svi vijci zategnuti;
- Je li sjedalo pravilno zaključano (ako to nije slučaj, pritisnite sjedalo prema dolje prema okviru);
- Je li uređaj za blokiranje sjedala pravilno umetnut;
- Provjerite ispravan rad normalne kočnice i parkirne kočnice;
- Postavite visinu ručki pomoću bočnih regulatora;
- Odvignite gumb, postavite ručke na željenu visinu, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu i dobro zategnjite;
- Ponovite za drugu ručku i provjerite jesu li obje ručke postavljene na istoj visini.

## 6. UPUTE ZA SASTAVLJANJE, KARAKTERISTIKE I REGULACIJU

- Raspakirajte proizvod i provjerite da nije oštećen tijekom prijevoza.  
U slučaju da je rolator oštećen, obratite se najbližem prodavaču;
- Otvorite rolator povlačenjem prednje strane polugom na stražnjim nogama;
- Gurnite sjedalo prema dolje dok sigurnosni uređaj ne zaključa poprečnu šipku okvira stražnjih kotača;
- Umetnute cijevi ručke u strukturu i gume za zaključavanje u odgovarajuće otvore;
- Okrećite gume za zaključavanje dok dobro ne zategnu cijevi ručke;
- Stavite plastičnu posudu iznad sjedala;
- Dodajte prednju košaru tako da je zakačite na dvije igle ispod sjedala.

## 7. UPORABA

- Počnite gurati kada ste u uspravnom položaju s obje ruke na ručkama;
- Provjerite jesu li vam ruke suhe prije uporabe rolatora kako biste izbjegli rizike klizanja;
- Hodajte u uspravnom položaju s pogledom okrenutim prema naprijed, a ne prema dolje;
- Nemojte gurati rolator predaleko od tijela, to može uzrokovati padove i neadekvatna opterećenja;
- Nemojte koristiti rolator za prolazak stepenica viših od 20 mm;

- Kada koristite na otvorenom, preferirajte pločnike koji su pravilno pripremljeni u skladu s propisima za uklanjanje arhitektonskih barijera.

## 8. KOĆNICE

Pravilno funkciranje koćnica ovisi o istrošenosti i nakupljenoj prljavštini na kotačima. Provjerite stanje koćnica i kotača prije svake uporabe.

### 8.1 Korištenje koćnice

Za kočenje rolatora povucite ručice koćnica prstima prema gore dok se rolator ne uspori ili zaustavi. Da biste nastavili pomicati rolator, otpustite ručke koćnice.

### 8.2 Blokada koćnice (ručna koćnica)

Pritisnite ručice koćnice dlanom ruke prema dolje, kada čujete klik kotači su zaključani. Podignite ručke koćnice iz položaja za zaustavljanje kako biste ih oslobođili.



PAŽNJA!

Kada odmarate na rolatoru, koćnice moraju biti blokirane.

### 8.3 Otključavanje kotača

Povucite obje ručice koćnice dok se ne oslobole.

## 9. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Oprezno upotrebljavajte na mokrim i skliskim površinama
- Nemojte prekoračiti maksimalnu težinu pacijenta navedenu na naljepnici proizvoda i u poglavljju tehničke karakteristike ovog priručnika
- Sjedalo se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte koristiti sjedalo na stepenicama ili nagibima
- Nemojte koristiti stolac na način koji nije naveden u ovim uputama za uporabu. Svaka odgovornost za nepravilnu uporabu stolice se odbacuje
- Izbjegavajte ostavljanje stolca vani i u dodiru s vodom na duže vrijeme
- Povremeno provjeravajte stabilnost i čvrstoću proizvoda, kao i stanje potpornih vrhova ili kotača. Zamijenite ih kada su istrošeni
- Ako ste u nedoumici u vezi s uporabom, postavljanjem ili održavanjem proizvoda, kontaktirajte trgovca.
- Kako biste izbjegli bilo kakve rizike, držite uređaj izvan dohvata djece

## 10. UPORABA

- Sjednite i rasporedite težinu po cijelom sjedalu. Nemojte sjediti i gurati u stranu
- Uvijek se naslonite na oba naslona za ruke kako biste se ustali i uravnotežili
- U slučaju korištenja stolice od strane osoba s posebnim motoričkim poteškoćama, uvijek im pomognite da sjednu i ustanu sa stolice

## 11. ODRŽAVANJE

Uređaji linije MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. pažljivo se provjeravaju i označavaju oznakom CE u trenutku stavljanja na tržište. Radi sigurnosti pacijenta i lječnika, preporučuje se da ovlaštena osoba provjeri prikladnost rolatora za uporabu svake 2 godine. U slučaju popravka smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor. Korisni vijek proizvoda ovisi o uporabi, održavanju, pohrani i čišćenju.

## 12. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpnu natopljenu vodom ili mlakom vodom i neutralnim sapunom i osušite čistom, suhom krpom. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana uporabom materijala koji mogu oštetiti površinu proizvoda ili kemijskim korozivnim sredstvima koja se koriste tijekom



PAŽNJA!

Nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, deterdžente na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih dijelova i hrđanje metalnih površina.

čišćenja.

Ako je potrebno, dezinficirajte proizvod blagim deterdžentom za dezinfekciju.

### 12.1 Održavanje kotača

1. Očistite kotače mlakom vodom i neutralnim deterdžentom. Osušite čistom krpom.
2. Povremeno podmazujte kotače.

### 13. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije u cm										Nosivost MAKS.
69	77 - 98	59	58	44	24	9.5	20	20	136 kg	

Sjedalica: 38x16 cm

Struktura: Željezo