

ROLATOR ERA S POTPOROM ZA PODLAKTICE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

SKU: RP691

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

1. UVOD

Hvala što ste odabrali rolator MOPEDIA tvrtke MORETTI S.p.A. za podršku osobama s poteškoćama u kretanju unutar i izvan doma, tijekom putovanja ili u jednostavnim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj korisnički priručnik sadrži male savjete za pravilnu uporabu pomagala koje ste odabrali i vrijedne savjete za vašu sigurnost. Preporučljivo je pažljivo pročitati cijeli ovaj priručnik prije uporabe rolatora. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se distributeru koji će vam pomoći i pravilno vas savjetovati. Napomena: Provjerite jesu li svi dijelovi rolatora oštećeni tijekom otpreme. U slučaju oštećenja nemojte koristiti proizvod i obratite se prodavaču za daljnje upute.



POZOR!

Zabranjena je uporaba ovog proizvoda u svrhe koje nisu definirane u ovom priručniku. MORETTI S.p.A. se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom proizvoda ili uporabom koja nije navedena u ovom priručniku. Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja i sljedećeg priručnika bez prethodne najave kako bi se poboljšale njegove karakteristike.

2. NAMJENA

Ovaj rolator namijenjen je osobama s motoričkim poteškoćama i može se koristiti kao pomoć u olakšavanju hodanja. Rolator pruža veću stabilnost, potporu i sigurnost tijekom hodanja. U svakom slučaju, ne mogu ga koristiti osobe s vidljivo slabom funkcijom šake i/ili ruke i osobe s problemima s ravnotežom. Rolator se može koristiti i vani i unutra. Preporučuje se uporaba samo na površinama na kojima svi kotači dodiruju tlo. Ne smije se koristiti na kamenitom tlu ili na nagnutim površinama jer rolator tada može biti nestabilan. Proizvod nije namijenjen prijevozu osoba ili drugog materijala.

3. OPĆA UPOZORENJA

- NEMOJTE instalirati ili koristiti proizvod prije čitanja i razumijevanja ovog proizvoda.
- Ako ne možete razumjeti upozorenja, mjere opreza i upute, obratite se zdravstvenom radniku, prodavaču ili tehničkom osoblju prije nego što pokušate instalirati proizvod izbjegavajući štetu ili osobnu ozljedu;
- Rolator smiju koristiti samo pacijenti s odgovarajućim motornim kapacitetom koji jamči uporabu bez rizika;
- Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili terapeutom kako biste utvrdili prikladnost proizvoda, regulaciju i pravilnu uporabu rolatora;
- Vaš liječnik ili terapeut trebao bi vam pomoći prilagoditi visinu rolatora za maksimalnu potporu, za pravilno aktiviranje kočnice, za pravilno sastavljanje općenito.

3.1 Upozorenja za uporabu

1. Uvijek provjerite je li sjala kočnice pravilno pričvršćena.
2. Uvijek provjerite ispravan rad kočnice nakon svakog postavljanja visine kako biste izbjegli slobodno i prekomjerno savijanje sajle.
3. Nepoštivanje ovih jednostavnih upozorenja može dovesti do ozljeda.
4. Rolator se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte se penjati stepenicama pomoću rolatora!
5. Uvijek se oslonite na obje ručke kako biste održali ravnotežu.
6. Obratite posebnu pozornost na mokre, zaleđene ili snježne površine.
7. Nemojte preopteretiti rolator.
8. Nemojte koristiti sjedalo rolatora (ako postoji) za prijevoz stvari ili ljudi; sjedalo je namijenjeno za sjedanje korisnika s uključenom parkirnom kočnicom;
9. Svi kotači moraju biti u kontaktu s podom u bilo kojem trenutku tijekom uporabe osigurajte ispravan balans rolatora i maksimalnu sigurnost.
10. Parkirna kočnica mora biti aktivirana prije korištenja sjedala.

3.2 Upozorenja o stabilnosti

- Uključujući opterećenje košare za pohranu, rolator pruža pomoć pojedincu težine do 136 kg
- Košara ima ograničenje težine od 5 kg. Nemojte preopterećivati kako biste izbjegli neravnoteže i rizike od prevrtanja.

- Donji nosač ima ograničenje težine od 5 kg. Ne preopterećujte kako bi se izbjegle neravnoteže i rizici od prevrtanja.

3.3 Upozorenja za montažu

- Nakon postavljanja ili rasklapanja rolatora, provjerite je li sigurnosni uređaj pričvršćen u ispravnom položaju.
- Provjerite jesu li obje potporne cijevi ručke pravilno umetnute u rulator i čvrsto pričvršćene s vijcima za zaključavanje s krilnim maticama.
- Ne vješajte ništa na okvir rolatora kako biste izbjegli izobličenje cijevi i kako bi se izbjeglo ugrožavanje njegove stabilnosti.
- Obratite pozornost na zarobljavanje prstiju i/ili odjeće tijekom faze otvaranja i zatvaranja.

4. OPĆI OPIS



5. PRIJE SVAKE UPORABE

- Da su svi dijelovi rolatora čvrsto zaključani;
- Jesu li svi vijci zategnuti;
- Provjerite ispravan rad normalne kočnice i parkirne kočnice;
- Postavite visinu ručki pomoću bočnih regulatora;
- Odvrnite gumb, postavite ručke na željenu visinu, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu i dobro zategnite;
- Ponovite za drugu ručku i provjerite jesu li obje ručke postavljene na istoj visini.

6. UPUTE ZA SASTAVLJANJE, KARAKTERISTIKE I REGULACIJU

- Raspakirajte proizvod i provjerite da nije oštećen tijekom prijevoza.
- U slučaju da je rulator oštećen, obratite se najbližem prodavaču;
- Otvorite rulator povlačenjem prednje strane polugom na stražnjim nogama;
- Umetnite cijevi antibrahijalnih nosača u konstrukciju. Okrenite regulatore za zaključavanje dok nisu blokirani.
- Namjestite visinu antibrahijalnih nosača pomoću bočnih regulatora. Odvijte regulator, postavite nosač na željenu visinu, okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu kako biste ponovno pričvrstili i čvrsto zategnite. Ponovite za druge medije i pobrinite se da su oba nosača postavljena su na istoj visini.
- Zatvaranje: Podignite bočne šipke i vratite prednji dio rolatora.
- Posuda se koristi samo za podupiranje malih predmeta.
- Košara za pohranu je pričvršćena na okvir rolatora.
- Prije nego što sjednete, postavite rulator na ravnu i čvrstu površinu, a zatim zaključajte kočnice.
- Osigurajte da je zasun dobro pričvršćen i da je rulator u jednom položaju.

7. UPORABA

- Počnite gurati kada ste u uspravnom položaju s obje ruke na ručkama;
- Provjerite jesu li vam ruke suhe prije uporabe rolatora kako biste izbjegli rizike klizanja;

- Hodajte u uspravnom položaju s pogledom okrenutim prema naprijed, a ne prema dolje;
- Nemojte gurati rolator predaleko od tijela, to može uzrokovati padove i neadekvatna opterećenja;
- Nemojte koristiti rolator za prolazak stepenica viših od 20 mm;
- Kada koristite na otvorenom, preferirajte pločnike koji su pravilno pripremljeni u skladu s propisima za uklanjanje arhitektonskih barijera.

8. KOČNICE

Pravilno funkcioniranje kočnica ovisi o istrošenosti i nakupljenoj prljavštini na kotačima. Provjerite stanje kočnica i kotača prije svake uporabe.

8.1 Korištenje kočnice

Za kočenje rolatora povucite ručice kočnica prstima prema gore dok se rolator ne uspori ili zaustavi. Da biste nastavili pomicati rolator, otpustite ručke kočnice.



PAŽNJA!

Kada odmarate na rolatoru, kočnice moraju biti blokirane.

8.2 Blokada kočnice (ručna kočnica)

Gurnite ručice kočnica prema naprijed prstima, kada čujete «klik», kotači su zaključani. Povucite ručice kočnice prema sebi kako biste ih oslobodili.

8.3 Otključavanje kotača

Povucite obje ručice kočnice dok se ne oslobode.

9. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Oprezno upotrebljavajte na mokrim i skliskim površinama
- Nemojte prekoračiti maksimalnu težinu pacijenta navedenu na naljepnici proizvoda i u poglavlju tehničke karakteristike ovog priručnika
- Sjedalo se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte koristiti sjedalo na stepenicama ili nagibima
- Nemojte koristiti stolac na način koji nije naveden u ovim uputama za uporabu. Svaka odgovornost za nepravilnu uporabu stolice se odbacuje
- Izbjegavajte ostavljanje stolca vani i u dodiru s vodom na duže vrijeme
- Povremeno provjeravajte stabilnost i čvrstoću proizvoda, kao i stanje potpornih vrhova ili kotača. Zamijenite ih kada su istrošeni
- Ako ste u nedoumici u vezi s uporabom, postavljanjem ili održavanjem proizvoda, kontaktirajte trgovca.
- Kako biste izbjegli bilo kakve rizike, držite uređaj izvan dohvata djece

10. UPORABA

- Sjednite i rasporedite težinu po cijelom sjedalu. Nemojte sjediti i gurati u stranu
- Uvijek se naslonite na oba naslona za ruke kako biste se ustali i uravnotežili
- U slučaju korištenja stolice od strane osoba s posebnim motoričkim poteškoćama, uvijek im pomognite da sjednu i ustanu sa stolice

11. ODRŽAVANJE

Uređaji linije MOPEDIA tvrtke Moretti S.p.A. pažljivo se provjeravaju i označavaju oznakom CE u trenutku stavljanja na tržište. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika, preporučuje se da ovlaštena osoba provjeri prikladnost rolatora za uporabu svake 2 godine. U slučaju popravka smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor. Korisni vijek proizvoda ovisi o uporabi, održavanju, pohrani i čišćenju.

12. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA



PAŽNJA!

Nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, deterdžente na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih dijelova i hrđanje metalnih površina.

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu natopljenu vodom ili mlakom vodom i neutralnim sapunom i osušite čistom, suhom krpom. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana uporabom materijala koji mogu oštetiti površinu proizvoda ili kemijskim korozivnim sredstvima koja se koriste tijekom čišćenja.

Ako je potrebno, dezinficirajte proizvod blagim deterdžentom za dezinfekciju.

12.1 Održavanje kotača

- 1. Očistite kotače mlakom vodom i neutralnim deterdžentom. Osušite čistom krpom.
- 2. Povremeno podmazujte kotače.

13. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije u cm										
	64	98 - 120	61	60	44	31	10	20	20	136 kg

Sjedalica: 38x16 cm
Struktura: Željezo