

# 4-U-1 TOALETNA I TUŠ STOLICA/KOLICA



## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.  
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana  
Tel: +385 1 20 20 504  
E-mail: [prodaja@medicaldirect.hr](mailto:prodaja@medicaldirect.hr)  
Web: [www.medicaldirect.hr](http://www.medicaldirect.hr)

**SKU: RP780 i RP782**

## 1. UVOD

Hvala što ste odabrali pomoćni uređaj iz Morettijeve linije MOPEDIA. Moretti multifunkcionalne kupaonske sjedalice dizajnirane su i proizvedene kako bi zadovoljile sve vaše potrebe za praktičnom, ispravnom i sigurnom uporabom. Ovaj priručnik sadrži male savjete za pravilnu uporabu uređaja koji ste odabrali i vrijedne savjete za vašu sigurnost. Preporučljivo je pažljivo pročitati cijeli ovaj priručnik prije uporabe uređaja. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se prodavaču koji će vam moći pomoći i pravilno vas savjetovati.

## 2. NAMJENA

MOPEDIA višenamjenske stolice za kupaonicu marke Moretti služe kao pomoć pri tuširanju i kupanju te su prikladne za osobe s poteškoćama pri hodanju. One uključuju četiri funkcije u jednoj: stabilizirajuću dasku za WC školjku, stalak za WC školjku, udobnu sjedalicu i dasku za tuširanje.



### PAŽNJA!

- Zabranjena je uporaba sljedećeg uređaja u druge svrhe osim definiranih u ovom priručniku.
- Moretti S.p.A. odbija bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili od uporabe koja nije navedena u ovom priručniku
- Proizvođač zadržava pravo izmjene uređaja i sljedećeg priručnika bez prethodne najave kako bi se poboljšale njegove karakteristike

## 3. OPĆA UPOZORENJA

- Za pravilnu uporabu uređaja pogledajte ovaj priručnik
- Po potrebi posavjetujte se s liječnikom ili terapeutom radi utvrđivanja ispravne prilagodbe i ispravne uporabe uređaja
- Držite komplet dalje od izvora topline
- Vijek trajanja uređaja određen je trošenjem dijelova koji se ne mogu popraviti i/ili zamijeniti
- NE dopustite djeci da se igraju sa stolcem

## 4. OPĆI OPIS

### 4.1 Višenamjenske sjedalice za kupaonicu

RP780 Fiksni model

RP782 Sklopivi model na kotačima

MOPEDIA višenamjenske sjedalice za kupaonicu izrađene su od eloksiranog aluminija, s udobnom PVC stolicom i protukliznim gumenim vrhovima (s izuzetkom modela RP782 opremljenog zakretnim kotačima).

Namjestivo po visini svakih 2,5 cm. One uključuju četiri funkcije u jednoj: stabilizirajuću dasku za WC školjku, stalak za WC školjku, udobnu sjedalicu i dasku za tuširanje.

## 5. PRIJE SVAKE UPORABE

- Uvijek provjerite stanje istrošenosti dijelova na način koji osigurava pravilnu uporabu i sigurnost osoba i stvari
- Provjerite je li sigurnosni gumb pravilno umetnut u otvor za podešavanje visine, kao i sve sklopove

## 6. PRIJE SASTAVLJANJA

Raspakirajte proizvod i provjerite da nije oštećen tijekom prijevoza. U slučaju da je proizvod oštećen, obratite se prodavaču.

## 7. MONTAŽA

RP780 Umetnite stalak za WC školjku u isporučeni proizvod koji je već sastavljen, vodeći računa da pravilno postavite stalak sa stražnjom vodoravnom šipkom.

RP782 Raširite bočne dijelove konstrukcije podignite dio s već montiranim toaletnim stalkom

i pričvrstite dva kraja na bočne strane. Umetnite stalak za WC školjku, pazeći da pravilno postavite stalak sa stražnjom vodoravnom šipkom.



## 8. SJEDALICA

Pritisnite sigurnosni gumb za podešavanje visine sjedalice uklanjanjem unutarnjeg dijela noge i dovodenjem do otvora prema željenoj visini. Provjerite jesu li sve četiri noge postavljene na istu visinu.

## 9. UPOZORENJA ZA UPORABU

- Oprezno upotrebljavajte na mokrim i skliskim površinama
- Nemojte prekoračiti maksimalnu težinu pacijenta navedenu na naljepnici proizvoda i u poglavlju tehničke karakteristike ovog priručnika
- Sjedalo se može koristiti samo na čvrstoj, ravnoj površini. Nemojte koristiti sjedalo na stepenicama ili nagibima
- Nemojte koristiti stolac na način koji nije naveden u ovim uputama za uporabu. Svaka odgovornost za nepravilnu uporabu stolice se odbacuje
- Izbjegavajte ostavljanje stolca vani i u dodiru s vodom na duže vrijeme
- Povremeno provjeravajte stabilnost i čvrstoću proizvoda, kao i stanje potpornih vrhova ili kotača. Zamijenite ih kada su istrošeni
- Ako ste u nedoumici u vezi s uporabom, postavljanjem ili održavanjem proizvoda, kontaktirajte trgovca.
- Kako biste izbjegli bilo kakve rizike, držite uređaj izvan dohvata djece

## 10. UPORABA

- Sjednite i rasporedite težinu po cijelom sjedalu. Nemojte sjediti i gurati u stranu
- Uvijek se naslonite na oba naslona za ruke kako biste se ustali i uravnotežili
- U slučaju korištenja stolice od strane osoba s posebnim motoričkim poteškoćama, uvijek im pomognite da sjednu i ustanu sa stolice



**PAŽNJA!**

Ne pomičite pomagalo dok je pacijent u sjedećem položaju

## 11. ODRŽAVANJE

Uređaji linije MOPEDIA pažljivo se provjeravaju i označavaju oznakom CE u trenutku stavljanja na tržište. Radi sigurnosti pacijenta i liječnika, preporučuje se da ovlaštena osoba provjeri prikladnost za uporabu vašeg proizvoda, najmanje svake 2 godine. Pod periodičnim pregledom podrazumijeva se pregled sljedećih dijelova:

- Potporna konstrukcija stolice i spojni dijelovi
- Provjerite sastavljanje i rad kotača s njihovom kočnicom (kod modela sa kotačima)
- Provjerite sve točke zavarivanja
- Provjerite istrošenost vrhova

U slučaju popravka smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi i pribor.

## 12. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu natopljenu vodom ili mlakom vodom i neutralnim sapunom i osušite čistom, suhom krpom.



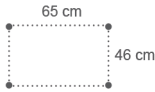
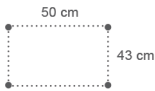
### PAŽNJA!

Nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, deterdžente na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih dijelova i hrđanje metalnih površina.

Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja uzrokovana uporabom materijala koji mogu oštetiti površinu proizvoda ili kemijskim korozivnim sredstvima koja se koriste tijekom čišćenja.

Ako je potrebno, dezinficirajte proizvod blagim deterdžentom za dezinfekciju.

## 13. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kodovi	Maksimalna nosivost	Visina naslona za ruke	Visina sjedala	Osnovni	Korišteni materijali
RP780	130 kg	Od 66 do 76 cm	Od 45 do 55 cm		Aluminijska cijevna konstrukcija
RP782		Od 64 do 74 cm	Od 47 do 57 cm		

Dimenzije imaju toleranciju od  $\pm 1$  cm

## 14. REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

	<b>RV7058-4</b> Sjedalo i poklopac za udobnu sjedalicu RP780 I RP782 Dimenzije otvora: 20,5 x 24 cm		<b>RV7069-1</b> Kanta, ručka i poklopac za udobnu sjedalicu RP780 I RP782
	<b>RV7024</b> Ø 29mm Vrhovi nogu za RP780 (4 komada)		<b>RV7051</b> Kotači na zakretanje za RP782 (par)