

VELIKI SAMOSTOJEĆI STOLIĆ ZA KREVET



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr


SKU: RS890M

NAMJENA

Moretti RS890M stolić za krevet namijenjen je osobama koje provode duže vrijeme u krevetu, kako bi im omogućio udobno konzumiranje obroka, čitanje, pisanje ili druge aktivnosti bez napuštanja kreveta. Pogodan je za upotrebu kod kuće, u bolnicama i ustanovama za njegovu.

GENERALNI OPIS

- A. Veliki vijci - 2 kom
- B. Sustav za zaključavanje (šipka za zaključavanje s prstenom, gumb i poklopac) - 4 kom
- C. Stolić - 1kom
- D. Perforirana ploča - 1kom
- E. Veliki stol - 1kom
- F. Baza - 1kom
- G. Kotačići - 4 kom
- H. Stupac - 1kom

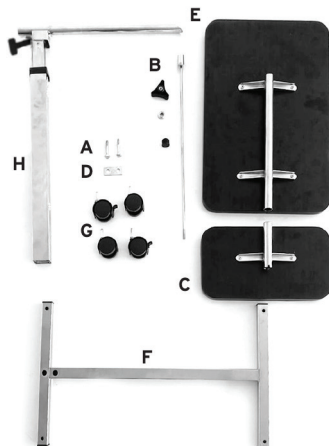

SASTAVLJANJE STOLIĆA

1. Provjerite sadržaj pakiranja kod otvaranja; sadrži li sve dijelove:

- velika i mala površina stolića
- metalna perforirana ploča
- čelična baza
- središnji stup
- 4 kotačića (dva s kočnicom)
- veliki vijci, prstenovi, ručke i drugi pričvrсни elementi

2. Umetnite polugu za podešavanje visine kao što je prikazano na slici 1 u utor za podešavanje visine i pričvrstite je kao što je prikazano na slici 2.



1



2

3. Postavite glavnu ploču tako da metalne komponente budu okrenute jedna prema drugoj kao što je prikazano na slici 4, zatim umetnite cijev stupca H unutar poravnatih cijevi ploča kao što je prikazano na slici 4.




4

4. Umetnite metalni prsten na stranu stupa i zavrnite gumb dok stup ne bude čvrsto zaključen okomito na ravninu kao što je prikazano na slici 5.



5

5. Umetnite cilindrične podloške u odgovarajuće rupe ispod metalne baze kao što je prikazano na slici 6, zatim postavite perforiranu ploču u rupe na bazi i umetnite oba velika vijka kao što je prikazano na slici 7.

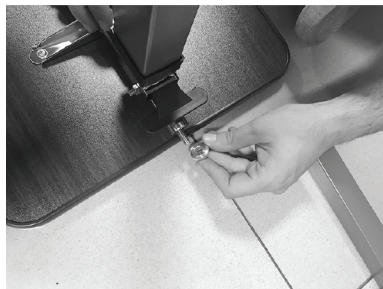


6




7

6. Usmjerite bazu prema stupu kao što je prikazano na slici 8, zatim zavrnite prethodno pripremljene vijke na stup kao što je prikazano na slici 9 i čvrsto ih zategnite.

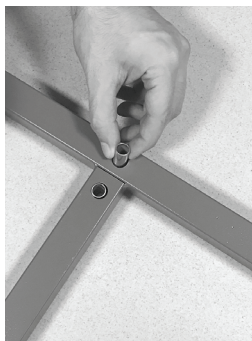

8

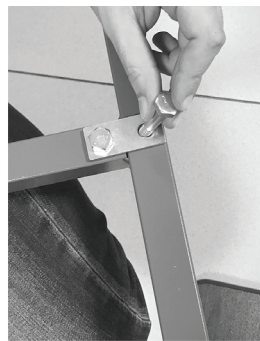

9

7. Umetnite kotačiće u odgovarajuće rupe u podnožju, pazeći da kotačiće s kočnicom postavite na istu stranu.



10



11

8. Umetnite kotačiće u odgovarajuće rupe u podnožju, pazeći da postavite kotačiće s kočnicom na istu stranu kao što je prikazano na slici 12.



12

9. Uklonite CRNI vijak (i zadržite ga) u visini crnog plastičnog nosača i zamijenite ga kratkim vijkom kao što je prikazano na slici u generalnom opisu i slici 14.

Napomena: Ako želite pohraniti ili rastaviti stol, svakako zamijenite kratki vijak originalnim dugim crnim vijkom.



13



14

PODEŠAVANJE I KORIŠTENJE

Podešavanje visine – pomoću bočne ručke podesite visinu stolića prema potrebi (od 74 do 119 cm).

Nagib površine – okretanjem ručke možete nagnuti veliku površinu stolića u željeni položaj.

Pomicanje stolića – zahvaljujući kotačićima, stolić je lako pomičan. Prije upotrebe, blokirajte kotačiće pomoću kočnica.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Površine čistite mekanom krpom s blagim deterdžentom i toplom vodom.
- Ne koristiti abrazivne proizvode, kiseline, alkohol ili sredstva na bazi klora kako biste izbjegli oštećenje površina.
- Povremeno provjerite spojeve i vijčane elemente radi sigurnosti.

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Nemojte prekoračiti maksimalno dopušteno opterećenje od 20 kg.
- Uvijek pazite na stabilnost tijekom podešavanja visine ili nagiba.
- Ne ostavljajte teške predmete na rubovima stolića kako biste spriječili prevrtanje.
- Uvijek pomognite korisniku prilikom prilagodbe stolića.