

ŠTAP ZA HODANJE SA SJEDALOM



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: SEAT-TIM

1. Konstrukcija

Štap sa sjedalom sastoji se od ergonomске ručke, visokokvalitetne aluminijske drške i protukliznog gumenog vrha. Opremljen sjedalom koje podupiru tri noge koje korisniku omogućuje siguran i udoban odmor. Zahvaljujući podešavanju visine, vrlo je praktičan za svakodnevnu upotrebu.

Elementi štapa:



2. Namjena

Štap je pomoćna oprema koja se koristi za povećanje površine oslonca kod teško pokretljivih pacijenata. Također se preporučuje pacijentima kojima je potrebna pomoć i podrška pri hodu, a može se koristiti i kao pomoć u održavanju ravnoteže nakon ozljeda donjih udova ili trupa.

Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koji mogu ometati oslonjanje na štap.

3. Namještanje

- Za podešavanje štapa, odvrnite bravu za podešavanje i pritisnite gumb za zaključavanje. Odberite odgovarajuću duljinu pritiskom na gumb za zaključavanje, a zatim zategnite bravu za podešavanje. Štap je podesiv u koracima od 2,5 cm.
- Za rasklapanje sjedala, uhvatite ručku sjedala i povucite prema gore. Pritisnite sjedalo na suprotnoj strani (područje pritiska) kako biste bili sigurni da je potpuno rasklopljeno.
- Za preklapanje ponovite radnje obrnutim redoslijedom.
- Za postavljanje pravilne duljine štapa, stanite uspravno i savijte ruku u zglobu lakta pod kutom

od 20°.

- Štap treba prilagoditi individualno korisniku tako da rukohvat bude u razini zgloba kuka.
- Prije uporabe provjerite je li štap stabilan i da gumb za zaključavanje u potpunosti strši kroz rupu za podešavanje na štapu.

BILJEŠKA! U slučaju nedoumice oko tehnike kretanja uz pomoć štapa, obratite se osobi koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4. Tehnička specifikacija

Tip štapa	podesiv, sa sjedištem
Podešavanje visine	86-96 cm
Maks. kapacitet	159 kg
Težina	1 kg
Boja	crna

5. Napomene i preporuke

Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje štapa, nepoštivanje sigurnosnih pravila ili za korištenje suprotno namjeni.

- Prije svake uporabe štapa provjerite da je sve u redu. Ne koristite štap ako se uoče kvarovi ili nedostaci.

6. Održavanje

Elemente štapa potrebno je redovito održavati:

- Sjedalo se može čistiti hladnom ili toplom vodom pomoću vlažne (ne mokre) krpe i bez upotrebe deterdženata. Teže mrlje treba očistiti spužvom.

7. Uvjeti skladištenja i transporta

Proizvod ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, djelovanju vode ili vlage.

