

PRIJENOSNI KOMPLET S IRIGATOROM ZA KLISTIRANJE



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.
Ante Kovačića 31, 10432 Bregana
Tel: +385 1 20 20 504
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
Web: www.medicaldirect.hr

SKU: ST372

Kako primijeniti klistir?

Legnite na leđa ili bok i privucite oba koljena svojim prsima.

Odaberite položaj u kojem ćete se osjećati najugodnije.

Kada ste se udobno smjestili lagano umetnite nastavak kroz analni otvor. Zaustavite se ako osjetite bilo kakav otpor i lagano podesite kut kako bi nastavak nesmetano i bezbolno ušao (ne više od 7 cm).



Otvorite regulator i lagano pustite tekućinu. Naglo puštanje smjesta može izazvati potrebu za pražnjenjem. Ključ uspješnog postupka jest zadržavanje tekućine dok ne proradi prirodno urođena peristaltika crijeva. Ako osjetite grčeve, zaustavite tekućinu, duboko dišite i lagano masirajte područje abdomena.



Kada ste primili tekućine u količini koju možete zadržati, lagano izvucite nastavak.

Ovisno o osjećaju nastavite ležati ili ako ćete se osjećati ugodnije premjestite se na wc školjku;

Nakon što ste zadržali tekućinu nekoliko minuta, sjednite na wc školjku i opustite se; Pričekajte dok ne budete u mogućnosti u potpunosti se isprazniti.

Nakon što ste završili

Dobro očistite cijeli komplet nakon što ste završili s postupkom;

Pustite komplet da se osuši na zraku prije nego što ga pospremite.



Pročitajte više na našem blogu:



JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana, kao uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom DVIJE (2) godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA i njime nisu obuhvaćeni ostali potrošni dijelovi priloženi uz uređaj (manžeta, cijev, zračni čep). Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPNJE

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA

U slučaju reklamacija obratite se na:

Medical Direct d.o.o., Ante Kovačića 31, 10432 Bregana

TEL: 01/2020-504, E-mail: prodaja@medicaldirect.hr