

Kadica za pranje kose

SKU: KADICA

UVOD

Prije uporabe proizvoda, provjerite da li oprema ima oštećenja koja bi mogla nastati tijekom transporta. Ako dođe do takve situacije, obratite se prodajnom mjestu. Zatim je važno pročitati sadržaj ovog priručnika koji sadrži važne informacije za korisnika.

NAMJENA

Prijenosni komplet za pranje kose čine umivaonik (kadica) na napuhavanje sa sustavom za odvod vode te spremnik koji se napuni vodom sa cijevi kojom se tušira kosa. U kompletu također dolazi pumpa za napumpavanje kadice. Umivaonik za pranje kose omogućuje osvježavajuće, revitalizirajuće pranje, šišanje ili bojanje kose bez ustajanja iz kreveta.

UPOZORENJE!

- Ne koristiti proizvod u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.
- Timago International Group odbacuje svaku odgovornost za posljedice nepravilne upotrebe ovog proizvoda i za neovlaštene preinake na okviru proizvoda.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Timago International Group izjavljuje pod svojom isključivom odgovornošću da proizvod proizveden i stavljen na tržište od strane Timago International Group udovoljava odredbama Uredbe 2017/745 o MEDICINSKIM UREĐAJIMA od 5. travnja 2017.

U tu svrhu, Timago International Group jamči i izjavljuje pod svojom isključivom odgovornošću sljedeće:

1. Uređaji ispunjavaju zahtjeve opće sigurnosti i performansi propisane Prilogom I Uredbe 2017/745 kako je navedeno u Prilogu IV gore spomenute uredbe.
2. Uređaji NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Uređaji NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Uređaji su pakirani u NESTERILNOJ KUTIJI.
5. Uređaji pripadaju klasi I u skladu s odredbama Priloga VIII gore spomenute uredbe.
6. Timago International Group dostavlja nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom dokazuje sukladnost s uredbom 2017/745, najmanje 10 godina od posljednje proizvodnje serije. Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski kod proizvođača (SRN), UDI-DI kod te svi pozivi na korištene propise uključeni su u EU izjavu o sukladnosti koju Timago International Group izdaje i čini dostupnom putem svojih kanala.

OPĆA UPOZORENJA

- Molimo pažljivo se poslužite ovim priručnikom za ispravnu uporabu uređaja.
- Provjerite je li proizvod isporučen neoštećen i čuvajte ga podalje od izvora topline.
- Vijek trajanja uređaja određen je istrošenošću dijelova koje nije moguće popraviti i/ili

zamijeniti.

- Uvijek obratite pažnju na prisutnost djece.
- Uvijek se konzultirajte sa svojim liječnikom ili terapeutom za pravilnu upotrebu uređaja.
- Korisnik i/ili pacijent moraju prijaviti svaki ozbiljan incident povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države kojoj korisnik i/ili pacijent pripadaju.

Prijenosni bazen za pranje glave na napuhavanje s PVC rupom za drenažu je mekan i udoban za korištenje. Dvostruke zračne komore štite od prolijevanja vode i pjene.

Set sadrži:

- Bazen
- Spremnik za vodu
- Tuš
- Odvodno crijevo
- Pumpa
- Držać spremnika

PRIMJENA

Komplet za pranje glave omogućuje vam pranje glave pacijenta u ležećem položaju. Preporuča se posebno za kućnu upotrebu pri njezi ležećih osoba, kao i starijih osoba, kojima je teško nagnuti glavu i sagnuti se.

KAKO KORISTITI?

- Prvo trebate napuhati vodu u bazenu pomoću pumpe, a zatim zatvoriti odvodni ventil koji se nalazi na dnu bazena. Bazen se može napuniti toplom vodom ispod 50°C.
- Kombinirajte spremnik za vodu s tušem
- Spremnik treba napuniti toplom vodom temperature koja ne prelazi 50 °C. Uz držać spremnika, spremnik se može objesiti na postolje ili zid.
- Pripremite kantu, a zatim unutra umetnite odvodno crijevo. Kako biste osigurali ispravan odvod vode, pazite da crijevo nema nabore.
- Stavite pacijentovu glavu u izrez za vrat, a zatim otvorite ventil za tuširanje kako biste podesili protok vode.
- Nakon pranja glave otvorite odvodni ventil tako da voda kroz odvodno crijevo teče u kantu.

ODRŽAVANJE

Proizvodi marke Timago International Group pažljivo su provjereni i isporučuju se s CE oznakom, nakon što se puste na tržište.