

yuwell



UPUTE ZA KORIŠTENJE



MEDICAL
DIRECT

**Koncentrator
kisika**

Za reklamacije obratite se na:

Medical Direct d.o.o.

Prudnjaci 26b, HR-10437 Bestovje

Tel: +385 1 20 20 504

E-mail: prodaja@medicaldirect.hr

Web: www.medicaldirect.hr

YU-300

Upozorenja

Koncentrator kisika nije namijenjen za oživljavanje i održavanje na životu te nema monitor ni mogućnost praćenja pacijenata.

Prije instalacije

Koncentrator kisika tijekom transporta treba stajati uspravno kako ne bi došlo do oštećenja. Ako izlazi napon mreže varira, koristite stabilizator napona. Koristite prikladan set za napajanje. Ne otvarajte samostalno kućište uređaja, obratite se u servis.

Čuvanje proizvoda

Koncentrator kisika držite dalje od zapaljivih i eksplozivnih sredstva. Koncentrator kisika postavite u prozračenu prostoriju bez direktne sunčeve svjetlosti.

Mjesto koncentratora kisika mora biti barem 10 cm sa svake strane udaljeno od zida, zavjesa, namještaja i drugim prepreka.

Ne stavljajte koncentrator kisika u skućeni prostor. Postavite ga dalje od izvora topline, vatre, vlage, pretjerano prozračnog ili premalo prozračnog prostora.

Ne odlažite nikakve stvari na koncentrator kisika.

Ni u kojem slučaju ne blokirajte otvore za zrak na uređaju, inače bi se uređaj mogao pregrijati i ugasiti ili se može smanjiti koncentracija kisika.

Uporaba

Kisik je plin koji podržava gorenje. Pacijenti, odnosno korisnici NE SMIJU pušiti za vrijeme korištenja koncentratora. Šibice, zapaljene

cigarete ili druge predmete koji gore ne koristite u sobi gdje se nalazi koncentrator. Spontano i naglo zapaljenje uređaja može se dogoditi ako ulje, mast ili masne tvari dođu u doticaj s kisikom pod tlakom. Takve lako zapaljive tvari držite dalje od koncentratora kisika. Koncentrator kisika ne koristite u vlažnim prostorijama ili blizu tekućina.

Sažetak

Funkcija kisika

Kisik može poboljšati tjelesne funkcije, i to posebno kod starijih osoba, trudnica, studentima... tj. onima koji imaju fiziološku hipoksiju. Također može smanjiti umor nakon fizičke ili psihičke istrošenosti.

Opis proizvoda

Proizvodi kisik za osobnu uporabu/njegu i kozmetiku.

Sastav/struktura

Sigurnosni plastični poklopac

Daljinski upravljač kojim se može jednostavno koristiti

Funkcija prikaza vremena, prikazuje vrijeme rada

Funkcija za automatsko gašenje

Funkcija generiranja aniona može poboljšati funkciju alveolarne ventilacije i povećati brzinu apsorpcije kisika

Kompresor s termičkom zaštitom jamči sigurnost baterije

Specifikacije

1. Napajanje: AC 220V $\pm$ 10%, 50Hz
2. Ulazna snaga: 100VA
3. Koncentracija kisika: 30% ~ 90%
4. Protok kisika: 1 ~ 5 L/min

- 5. Buka: $\leq 43\text{dB}$
- 6. Težina: 7,5 kg
- 7. Dimenzije: 27 x 17,5 x 29,5 cm
- 8. Sigurnosni sistem:
Ako je temperatura previsoka, prilikom preopterećenja ili nestabilne veze uređaj se automatski gasi.
- 9. Klasifikacija: Klasa II
- 10. Način rada: kontinuirani
- 11. Radna temperatura: $10 \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 12. Relativna vlažnost: $30 \sim 75\%$
- 13. Tlak: $860 \sim 1060\text{hPa}$

Ako je uređaj bio na temperaturi ispod $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, ostavite ga na sobnoj temperaturi 4 h prije uporabe

14. Transport i skladištenje


- na temperaturi: $-20 \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- relativna vlažnost: $10 \sim 93\%$
- atmosferski tlak: $700 \sim 1060\text{hPa}$

Koncentrator kisika treba biti skladišten u prostorijama bez sunčeve svjetlosti, bez korozivnih plinova i u dobro ozračenom prostoru. Prilikom transporta treba izbjegavati udarce i obrnuti položaj.


Pregled proizvoda

Pregledajte proizvod prije uporabe, te ako slučajno uočite kakva oštećenja odmah kontaktirajte dobavljača.


Prikaz značajki

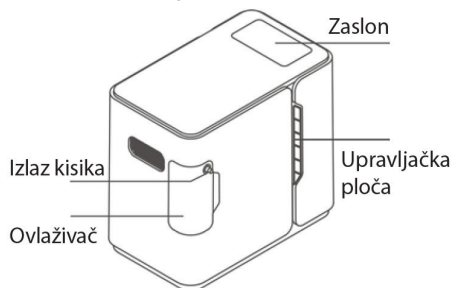


Sl. 1: Prikaz prednje strane uređaja

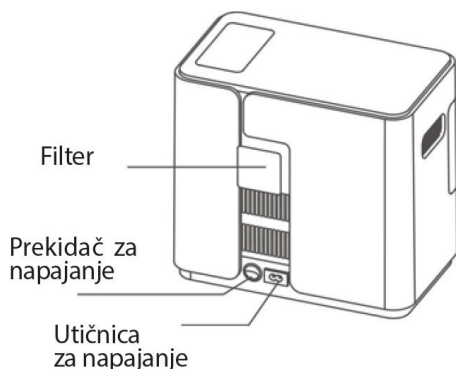


Sl. 2: Prikaz stražnje strane uređaja

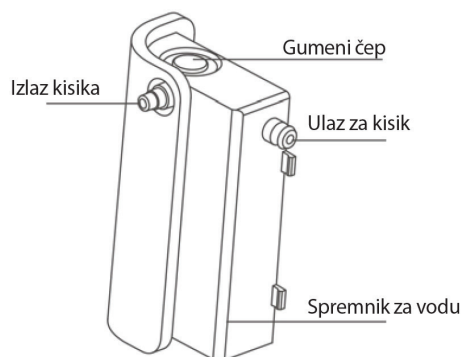

Sl. 3: Prikaz kontrolne ploče

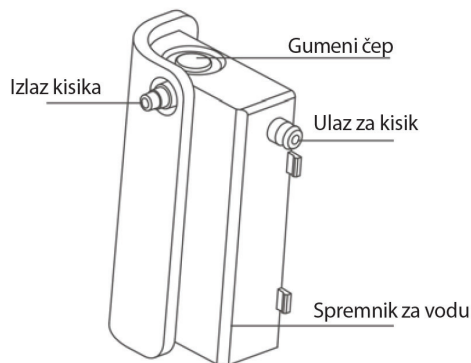


Sl. 4: Prikaz ovlaživača

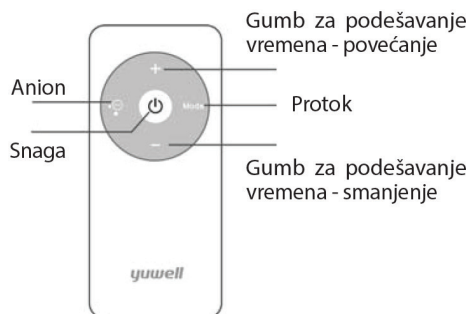

Sl. 5: Prikaz daljinskog upravljača

Paljenje/pokretanje uređaja

Izvučite ovlaživač u smjeru prikazanom na slici, uklonite gumeni čep te spremnik napune čistom vodom ili destiliranom do razine koja je označena na spremniku (uređaj može funkcionirati i bez vode u spremniku).

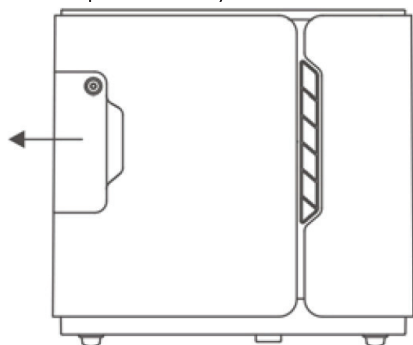

Sl. 6

Strujnim kabelom povežite uređaj s izvorom napajanja.

Pritiskom na gumb za paljenje "I", LCD će prikazati pozdrav "HELLO" to znači da je sve u redu s uređajem.

4 sekunde nakon pokretanja LCD će prikazati protok kisika, koncentraciju kisika, proteklo vrijeme te sučelje za postavljanje vremena "--", te nakon toga koncentracija kisika počinje s radom.

Postavke protoka kisika

Pritiskom na gumb "FLOW RATE" na kontrolnoj ploči zaslon će prikazati brzinu protoka i koncentraciju kisika. U međuvremenu kisik počinje izlaziti.

Postavljanje vremena

Uređaj ima timer u rasponu od 10 do 120 min. Kada LCD prikazuje "--", tada uređaj neprestano radi (nije aktiviran timer). Pritiskom na "+" vrijeme rada uređaja povećava se za 10 min, za kontinuirano povećanje gumb držite 1,5 sekundi. Pritiskom na "-" vrijeme rada uređaja smanjuje se za 10 min, za kontinuirano smanjenje gumb držite 1.5 sec. Koncentrator kisika automatski se gasi kada brojač dođe na 0.

ANION funkcija

Pritiskom "ANION" gumba na kontrolnoj ploči počinje generiranje anionskog kisika.

Gašenje uređaja


Za gašenje koncentratora kisika pritisnite gumb za paljenje/gašenje.

Daljinsko upravljanje

Za daljinsko upravljanje koristite infracrveni daljinski upravljač. Napomena: daljinski mora biti okrenut prema prijemniku na kontrolnoj ploči koncentratora kisika.

Napomena: prije redovnog održavanja, isključite koncentrator kisika iz struje. Preporučuje se redovno održavanje jednom godišnje. Kućište čistite s blagim sredstvom za čišćenje u kući i neabrazivnom tkaninom ili spužvom barem jednom mjesečno.

Čišćenje filtera

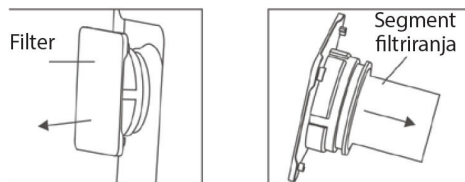


Slike 7. i 8.

Ne koristite uređaj bez postavljenih filtera. Preporučeno čišćenje filtera je svakih 15 dana. Učestalost čišćenja filtera ovisi o korištenju uređaja. Ako filter potamni, zamijenite ga neovisno o korištenju uređaja.

Filter čistite usisavačem ili isperite u toploj pjenušavoj vodi, te ga osušite prije ponovne uporabe.

Čišćenje spremnika za vodu


Svakodnevno mijenjate vodu u spremniku. Jednom tjedno čistite spremnik za vodu i gumeni čep, kako bi tijekom korištenja imali čisti kisik. Ako spremnik ima čudan miris, isperite ga octom i zatim ponovo vodom.

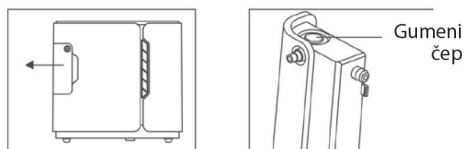

Sl. 8. i 9. prikazuje spremnik za vodu


Zamjena cijevi osigurača

Prvo isključite napajanje i zatim cijev osigurača zakrenite u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.

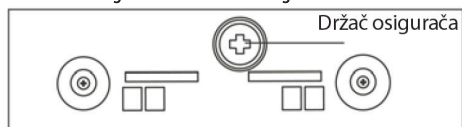

Slika 10.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili eventualnih kvarova obratite se servisu.

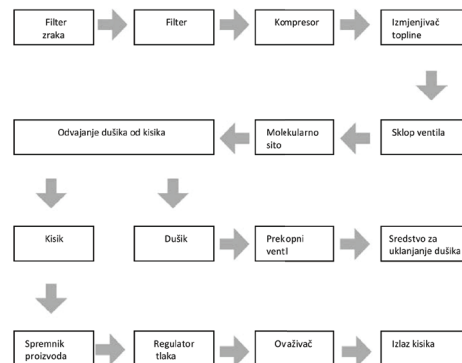

Skica putanje plina

JAMSTVO

Medical Direct d.o.o., Prudnjaci 26b, Bestovje, jamči ispravan rad uređaja 2 godine od dana kupnje. Isto tako jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje. Popravci obavljeni tijekom jamstvenog roka ne produžuju jamstveni rok. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugima pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske. Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

DATUM KUPNJE

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA

Medical Direct d.o.o.
Prudnjaci 26b,
10437 Bestovje
TEL: 01/2020-504,
E-mail: prodaja@medicaldirect.hr,
WEB: www.medicaldirect.hr